

Charge maximale : 570 kg

BariSling est un auxiliaire de levage conçu pour lever des personnes pesant 200 kg ou plus. Il peut être utilisé pour effectuer des levages mobiles ou stationnaires, avec un étrier à quatre points ou avec BariTurn. BariSling comporte six points d'accrochage. Il comporte deux oeillets d'accrochage derrière et quatre en bas, sous les jambes, afin de répartir la pression de manière confortable et sûre.

SystemRoMedic comporte un vaste choix de harnais de levage fonctionnels, confortables et de haute qualité, adaptés aux différents types d'auxiliaires de levage et aux différents besoins des utilisateurs. Les harnais de levage sont disponibles dans plusieurs tailles et matériaux différents. Tous les modèles sont à la fois sûrs et très faciles à utiliser. Le choix du modèle et du matériau dépend de la situation de levage et des besoins du patient.



Contrôle de fonctionnement

Inspection visuelle et mécanique

Effectuer des inspections régulières du harnais de levage. Toujours contrôler après un lavage. Vérifier que les coutures et les matériaux sont intacts et non endommagés. Vérifier si le matériau est usé ou pali. Exercer une charge sur les boucles et les poignées et vérifier qu'elles supportent une contrainte élevée. S'il présente des signes d'usure, le produit doit être mis au rebut.



Toujours lire le manuel

Toujours lire les manuels de tous les auxiliaires utilisés lors d'un transfert de patient.


Conserver le manuel pour qu'il soit accessible aux utilisateurs du produit.

Ne pas laisser le patient sans surveillance pendant la phase de transfert.

Pour le bien-être de la personne et pour lui éviter de glisser du harnais, toujours vérifier minutieusement l'auxiliaire de levage. Accrocher d'abord les œillets du dos du harnais de levage, puis accrocher les œillets des appuis pour les jambes.

Utiliser un étrier de levage éprouvé.

Description du produit BariSling

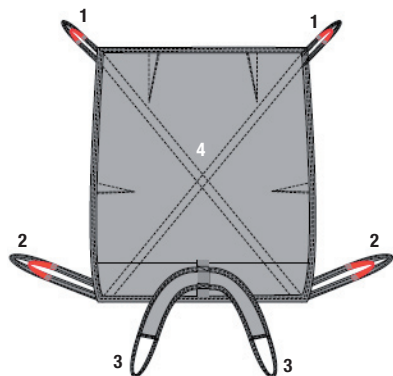

BariSling est conçu comme un harnais intégral, sans appuis séparés pour les jambes. Il comporte six points d'accrochage, deux oeillets d'accrochage derrière, deux en bas à l'extérieur des jambes et deux entre les cuisses afin de répartir la pression de manière confortable et sûre.

BariSling se compose de :

1. Oeillets de levage arrière
2. Oeillets de levage avant
3. Sections pour les jambes avec oeillets de levage
4. Sections de dossier et d'assise

Utilisation de BariSling

Mise en place de BariSling quand la personne est au lit :

L'utilisateur se retourne seul de préférence. Si la personne n'y parvient pas, nous recommandons d'utiliser des auxiliaires d'aide au retournement tels que SafeHandlingSheet ou TopSheet, par exemple.

Placer le harnais de levage de sorte que le milieu de celui-ci suive la colonne vertébrale et que le rebord inférieur soit à env. 5-10 cm au-dessus de l'articulation des genoux de l'utilisateur. Placer le bord du harnais de levage aussi loin que possible sous le patient.

Retourner le patient de sorte que le harnais de levage puisse être tiré vers l'avant et ajusté. Placer ensuite les appuis pour les jambes entre les genoux. Vérifier que BariSling est réparti de manière uniforme des deux côtés.

Il est conseillé de relever le dossier du lit avant de commencer le levage.

Mise en place de BariSling quand le patient est assis au bord du lit :

Le patient se penche d'un côté du lit et l'assistant replie BariSling pour le placer juste sous le postérieur du patient, aussi loin que possible, avec la ligne centrale au centre, sous l'entrejambe.

Placer le harnais de levage de sorte que le milieu de celui-ci suive la colonne vertébrale et que le rebord inférieur soit à env. 5-10 cm au-dessus de l'articulation des genoux de l'utilisateur. Placer le bord du harnais de levage aussi loin que possible sous le patient.

Une fois que BariSling est mis en place, le patient s'assied de nouveau et se tourne de l'autre côté, de manière à pouvoir avancer et ajuster le harnais de levage. Placer ensuite les appuis pour les jambes entre les genoux. Vérifier que BariSling est réparti de manière uniforme des deux côtés.

Mise en place de l'étrier à quatre points :

Quand le levage est effectué avec un auxiliaire de levage mobile ou avec un moteur de levage stationnaire, il est recommandé d'utiliser un étrier à quatre points. Placer d'abord les oeilletons de levage arrière du côté large de l'étrier de levage, puis les quatre oeilletons de levage inférieurs du côté plus étroit.

Mise en place de BariTurn :

BariTurn est une plaque pivotante qui, associée à deux moteurs de levage, permet d'effectuer un levage avec rotation. Fixer d'abord les quatre oeilletons de levage inférieurs sur l'étrier de levage de l'un des moteurs, puis les deux oeilletons de levage arrière sur l'étrier de levage de l'autre moteur de levage.

Levage :

Préparer le patient à être levé et lui expliquer ce qui va se passer. Ne jamais laisser le patient sans surveillance pendant la phase de levage et rester attentif à ses signaux. Démarrer le levage. Arrêter quand toutes les sangles de levage sont tendues et vérifier que tout est correct avant de poursuivre le levage. En cas de désagrément pour le patient, interrompre le levage.

Le harnais de levage reste dans le fauteuil sous le patient.

Pour enlever BariSling

Position couchée dans le lit

Abaisser le patient sur le lit et décrocher les sangles d'accrochage de l'étrier de levage. Le patient se tourne d'abord d'un côté du lit, de manière à pouvoir replier BariSling sous le dos du patient. Le patient se penche ensuite de l'autre côté et BariSling peut être retiré.

Charge maximale

Les différents composants de l'auxiliaire de levage assemblé (étrier de levage, harnais, pèse-personne et éventuellement autres accessoires de levage) peuvent avoir des charges maximales autorisées différentes. C'est toujours la charge maximale autorisée la plus faible de chaque produit respectif qui prévaut pour l'appareil de levage complet. Toujours vérifier la charge maximale autorisée de l'auxiliaire de levage et de ses accessoires avant d'utiliser l'appareil et prendre contact avec votre revendeur en cas de doute.

Produit	Numéro d'article	Poids recommandé pour l'utilisateur (kg)	Poids maxi.
BariSling XXXL	47001010	200-570	570 kg

ATTENTION ! Recommandé pour un étrier à quatre points ou BariTurn.

Conseils d'entretien :

Lire l'étiquette-conseil du harnais de levage.



Ne pas utiliser de produit de rinçage adoucissant.
Éviter le sèche-linge pour augmenter la longévité du produit.

ATTENTION !

Le levage et le déplacement d'une personne entraînent toujours un risque. Vérifier que l'état de santé de l'utilisateur autorise un levage. S'il y a le moindre doute, éviter de lever la personne. En tant qu'assistant, on est toujours responsable de la sécurité de l'utilisateur.

Si vous avez des questions sur le produit et son utilisation, veuillez contacter votre distributeur local. Prière de consulter le site www.handicare.com pour la liste complète des distributeurs. Veiller à toujours disposer de la version correcte du manuel. La version la plus récente peut être téléchargée sur notre site Internet : www.handicare.com

Handicare AB
Veddestav. 15. Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN

Tel: +46 (0)8-557 62 200
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com
E-mail: info@handicare.se

