
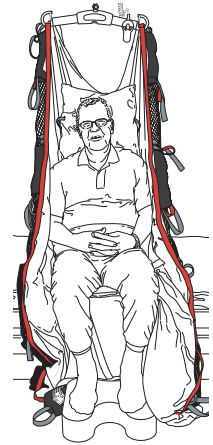
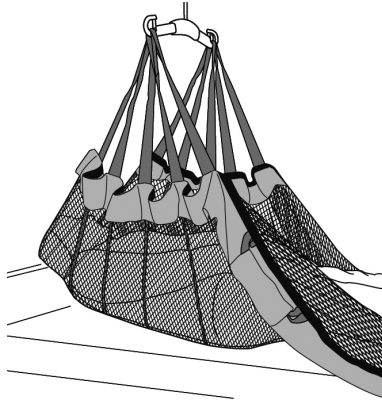


# SafeHandlingSheet

SystemRoMedic™

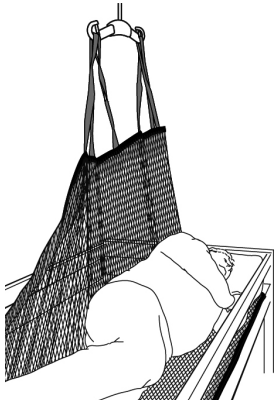

Max: 300 kg

SafeHandlingSheet est un drap qui peut être utilisé pour effectuer un levage mobile ou stationnaire pour positionner un patient sur son lit. Il est conçu avec seize points d'accrochage, huit de chaque côté du patient. SafeHandlingSheet est conçu pour répondre aux besoins de positionnement du patient dans son lit.

SystemRoMedic comporte un vaste choix de harnais de levage fonctionnels, confortables et de haute qualité, adaptés aux différents types d'auxiliaires de levage et aux différents besoins des utilisateurs. Les harnais de levage sont disponibles dans plusieurs matières différentes et dans les tailles de XXS à XXL. Tous les modèles, à la fois sûrs et très faciles à utiliser, peuvent supporter une charge maximale de 300 kg. Le choix du modèle et de la matière dépend de la situation de levage et des besoins du patient.



## Contrôle de fonctionnement

### Inspection visuelle et mécanique

Effectuer des inspections régulières du harnais de levage. Toujours contrôler après un lavage. Vérifier que les coutures et les matériaux sont intacts et non endommagés. Vérifier si le matériau est usé ou pali. Exercer une charge sur les boucles et les poignées et vérifier qu'elles supportent une contrainte élevée. S'il présente des signes d'usure, le produit doit être mis au rebut.



## Toujours lire le manuel

Toujours lire les manuels de tous les auxiliaires utilisés lors d'un transfert de patient.


Conserver le manuel pour qu'il soit accessible aux utilisateurs du produit.

Ne pas laisser le patient sans surveillance pendant la phase de transfert.

Pour le bien-être de la personne et pour lui éviter de glisser du harnais, toujours vérifier minutieusement l'auxiliaire de levage. Accrocher d'abord les œillets du dos du harnais de levage, puis accrocher les œillets des appuis pour les jambes. Utiliser un étrier de levage éprouvé.

C'est toujours la charge maximale autorisée la plus faible de chaque produit respectif qui prévaut pour l'appareil de levage complet. Toujours vérifier la charge maximale autorisée de l'auxiliaire de levage et de ses accessoires avant d'utiliser l'appareil et prendre contact avec votre revendeur en cas de doute.

## Description produit de SafeHandlingSheet

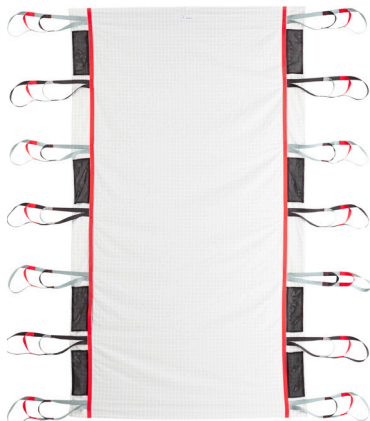

SHSheet L Filet polyester/WendyLett4Way

SafeHandlingSheet est conçu avec des sangles de levage de chaque côté long.

Les sangles de levage sont alternativement de couleur grise et noire afin de faciliter le repérage par l'assistant.

Les sangles de levage comportent trois options pour les œillets, également de couleurs différentes, gris, rouge et noir.


SafeHandlingSheet porte une étiquette indiquant le côté à placer vers la tête de lit. « This side up » (ce côté vers le haut).

L'étiquette est aussi placée de manière à indiquer le milieu du drap.



SHSheet L Filet polyester


Une fois que le positionnement est terminé, glisser les sangles sous le matelas ou les placer dans les pochettes placées sur les côtés.

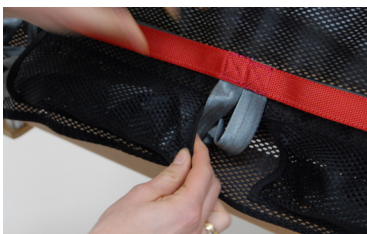

### Un conseil !

- Placer de préférence un drap ordinaire au-dessus de SafeHandlingSheet.
- Placer le patient au centre de SafeHandlingSheet.
- Border l'excédent de tissu au pied du lit pour être à disposition si le patient glisse plus bas dans son lit et qu'il faut le remonter plusieurs fois.
- Il est recommandé d'utiliser une traverse de plafond pour effectuer un levage par le haut.
- Si cela est possible, déplacer de préférence le lit plutôt que de pousser ou tirer le patient si celui-ci s'est soulevé du support.


## Utilisation de SafeHandlingSheet

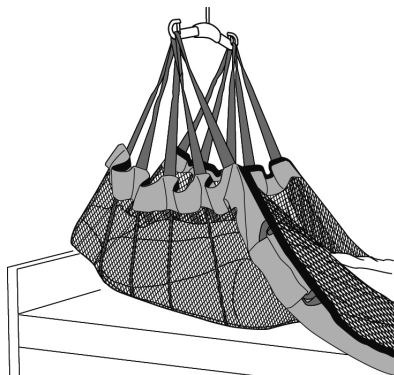

### Remonter la personne dans le lit :

Accrocher les cinq sangles les plus hautes (ou autant que nécessaire pour couvrir les points de friction) des deux côtés sur l'étrier de levage.

Commencer à lever le patient et remonter celui-ci plus haut dans le lit dès que les points de friction sont soulevés du lit.

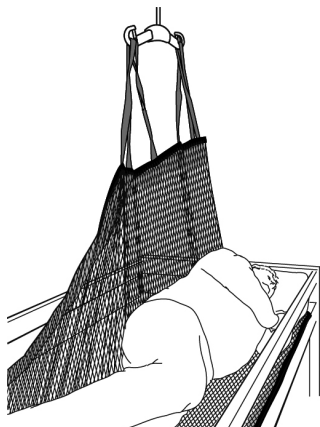

### Retourner la personne dans son lit :

Pour que le patient se retrouve au centre du lit après avoir été retourné, il est recommandé d'effectuer d'abord un levage (voir : « Remonter la personne dans le lit ») dans le sens latéral vers l'un des bords du lit, pour ensuite effectuer le retournement.

Accrocher ensuite les quatre à cinq sangles les plus proches du centre sur un côté de SafeHandlingSheet sur l'étrier de levage. Pour plus de sécurité, utiliser une grille des deux côtés ou faire appel à un assistant. Commencer à retourner le patient.

### Remplacement de SafeHandlingSheet :


Pour remplacer SafeHandlingSheet, effectuer un levage selon la description précédente. Dès que le patient s'est décollé du support, placer un nouveau SafeHandlingSheet sous le patient. Effectuer ensuite un retournement (voir : « Retourner la personne dans son lit ») avec le nouveau drap et faire rouler ou presser vers le bas l'ancien drap derrière le dos du patient, puis le faire descendre de nouveau pour le mettre sur le dos. Effectuer un nouveau retournement avec le nouveau drap, mais dans l'autre sens, puis retirer l'ancien drap.

## Relever le patient assis au bord du lit

**Attention !** Pour que cette méthode soit adaptée, le patient doit être capable de rester assis au bord du lit.


Abaisser le lit pour que le patient puisse s'appuyer sur ses pieds au moment de se relever du bord du lit.

Utiliser un tabouret ou un repose-pieds si le lit n'est pas assez bas.

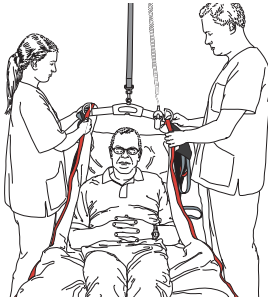

Préparer le patient en vue de le relever.

Relever le dossier du lit et placer les sangles supérieures sur l'étrier de levage.

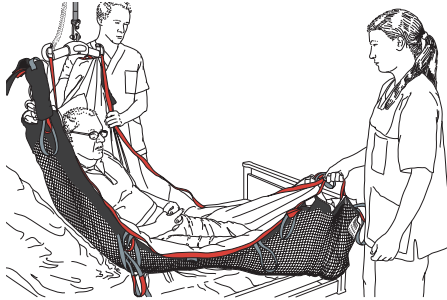

Un assistant saisit les poignées placées au pied du lit.

Commencer à relever le patient en levant l'auxiliaire de levage.

L'assistant fait passer les jambes du patient de l'autre côté du bord du lit et les abaisse vers le sol.

S'assurer que le patient est stablement assis au bord du lit. Genoux et hanches doivent être au même niveau.

Placer un appui adapté pour la marche ou la station debout devant le patient avant de le relever.



### Produit

SHSheet L filet poly  
SHSheet XL poly  
SHSheet XXL poly/  
renforcé  
SHSheet L Filet Poly/  
WendyLett4Way

### N° Art.

47522007  
47502008  
47502009  
47542007

### Dimensions

240 x 115  
240 x 115  
240 x 130

### Matériau

Filet polyester : matériau aéré et effet ventilant  
Polyester : matériau résistant et à faible friction  
Polyester : matériau résistant et à faible friction  
Filet polyester : matériau aéré et effet ventilant  
WendyLett4Way : Surface de couchage avec toile de drap

### Poids maxi.

300kg/661 lbs  
400kg/900 lbs  
570kg/1250 lbs

### Conseils d'entretien :

Lire l'étiquette-conseil du harnais de levage.



Ne pas utiliser de produit de rinçage adoucissant.

Éviter le sèche-linge pour augmenter la longévité du produit.

Si vous avez des questions sur le produit et son utilisation, veuillez contacter votre distributeur local. Prière de consulter le site [www.handicare.com](http://www.handicare.com) pour la liste complète des distributeurs. Veiller à toujours disposer de la version correcte du manuel. La version la plus récente peut être téléchargée sur notre site Internet : [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640  
SE-175 27 Järfälla  
SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200  
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)  
E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

