



ThoraxSling, polyester
Charge maxi : 300 kg

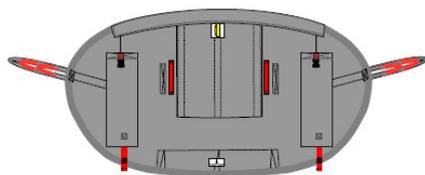

ThoraxSling, wipeable
Charge maxi : 205 kg



ThoraxSling, with seat support, polyester
Charge maxi : 300 kg

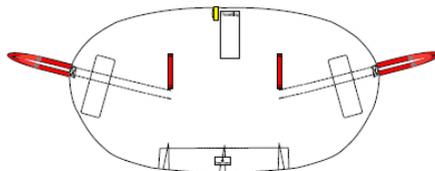

ThoraxSling, with seat support, disposable
Charge maxi : 200 kg

ThoraxSling est une veste de relevage conçue pour MiniLift. Facile à mettre en place pour le personnel, elle donne également un sentiment de sécurité à la personne qui l'utilise. Elle est conçue pour fournir appui et sécurité quand on relève une personne et pour lui faciliter l'accès aux WC. ThoraxSling est disponible dans deux modèles, l'un fournissant un appui derrière le dos et l'autre également sous le postérieur.

SystemRoMedic comporte un vaste choix de harnais de levage fonctionnels, confortables et de haute qualité, adaptés aux différents types d'auxiliaires de levage et aux différents besoins des utilisateurs. Les harnais de levage sont disponibles dans plusieurs matières différentes et dans les tailles de XXS à XXL. Tous les modèles, à la fois sûrs et très faciles à utiliser, peuvent supporter une charge maximale de 300 kg. Le choix du modèle et de la matière dépend de la situation de levage et des besoins du patient.



Contrôle de fonctionnement

Inspection visuelle et mécanique

Effectuer des inspections régulières du harnais de levage. Toujours contrôler après un lavage. Vérifier que les coutures et les matériaux sont intacts et non endommagés. Vérifier si le matériau est usé ou pâli. Exercer une charge sur les boucles et les poignées et vérifier qu'elles supportent une contrainte élevée. S'il présente des signes d'usure, le produit doit être mis au rebut.



Toujours lire le manuel

Toujours lire les manuels de tous les auxiliaires utilisés lors d'un transfert de patient.

Conserver le manuel pour qu'il soit accessible aux utilisateurs du produit.

Ne pas laisser le patient sans surveillance pendant la phase de transfert.

C'est toujours la charge maximale autorisée la plus faible de chaque produit respectif qui prévaut pour l'appareil de levage complet. Toujours vérifier la charge maximale autorisée de l'auxiliaire de levage et de ses accessoires avant d'utiliser l'appareil et prendre contact avec votre revendeur en cas de doute.


Description des œillets des sangles



ThoraxSling comporte trois différentes possibilités d'accrochage, puisque l'œillet de sangle a trois niveaux différents :

Le choix de l'œillet de sangle se fait en choisissant le plus court qui atteigne l'étrier de l'auxiliaire de relevage.

Description de la sangle autour de la taille

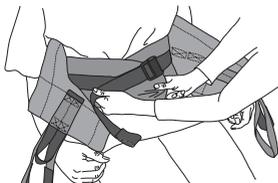


La sangle autour de la taille est prévue pour fournir soutien et sécurité pendant le relevage.

Après l'avoir accrochée, on peut obtenir plus de soutien en serrant avec la sangle détendue.


Mise en place de ThoraxSling sur le patient



Placer ThoraxSling derrière le dos du patient, avec l'étiquette de marquage tournée vers l'extérieur. La veste se place aussi bas que possible, de manière à ne pas exercer de pression sous les aisselles, placer les bras par-dessus. Pour faciliter la manipulation et si cela est possible, le patient peut se pencher légèrement vers l'avant. Le milieu de la veste de relevage doit suivre la colonne vertébrale du patient.

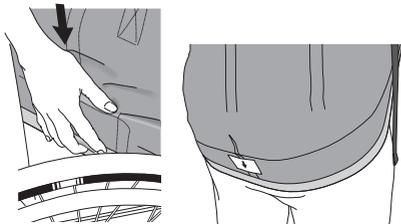



ThoraxSling avec appui d'assise se place de la même manière, sauf que l'appui d'assise se place sous le postérieur de l'utilisateur. Saisir l'appui d'assise renforcé et le placer sous ou derrière le postérieur.

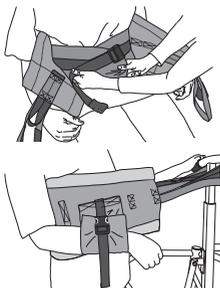

Accrocher la sangle autour de la taille et l'adapter à la taille du patient.

Si l'utilisateur a besoin d'un appui pour l'un de ses bras, par exemple s'il souffre à l'épaule, des appuis pour les bras sont placés des deux côtés de la veste de relevage.

Mise en place de ThoraxSling sur MiniLift

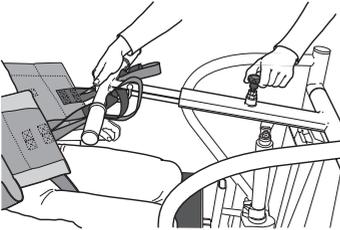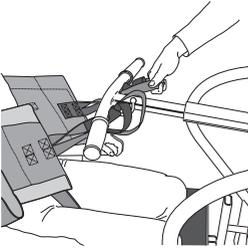

Placer l'auxiliaire de levage une fois réglé individuellement (consulter le manuel pour faire un essai) devant le patient et poser les pieds sur la plaque d'appui des pieds. Le cas échéant, placer en premier la sangle appui-mollet. Faire coulisser ensuite le bras de levage vers l'utilisateur, avant de placer les œillets de levage.

Essayer de trouver la boucle qui convient en veillant à ce que l'auxiliaire de levage soit placé aussi près du patient que possible. Tendre ensuite les sangles avant d'accrocher l'étrier de levage. Ajuster le bras de levage de manière à ce que les sangles soient tendues.

Relever une personne avec MiniLift



ThoraxSling



ThoraxSling with seat support

Demander au patient de se pencher en arrière vers la veste avant de commencer à le relever. Rester attentif aux réactions du patient. Relever la personne jusqu'à la position souhaitée. Au moindre signe de désagrément, interrompre le mouvement et rabaisser le patient.

Matériaux :

Polyester : Matériau résistant et présentant une friction faible. Supporte des températures de lavage élevées.

Disponible: Polypropylène, hydrophobic

Wipeable: Nylon, TPU. Possible pour désinfecter.

Conseils d'entretien, Polyester:

Lire l'étiquette-conseil du harnais de levage.



Ne pas utiliser de produit de rinçage adoucissant.

Éviter le sèche-linge pour augmenter la longévité du produit.

Conseils d'entretien, disponible:

Lire l'étiquette du produit.

Non lavées, jeter quand il est sale ou doit être remplacé pour toute autre raison.



Conseils d'entretien, wipeable:

Utilisez de l'éthanol (alcool) pour nettoyer la housse. La concentration ne doit pas dépasser un volume d'éthanol pour trois volumes d'eau. Ou utilisez un produit désinfectant équivalent.



Information sur les tailles

Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, utiliser des harnais de levage individuels pour chaque utilisateur spécifique.

Taille	XS/Orange	S/Rouge	M/Jaune	L/Vert	XL/Lilas	XXL/Blanc
--------	-----------	---------	---------	--------	----------	-----------

Poids brut rec.

de l'utilisateur	Kg	20-50	30-60	50-80	70-110	100-150	140-200
------------------	----	-------	-------	-------	--------	---------	---------

Si vous avez des questions sur le produit et son utilisation, veuillez contacter votre distributeur local. Prière de consulter le site www.handicare.com pour la liste complète des distributeurs. Veiller à toujours disposer de la version correcte du manuel. La version la plus récente peut être téléchargée sur notre site Internet : www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200

SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

