


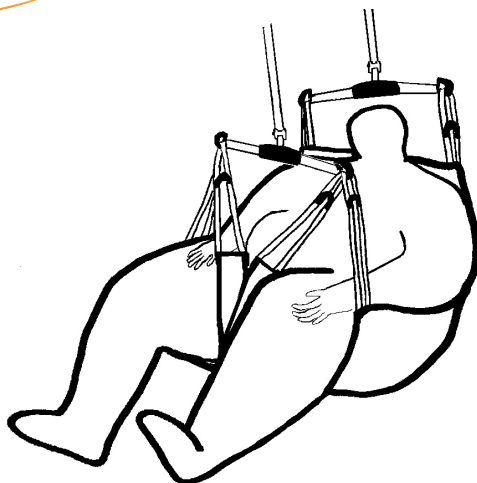

Max: 570 kg

BariSling ist ein Hebegurt, der auf Personen mit einem Körpergewicht von 200 kg und mehr ausgelegt ist. Er eignet sich sowohl für mobile als auch stationäre Hebevorrichtungen mit Vierpunktbügel oder für BariTum. BariSling ist mit sechs Aufhängepunkten versehen. Zwei Aufhängeschlingen sind rückseitig vorhanden und vier unter den Beinen, um den Druck bequem und sicher zu verteilen.

Das SystemRoMedic umfasst eine breite Auswahl an funktionellen und bequemen Hebegurten hoher Qualität, speziell entwickelt für verschiedene Arten von Hebeaktionen und für Patienten mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Die Hebegurte sind in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich. Sämtliche Modelle zeichnen sich durch Sicherheit und einfache Anwendung aus. Die Wahl von Modell und Material ist abhängig von der jeweiligen Hebesituation und dem Bedarf des Patienten.



Kontrolle der Funktion

Sichtprüfung und mechanische Kontrolle

Unterziehen Sie den Hebegurt regelmäßigen Funktionskontrollen. Nach jeder Wäsche prüfen. Prüfen Sie Nähte und Material auf einwandfreien Zustand. Prüfen Sie, ob das Material abgenutzt oder verblichen ist. Belasten Sie Schnallen und Griffe und prüfen Sie, ob sie starker Belastung standhalten. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.



Lesen Sie stets die Gebrauchsanweisung


Lesen Sie unbedingt die entsprechenden Anleitungen für Hilfsmittel zur Umsetzung von Patienten.

Verwahren Sie die Anleitung so, dass sie der Anwender des Produktes rasch zur Hand hat.

Verweilen Sie während des Umsetzungsmoments beim Patienten.

Vermeiden Sie die Gefahr des Abgleitens oder Unbehagens durch sorgfältige Prüfung des Hebegurtes. Zunächst die Rückenschlaufen des Hebegurtes einhängen, danach die Schlaufen der Beinstütze. Nur geprüfte Hebebügel verwenden.

Produktbeschreibung BariSling

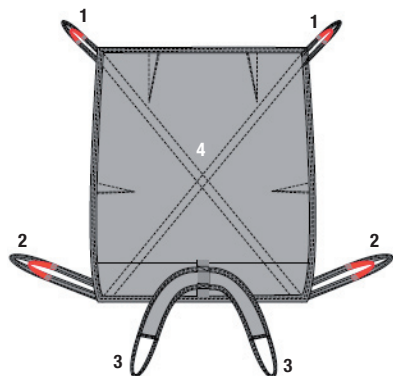

BariSling ist ein Gurt ohne geteilte Beinstütze. Er bietet sechs Aufhängepunkte, zwei Aufhängeschlingen rückseitig, zwei unten an der Beinaußenseite und zwei zwischen den Oberschenkeln. Hierdurch wird der Druck sicher und bequem verteilt.

BariSling besteht aus:

1. Hintere Hebeschlingen
2. Vordere Hebeschlingen
3. Beinteile mit Hebeschlingen
4. Rücken- und Sitzteil.

Anwendung von BariSling

Anlegen von BariSling liegend im Bett:

Der Patient dreht sich zur Seite, wenn möglich aus eigener Kraft. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, empfiehlt sich die Verwendung von Hilfsmitteln zum Umdrehen wie SafeHandlingSheet, TopSheet etc.

Den Hebegurt so anlegen, dass dessen Mittellinie entlang dem Rückgrat und die untere Kante ca. 5-10 cm oberhalb der Kniegelenke des Patienten zu liegen kommen. Die Kante des Hebegurtes so weit wie möglich unter den Patienten schieben.

Den Patienten zurückdrehen, den Hebegurt hervorziehen und justieren. Anschließend die Beistützen zwischen den Knien anlegen. Darauf achten, dass BariSling auf beiden Seiten gleichermaßen anliegt.

Erhöhen Sie die Rückenstütze des Bettes, bevor Sie anheben.

Anlegen von BariSling sitzend an der Bettkante:

Der Patient neigt sich zur Seite, so dass BariSling soweit wie möglich unter das Gesäß des Patienten eingeschoben werden kann. Auf mittige Positionierung achten.

Den Hebegurt so anlegen, dass dessen Mittellinie entlang dem Rückgrat und die untere Kante ca. 5-10 cm oberhalb der Kniegelenke des Patienten zu liegen kommen. Die Kante des Hebegurtes so weit wie möglich unter den Patienten schieben.

Nach Anlegen von BariSling setzt sich der Patient wieder auf und neigt sich zur anderen Seite, so dass der Gurt hervorgezogen und justiert werden kann. Anschließend die Beinstützen zwischen den Knien anlegen. Darauf achten, dass BariSling auf beiden Seiten gleichermaßen anliegt.

Anbringen am Vierpunktbügel:

Beim Heben mit mobilem oder stationärem Hubmotor empfiehlt sich die Verwendung eines Vierpunktbügels. Zunächst die hinteren Schlingen an der breiten Seite des Hebebügels anbringen und danach die unteren vier Schlingen an der schmalen Seite.

Anbringen von BariTurn:

BariTurn ist eine Drehplatte, die zusammen mit zwei Hubmotoren Heben und zugleich Drehen ermöglicht.

Zuerst die vier unteren Schlingen am Hebebügel des einen Hubmotors, danach die beiden hinteren Schlingen am Hebebügel des anderen Hubmotors befestigen.

Heben:

Bereiten Sie den Patienten auf den Hebevorgang vor. Verweilen Sie während des Anhebens stets beim Patienten und achten Sie auf dessen Signale. Beginnen Sie mit dem Anheben. Halten Sie an, wenn sämtliche Hebegurte gespannt sind und vergewissern Sie sich, dass alles in Ordnung ist, bevor den Hebevorgang fortsetzen. Bei Unbehagen den Hebevorgang sofort abbrechen.

Den Hebegurt im Stuhl unter dem Patienten zurücklassen.

Entfernen von BariSling

Bei liegendem Patienten

Den Patienten auf das Bett absenken und die Aufhängegurte am Hebebügel aushaken. Der Patient dreht sich zunächst auf eine Seite, so dass BariSling unter den Rücken des Patienten eingeschoben werden kann. Anschließend dreht sich der Patient auf die andere Seite, so dass BariSling entfernt werden kann.

Höchstbelastung

Die einzelnen Produkte innerhalb der zusammengebauten Hebeeinheit (Lifter, Hehebügel, Hebegurt, Waage und evtl. anderes Zubehör) haben unterschiedliche zulässige Höchstbelastungen. Das zusammengebaute Produkt darf jedoch auf keinen Fall höher belastet werden als das Einzelteil mit der geringsten Höchstbelastung. Prüfen Sie in jedem Fall vor der Anwendung die zulässige Höchstbelastung von Lifter und Zubehör. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Produkt	Artikel-nummer	Empfohlenes Gewicht des Patienten (kg)	Höchstgewicht
BariSling XXXL	47001010	200-570	570kg

Achtung! Empfehlenswert für Vierpunktbügel oder BariTurn.

Pflegeanleitung:

Lesen Sie das Produktetikett des Hebegurtes.



Kein Weichspülmittel verwenden.
Für längere Lebensdauer
Trocknen im Wäschetrockner
vermeiden.

Achtung!

Das Heben und Umsetzen von Personen ist stets mit einem Risiko verbunden. Vergewissern Sie sich, dass der Gesundheitszustand des Patienten das Anheben zulässt. Bei der geringsten Unsicherheit auf das Anheben verzichten. Als Hilfsperson ist man stets für die Sicherheit des Patienten verantwortlich.

Bei Fragen zu den Produkten und ihrer Anwendung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler. Für ein komplettes Händlerverzeichnis verweisen wir auf www.handicare.com. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die richtige Version des Handbuchs verfügen. Die neueste Version steht auf unserer Homepage www.handicare.com zum Download bereit.

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8-557 62 200

SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

