



ThoraxSling, polyester  
**Max: 300kg**

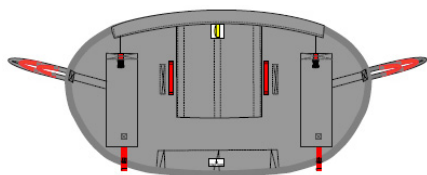

ThoraxSling, wipeable  
**Max: 205 kg**



ThoraxSling, with seat support, polyester  
**Max: 300kg**

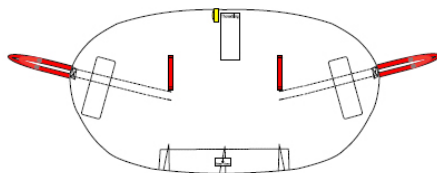

ThoraxSling, with seat support, disposable  
**Max: 200 kg**

ThoraxSling ist eine durch den Assistenten einfach anzulegende Aufstehweste für MiniLift, die zugleich dem Patienten ein Gefühl der Sicherheit vermittelt. Sie soll einerseits Stütze und Sicherheit beim Aufstehen bieten, andererseits den WC-Besuch erleichtern. ThoraxSling ist in zwei Modellen erhältlich, wobei eine Variante den Rücken stützt, die andere den Rücken und das Gesäß.

Das SystemRoMedic umfasst eine breite Auswahl an funktionellen und bequemen Hebegurten hoher Qualität, speziell entwickelt für verschiedene Arten von Hebeaktionen und für Patienten mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Die Hebegurte sind in mehreren Materialausführungen und Größen von XXS bis XXL erhältlich. Sämtliche Modelle sind sowohl sicher als auch einfach in der Anwendung und halten einer Belastung bis zu 300 kg stand. Die Wahl von Modell und Material ist abhängig von der jeweiligen Hebesituation und dem Bedarf des Patienten.



## Kontrolle der Funktion

### Sichtprüfung und mechanische Kontrolle

Unterziehen Sie den Hebegurt regelmäßigen Funktionskontrollen. Nach jeder Wäsche prüfen. Prüfen Sie Nähte und Material auf einwandfreien Zustand. Prüfen Sie, ob das Material abgenutzt oder verblichen ist. Belasten Sie Schnallen und Griffe und prüfen Sie, ob sie starker Belastung standhalten. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.



## Lesen Sie stets die Gebrauchsanweisung

Lesen Sie unbedingt die entsprechenden Anleitungen für Hilfsmittel zur Umsetzung von Patienten.

Verwahren Sie die Anleitung so, dass sie der Anwender des Produktes rasch zur Hand hat.

Verweilen Sie während des Umsetzungsmoments beim Patienten.

Das zusammengebaute Produkt darf jedoch auf keinen Fall höher belastet werden als das Einzelteil mit der geringsten Höchstbelastung. Prüfen Sie in jedem Fall vor der Anwendung die zulässige Höchstbelastung von Lifters und Zubehör. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.


## Beschreibung der Bandösen



ThoraxSling bietet drei verschiedene Anschlussmöglichkeiten der Bandösen in drei verschiedenen Ebenen.

Bei der Wahl der Bandösen ist der kürzest mögliche Abstand zum Bügel der Aufstehhilfe zu wählen.

## Beschreibung des Taillenbandes

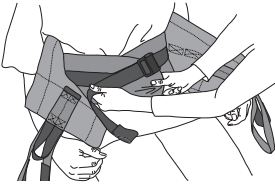


Das Band um die Taille soll für Unterstützung und Sicherheit beim Aufstehen sorgen.

Wird nach dem Anlegen mehr Unterstützung gewünscht, wird es mithilfe des losen Bandes nachgezogen.

## Anlegen des ThoraxSling




Den ThoraxSling hinter dem Rücken des Patienten mit dem Etikett nach außen anbringen. Die Weste so weit unten anbringen, dass kein Druck unter den Achselhöhlen entsteht; die Arme außerhalb lassen. Wenn der Patient die Möglichkeit hat, sich nach vorn zu neigen/nach vorne geneigt zu werden, erleichtert dies das Anlegen. Die Mitte der Hebeweste soll dabei entlang dem Rückgrat des Patienten zu liegen kommen.

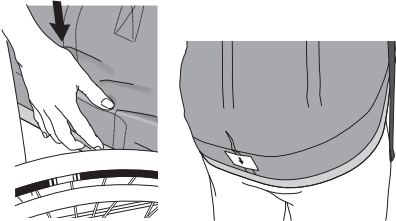

ThoraxSling mit Sitzstütze wird auf dieselbe Weise angelegt, wobei jedoch die Sitzstütze unter dem Gesäß des Patienten angebracht wird. Die verstärkte Sitzstütze unter/hinter dem Gesäß des Patienten anbringen.





Das Taillenband anlegen und auf die Größe des Patienten einstellen.

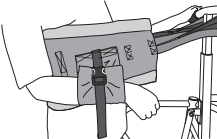

Für Patienten, bei denen ein Arm gestützt werden muss, z.B. bei Verschleiß des Schultergelenks, stehen an beiden Seiten der Hebeweste Stützhalterungen zur Verfügung.


## Anbringen des ThoraxSling am MiniLift

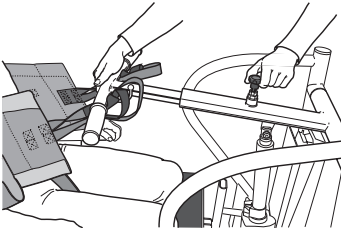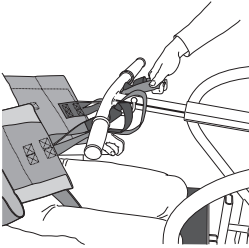


Die individuell eingestellte Aufstehhilfe (folgen Sie dem Handbuch beim Probeheben) vor dem Patienten positionieren und die Füße auf die Fußplatte stellen. Das Wadenband gegebenenfalls zuerst befestigen. Anschließend den Hebearm zum Patienten hin herausziehen, bevor die Hebeschlaufen angebracht werden.

Ermitteln Sie eine geeignete Schlaufe, wobei der Heber so nah wie möglich beim Patienten zu liegen kommen muss. Vor dem Einhängen des Hehebügels die Bänder strecken. Hebearm so einstellen, dass die Bänder gestreckt sind.

## Aufstehen mit MiniLift:

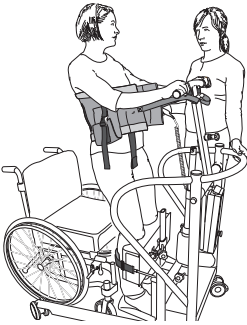

ThoraxSling

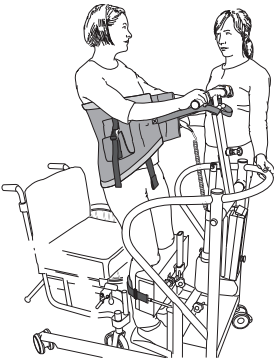

ThoraxSling with seat support

Bitte Sie den Patienten sich zurück gegen die Weste zu lehnen, bevor Sie mit dem Aufrichten beginnen.

Behalten Sie den Patienten im Auge.

Den Patienten in gewünschte Lage aufrichten. Beim geringsten Anzeichen von Unbehagen ist der Vorgang abzubrechen und der Patient ist wieder abzusenken.

## Material:

Polyester: Strapazierfähiges Material mit geringer Reibung. Kann bei hoher Temperatur gewaschen werden.

Disposable: Polypropylene, hydrophobic

Wipeable: Nylon, TPU. Möglich zu desinfizieren.

## Pflegeanleitung, polyester:

Lesen Sie das Produktetikett des Hebegurtes.

  
60-85°C  
140-185°F



Kein Weichspülmittel verwenden.

Für längere Lebensdauer Trocknen im Wäschetrockner vermeiden.

## Pflegeanleitung, disposable:

Lesen Sie das Produktetikett des Hebegurtes. Nicht waschen, sondern bei Verunreinigung oder Wechsel aus anderen Gründen wegwerfen.



## Pflegeanleitung, wipeable:

Lesen Sie das Produktetikett des Hebegurtes.

Zur Reinigung des Bezugs Äthanol (Alkohol) verwenden. Die Konzentration darf nicht höher sein als drei Teile Wasser auf einen Teil Alkohol. Ein entsprechendes Oberflächendesinfektionsmittel kann ebenfalls verwendet werden.



## Größen

Aus Sicherheits- und Hygienegründen empfiehlt sich die Verwendung von persönlich angepassten Hebegurten.

Größe	XS/Orange	S/Rot	M/Gelb	L/Grün	XL/Lila	XXL/Wieß
Empf. Anwendergewicht kg	20-50	30-60	50-80	70-110	100-150	140-200
Weste Breite cm	85	94	104	124	146	170

Bei Fragen zu den Produkten und ihrer Anwendung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler. Für ein komplettes Händlerverzeichnis verweisen wir auf [www.handicare.com](http://www.handicare.com). Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die richtige Version des Handbuchs verfügen. Die neueste Version steht auf unserer Homepage [www.handicare.com](http://www.handicare.com) zum Download bereit.

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200

SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

