

Max: 300kg



WalkingVest ist eine durch den Assistenten einfach anzulegende Weste für Gehtraining, die zugleich dem Anwender ein Gefühl der Sicherheit vermittelt. Sie stützt den Oberkörper und den Leistenbereich durch ein Band beim Aufstehen und Gehtraining. WalkingVest aktiviert den Anwender sicher und bequem.

Das SystemRoMedic umfasst eine breite Auswahl an funktionellen und bequemen Hebegurten hoher Qualität, speziell entwickelt für verschiedene Arten von Hebeaktionen und für Patienten mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Die Hebegurte sind in mehreren Materialausführungen und Größen von XXS bis XXL erhältlich. Sämtliche Modelle sind sowohl sicher als auch einfach in der Anwendung und halten einer Belastung bis zu 300 kg stand. Die Wahl von Modell und Material ist abhängig von der jeweiligen Hebesituation und dem Bedarf des Patienten.



## Kontrolle der Funktion

### Sichtprüfung und mechanische Kontrolle

Unterziehen Sie den Hebegurt regelmäßigen Funktionskontrollen. Nach jeder Wäsche prüfen. Prüfen Sie Nähte und Material auf einwandfreien Zustand. Prüfen Sie, ob das Material abgenutzt oder verblichen ist. Belasten Sie Schnallen und Griffe und prüfen Sie, ob sie starker Belastung standhalten. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.



## Lesen Sie stets die Gebrauchsanweisung


Lesen Sie unbedingt die entsprechenden Anleitungen für Hilfsmittel zur Umsetzung von Patienten.

Verwahren Sie die Anleitung so, dass sie der Anwender des Produktes rasch zur Hand hat.

Verweilen Sie während des Umsetzungsmoments beim Patienten.

Vermeiden Sie die Gefahr des Abgleitens oder Unbehagens durch sorgfältige Prüfung des Hebegurtes. Zunächst die Rückenschlaufen des Hebegurtes einhängen, danach die Schlaufen der Beinstütze. Nur geprüfte Hebebügel verwenden. Das zusammengebaute Produkt darf jedoch auf keinen Fall höher belastet werden als das Einzelteil mit der geringsten Höchstbelastung. Prüfen Sie in jedem Fall vor der Anwendung die zulässige Höchstbelastung von Lifter und Zubehör. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

## Beschreibung der WalkingVest

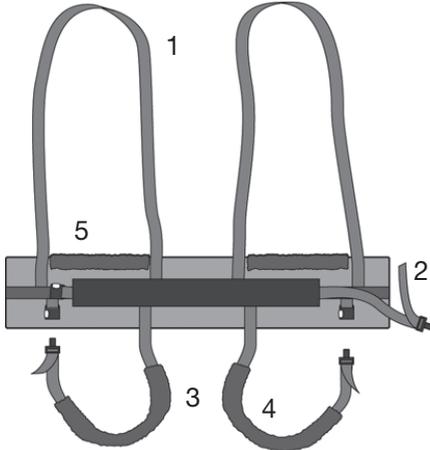


Die WalkingVest besteht aus:


1. Hebeschlingen (grau)
2. Hüftgurt (rot)
3. Leistenband (schwarz)
4. Polsterung Leistenband
5. Polsterung Hebeweste

Hebeschlingen am Hehebügel anbringen. Hüftgurt und Leistenband sind für einfaches Anlegen mit Schnellspanner versehen. Die Leistenbänder von hinten her um die Oberschenkel legen. Sie sind gepolstert, um Druckstellen und Scheuern im Leistenbereich zu verhindern. Die Hebeweste ist zudem in Höhe der Arme gepolstert, um Druckstellen und Scheuern zu verhindern.

## Anlegen der WalkingVest im Sitzen

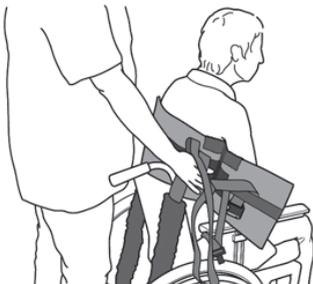

1. Die WalkingVest mit dem Spanner nach vorn um den Oberkörper des Anwenders legen. Die Unterkante der Weste muss oberhalb der Hüfte zu liegen kommen. Die Arme bleiben außerhalb. Die Mitte der WalkingVest soll dabei entlang dem Rückgrat des Anwenders zu liegen kommen.

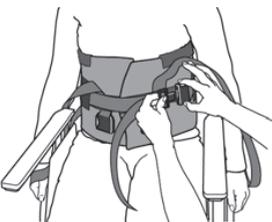

2. Das Hüftband anlegen und auf die Größe des Anwenders einstellen.

## Anlegen der Leistenstütze im Sitzen



1. Nach Anlegen der Weste um den Oberkörper des Anwenders die Leistenbänder von außen her unter die Oberschenkel einführen.



2. Leistenbänder an der Vorderseite spannen.



3. Leistenbänder an die Größe des Anwenders anpassen.

## Anheben auf Stehposition



1. Bereiten Sie den Anwender auf das Aufstehen vor. Verweilen Sie während des Anhebens stets beim Anwender und achten Sie auf dessen Signale. Bei Unbehagen den Vorgang sofort abbrechen.



2. Wenn der Anwender steht, kann eine Gehhilfe verwendet werden.

## Material:

Polyester: Strapazierfähiges Material mit geringer Reibung. Kann bei hoher Temperatur gewaschen werden.

## Pflegeanleitung:

Lesen Sie das Produktetikett des Hebegurtes.



Kein Weichspülmittel verwenden.  
Für längere Lebensdauer  
Trocknen im Wäschetrockner  
vermeiden.

## Größen

Größe	XXS/Grau	XS/Orange	S/Rot	M/Gelb	L/Grün	XL/Lila	XXL/Weiss
Maße der Weste in cm	60	70	82	96	110	122	142
Empf. Anwendergewicht kg	15-40	25-50	40-60	55-80	75-100	90-110	100-130

Bei Fragen zu den Produkten und ihrer Anwendung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler. Für ein komplettes Händlerverzeichnis verweisen wir auf [www.handicare.com](http://www.handicare.com). Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die richtige Version des Handbuchs verfügen. Die neueste Version steht auf unserer Homepage [www.handicare.com](http://www.handicare.com) zum Download bereit.

### Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-557 62 200

Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)



handicare