


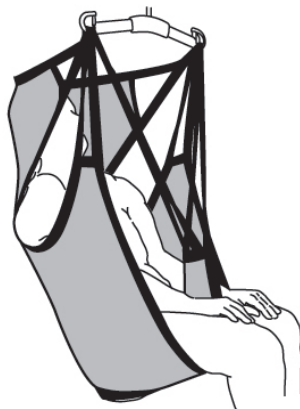

Ikke-delte benstøtter

Maks: 300kg



Delte benstøtter

FlexibleSling er en løftesejl, som er fleksibelt mod kroppen og giver en følelse af trykthed. Det findes i tre modeller; med delte benstøtter, udelte benstøtter og en model med udelte benstøtter samt hygiejneåbning. FlexibleSling er udformet til at tilgodese store behov for støtte samt at løftesejlet former sig efter kroppen. Det kan efterlades i kørestol, formstøbt sæde eller lignende.

I SystemRoMedic findes et bredt udvalg af funktionelle og bekvemme løftesejle af høj kvalitet, tilpassede forskellige typer løft og brugere med forskellige behov. Løftesejlene findes i flere forskellige materialer og i størrelser fra XXS til XXL. Alle modeller er både sikre og meget lette at anvende, og de kan løfte brugere op til 300 kg. Valg af model og materiale bestemmes af løftesituationen og brugerens behov.



Funktionskontrol

Visuel og mekanisk inspektion

Foretag regelmæssige funktionskontroller af løftesejlet. Kontroller altid efter vask. Kontroller, at sømme og materiale er helt og ikke udviser tegn på beskadigelse. Kontroller, om materialet er udsat for slitage eller er bleget. Belast og kontroller, at spænder og håndtag kan holde til en kraftig belastning. Ved tegn på slitage skal produktet kasseres.



Læs altid manualen

Læs altid manualerne for alle hjælpemidler, som anvendes ved en forflytning.

Opbevar manualen tilgængeligt for brugere af produktet.

Efterlad ikke brugeren alene under forflytningsmomentet.


Undgå risikoen for, at brugeren glider ud eller føler sig ubehageligt tilpas ved at være omhyggelig med afprøvningen af løftesejlet. Hægt først løftesejlets rygstropper på løfteåget; hægt derefter benstøttens løkker på. Anvend afprøvet løfteåge.

Bemærk, at der er en risiko for, at brugeren kan vippe fremad, når man har et løftesejl med ikke-delte benstøtter.

Kontroller altid den tilladte max. belastning på løfte og løftetilbehør inden brug, og kontakt din forhandler ved spørgsmål.

FlexibleSling, delte benstøtter

Placering af løftesejl, når brugeren sidder i kørestol/stol eller seng

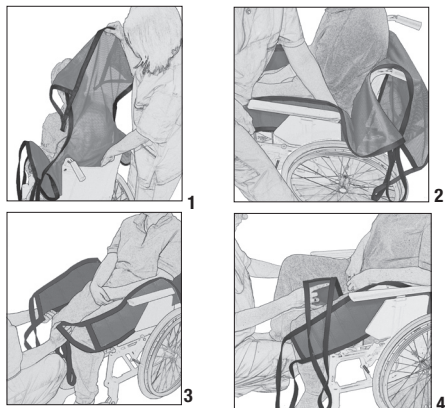

1. Hold løftesejlet med den ene hånd, og placer den anden hånd ved den nederste kant på sejlet. Det er lettere, hvis brugeren er i stand til at læne sig frem/kan lænes frem. Før løftesejlet ned bagved brugerens ryg ved at glide det langs med ryglænet på stolen/kørestolen eller sengen, ned til halebenet på brugeren er optimalt. Løftesejlets midte skal følge brugerens ryggrad.

2. Vær omhyggelig med at føre løftesejlet ned ved brugerens bagdel; gør dette ved at føre sejlet ned i mellemrummet ved de bagerste hjørner på kørestolens sæde.


3. Træk benstøtterne frem ved lårenes yderside. Sid gerne foran og træk i den nedre kant på benstøtten, så løftesejlet glider på plads omkring brugerens bagdel. Hold lidt igen på brugerens knæ for at modvirke, at brugeren glider fremad i stolen.

4. Når du har kontrolleret, at benstøtterne er lige lange på begge sider, kan du placere dem under brugerens lår.

Sædvanligvis krydses benstøtterne, inden de sættes fast på krogene på løfteåget.

Begynd at hæve løfteåget og stop for at kontrollere, at alt er i orden, inden du hæver, så brugeren løftes fra underlaget.


Bortfjernelse af løftesejlet, når brugeren sidder

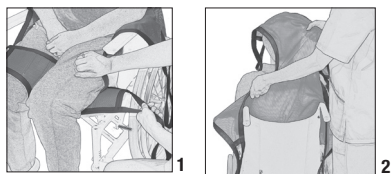

1. Fold benstøtten, og lad den glide ind under sig selv, når du trækker den ud på ydersiden af låret.

2. Træk derefter løftesejlet op bagved brugerens ryg.

Placering af løftesejl, når brugeren ligger på seng/briks eller gulv

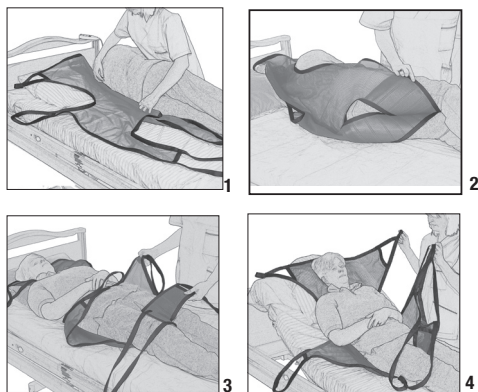

1. Vend brugeren mod dig. Placer løftesejlet, så mærkaten vender ned mod underlaget, og midterlinjen følger ryggraden. Den øvre kant af løftesejlet skal være så høj, at sejlet støtter hovedet, i skulderhøjde og den nedre kant skal være på højde med halebenet. Placer løftesejlet så langt inde under brugeren som muligt. Skub stroppen ind under rygdelen, så du kan nå den, når du har vendt brugeren tilbage på løftesejlet.

2. For at mindske antallet af momenter kan du folde rygdelen op mod brugerens ryg og placere benstøtterne mellem brugerens knæ, når han/hun er vendt mod dig for derefter at trække dem frem, når brugeren ligger på løftesejlet.


3. Vend brugeren tilbage på løftesejlet og træk hovedstøtten, rygdelen og benstøtten frem.

4. Sædvanligvis krydses benstøtterne, inden de sættes fast på krogene på løfteåget.

Begynd at hæve løfteåget og stop for at kontrollere, at alt er i orden, inden du hæver, så brugeren løftes fra underlaget.

FlexibleSling, ikke-delte benstøtter

Placering af løftesejl, når brugeren ligger på seng/briks eller gulv

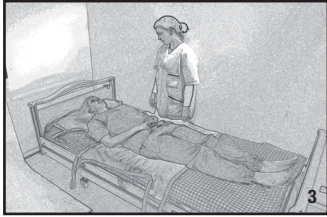

1. Vend brugeren mod dig. Placer løftesejlet, så mærkaten vender ned mod underlaget, og midterlinjen følger ryggraden. Den øvre kant af løftesejlet skal være så høj, at sejlet støtter hovedet, i skulderhøjde og den nedre kant skal være på højde med halebenet. Placer løftesejlet så langt inde under brugeren som muligt. Skub stroppen ind under rygdelen, så du kan nå den, når du har vendt brugeren tilbage på løftesejlet.


2. Vip rygdelen op mod brugers ryg for at kontrollere, at løftesejlet er placeret korrekt, og at midterlinjen følger ryggraden.

3. Vend brugeren tilbage på løftesejlet, og træk hovedstøtten, rygdelen og benstøtten frem.

Sæt løftestropperne fast på løfteåget, begynd med de øverste og til sidst dem fra bendelene. Begynd at hæve løfteåget, og stop for at kontrollere, at alt er i orden, inden du hæver, så brugeren løftes fra underlaget.

FlexibleSling, delte og ikke-delte benstøtter

Bortfjernelse af løftesejlet, når brugeren ligger ned

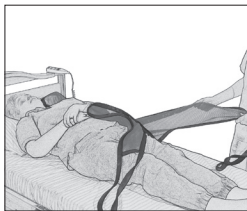

1. Læg benstøtterne ned mellem brugers knæ.

2. Vend brugeren mod dig, og fold sejlet ind under brugeren, så stoffet glider mod sig selv, når du trækker det ud, efter du har vendt brugeren tilbage.

Alternative placeringer



Løftesejlets høje ryg giver god støtte til hovedet, samtidig med at der er mulighed for at placere armene indenfor eller udenfor løftesejlet.

For modellen med delte benstøtter krydses benstøtterne sædvanligvis, inden de sættes fast på krogene på løfteåget.

Materiale:

Polyesternet: Luftigt materiale, som efter behov kan efterlades under brugeren. Tåler høj vasketemperatur.

Vedligeholdelse:

Læs på løftesejlets mærkat.



Anvend ikke skyllemiddel.
Undgå tørretumbling for øget levetid.

Information om størrelser

Løftesejl kan ofte anvendes til både 2- og 4-punktsophæng. Det er vigtigt at være omhyggelig og sikre, at løfteågets bredde passer til løftesejlets størrelse og brugerens forudsætninger.

Anvend individuelle løftesejl for sikkerhed og hygiejne.

FlexibleSling, delte benstøtter

Størrelse	XXS/grå	XS/Orange	S/Rød	M/Gul	L/Grøn	XL/Lilla
Anb. lbs	22-66	44-77	55-121	110-165	154-243	220-287
Brugervægt kg	10-30	20-35	25-55	50-75	70-110	100-130
Løftesejlets inch	29,5	32	35,5	40	40	41
Højde cm	75	81	90	102	102	104

FlexibleSling, ikke-delte benstøtter

Størrelse	XS/Orange	S/Rød	M/Gul	L/Grøn	XL/Lilla
Anb. lbs	44-88	66-154	132-198,5	176-286,5	242,5-397
Brugervægt kg	20-40	30-70	60-90	80-130	110-180
Løftesejlets inch	31,5	33,5	36,5	38	38,5
Højde cm	80	85	93	96	98

Ved spørgsmål om produkterne og deres anvendelse, kontakt din lokale forhandler. Se www.handicare.com for en komplet forhandlerliste. Sørg for, at du altid har den korrekte version af manualen. Den seneste version kan downloades fra vores hjemmeside www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200

Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

