



Max: 20 kg/44 lbs

Sengebordet kan placeres ved siden af sengen eller drejes, så benene går ind under sengen og bordpladen over sengen. Sengebordet skal anvendes på plant underlag, ikke på tæppe. Bordpladen kan vippes i forbindelse med skrivning og læsning.



Funktionskontrol

Visuel inspektion

Foretag regelmæssige funktionskontroller af sengebordet. Kontroller, at materiale er helt og ikke udviser tegn på beskadigelse.

Før brug:

Kontroller, at sengebordet er monteret korrekt.

Kontroller, at håndtagene er strammet godt til.



Læs altid manualen

Læs altid manualerne for alle hjælpemidler, som anvendes ved en forflytning.

Opbevar manualen tilgængeligt for brugere af produktet.

Montering

Mellemrøret monteres på basen (pos. 5 + 6) med det medfølgende stjernegreb og skiven. Kontroller, at de skrues godt fast.

Den vinklede del af rammen indstilles i ønsket højde, og stjernegrebet strammes til (pos. 4).

Bordpladens underside er forsynet med halvcirkelformede beslag. Vinklingen af bordpladen monteres ved, at bolten (pos. 1) føres gennem de halvcirkelformede beslag.


Når bordpladen er på plads, monteres bolt, skiver og stjernegreb (pos. 1 + 8 + 2 + 3) og strammes til i ønsket vinkel.

Indstillinger

Sengebordets højde reguleres ved, at stjernegrebet (pos. 4) og mellemrøret justeres op eller ned. Stram stjernegrebet ved ønsket højde.

Bordpladen kan vinkles, når stjernegrebet (pos. 3) er løsnet. Stram stjernegrebet til igen ved ønsket vinkling.

Hjulene kan låses ved at bremserne trædes ned (pos. 7).

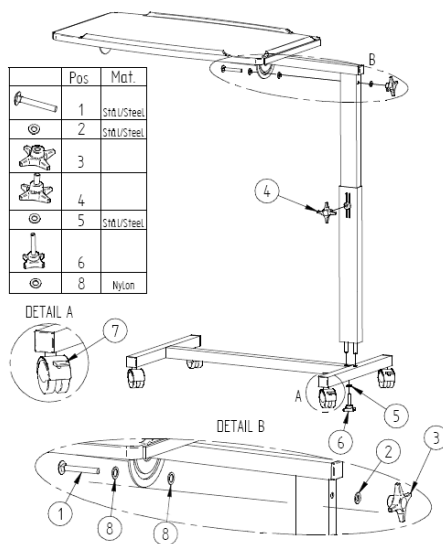


Vigtig information

- Max. belastning er 20 kg.
- Kontroller, at håndtagene er strammet godt til.
- For optimal sikkerhed anbefaler vi, at hjulene låses, når bordet skal stå stille.
- Sengebordet må ikke anvendes til at støtte sig til i stående stilling.

Tilbehør

Sideplade til sengebord

Artikelnummer: 300500310

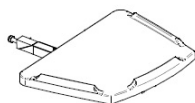

Vedligehold

Sengebordet kan rengøres med husholdningsrengøringsmiddel uden slibemiddel eller ætsende egenskaber. Opløsningsmidler og klor må ikke anvendes. Rengør hjulene for snavs og hår for optimal funktion.

Genvinding

Plastikdele sorteres som brændbart og ståldele som metal.



Ready for life er en serie af hjælpemidler, som er designede til at give brugeren bedre forudsætninger for at leve et så godt og aktivt liv som muligt hver dag. Produkterne er specielt producerede for at passe til de forhold, som findes indenfor hjemmeplejen og andre hjemmelignende miljøer. Ready for life tilbyder den rette kvalitet, den rette funktion og den rette præstation til den rette pris. Forflytningsprodukterne kan anvendes enten uafhængigt eller som supplement til produkter i SystemRoMedic.

Ved spørgsmål om produkterne og deres anvendelse, kontakt din lokale forhandler. Se www.romedic.com for en komplet forhandlerliste. Sørg for, at du altid har den korrekte version af manualen. Den seneste version kan downloades fra vores hjemmeside www.romedic.com

RoMedic AB

Veddestav. 15, Box 640 Tel: +46 (0)8-594 773 33

SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-594 773 44

SWEDEN

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic®
A company in the Handicare Group