

Maks: 300kg

StandUpSling er en oprejsningsvest, som er let for hjælperen at sætte på, samtidig med at den giver brugeren en følelse af tryghed. Vesten er udformet til at give støtte bag ryggen ved løft til stående position med ståløfter. StandUpSling er udformet til at tilgodese behov for støtte og tryghed ved løft til stående stilling samt for at lette toiletbesøg.

I SystemRoMedic findes et bredt udvalg af funktionelle og bekvemme løftesejle af høj kvalitet, tilpassede forskellige typer løft og brugere med forskellige behov. Løftesejlene findes i flere forskellige materialer og i størrelser fra XXS til XXL. Alle modeller er både sikre og meget lette at anvende, og de kan løfte brugere op til 300 kg. Valg af model og materiale bestemmes af løftesituationen og brugerens behov.



Funktionskontrol

Visuel og mekanisk inspektion

Foretag regelmæssige funktionskontroller af løftesejlet. Kontroller altid efter vask. Kontroller, at sømme og materiale er helt og ikke udviser tegn på beskadigelse. Kontroller, om materialet er udsat for slitage eller er bleget. Belast og kontroller, at spænder og håndtag kan holde til en kraftig belastning. Ved tegn på slitage skal produktet kasseres.



Læs altid manualen

Læs altid manualerne for alle hjælpemidler, som anvendes ved en forflytning.

Opbevar manualen tilgængeligt for brugere af produktet.


Efterlad ikke brugeren alene under forflytningsmomentet.

Undgå risikoen for, at brugeren glider ud eller føler sig ubehageligt tilpas ved at være omhyggelig med afprøvningen af løftesejlet. Hægt først løftesejlets rygstropper på løfteåget; hægt derefter benstøttens løkker på. Anvend afprøvet løfteåg.


Det er altid den lavest tilladte max. belastning på det respektive produkt i den sammensatte løfteenhed, der styrer.

Kontroller altid den tilladte max. belastning på løfte og løftetilbehør inden brug, og kontakt din forhandler ved spørgsmål.

Beskrivelse af stropperne

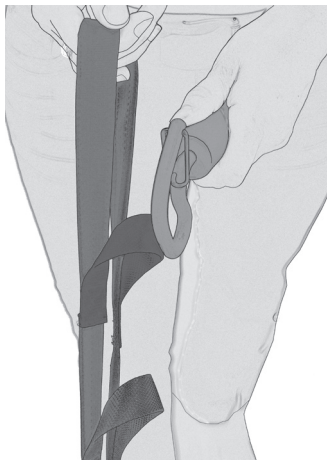


StandUpSling er udformet med tre mulighed for kobling.

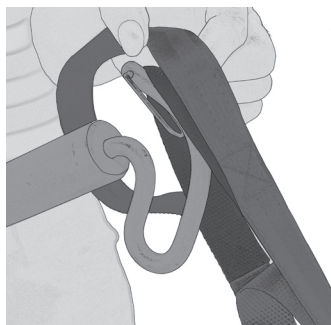

Valg af strop afgøres ved at vælge den korteste, som kan nå frem til åget på løfteren.


Beskrivelse af båndet om taljen

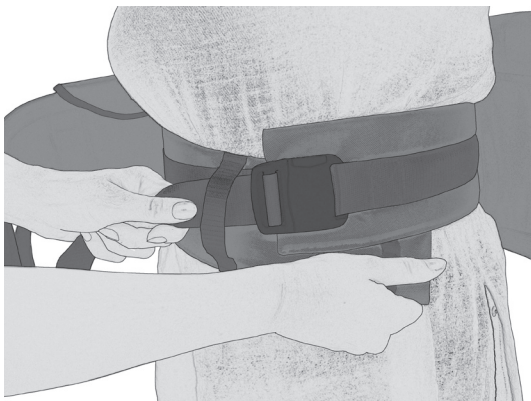

Båndet omkring taljen er der for at give støtte og tryk, når brugeren skal rejse sig op.

Det kobles på, og ved behov for mere støtte trækkes det til med det løse bånd.


Placering af StandUpSling

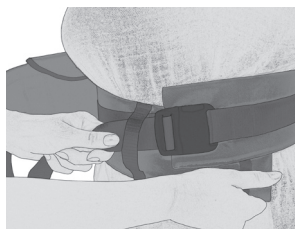

2

1. Placer StandUpSling bag ryggen på brugeren med mærkaten udad. Vestens nedre kant skal placeres over hoftebenene, armene placeres udenfor. Det er lettere, hvis brugeren er i stand til at læne sig frem/ kan lænes frem. Løftevestens midte skal følge brugerens ryggrad.

2. Taljebåndet kobles på og tilpasses brugerens størrelse.

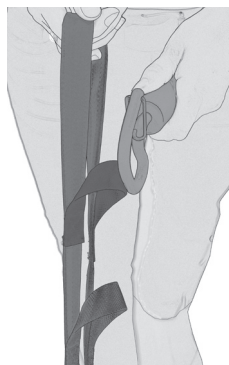

3




4

3. Placer den individuelt indstillede ståløfter (følg manualen for løfteren ved indstilling) foran brugeren og placer fødderne på fodpladen.

4. Afprøv en passende strop ved at være omhyggelig med, at løfteren er placeret så tæt på brugeren som muligt. Stræk derefter stropperne, inden de sættes på løfteåget.

Bed brugeren om at læne sig bagud mod vesten, inden løftet påbegyndes. Vær opmærksom på brugerens signaler; hæv til ønsket position, hvis alt fungerer, som det skal. Afbryd løftet og sænk nedad ved det mindste tegn på ubehag.

Bortfjernelse af StandUpSling

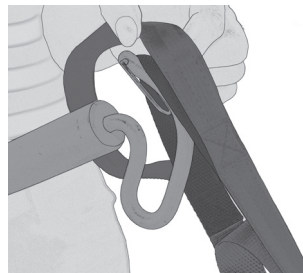

1



2

1. Sænk brugeren ned på den ønskede plads. Stropperne kobles af løfteåget og lægbåndet.

2. Fjern løfteren, taljebåndet kobles løs. Vesten trækkes op bagom ryggen på brugeren.

Tilbehør:

Ved behov for en blødere overflade imod brugeren kan et ekstra lag i et blødt materiale fastgøres på vesten.



Materiale:

Polyester: Slidstærkt materiale med lav friktion. Tåler høje vasketemperaturer.

Vedligeholdelse:

Læs på løftesejlets mærkat.



Anvend ikke skyllemiddel.

Undgå tørretumbling for øget levetid.

Størrelse

S/Rød

M/Gul

L/Grøn

XL/Lila

XXL/Hvid

Anb.

Brugervægt kg

40-65

55-80

75-110

100-160

150-220

Ved spørgsmål om produkterne og deres anvendelse, kontakt din lokale forhandler. Se www.handicare.com for en komplet forhandlerliste. Sørg for, at du altid har den korrekte version af manualen. Den seneste version kan downloades fra vores hjemmeside www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-557 62 200

Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se



handicare