



ThoraxSling, polyester
Maksimikuormitus: 300 kg/661 lbs

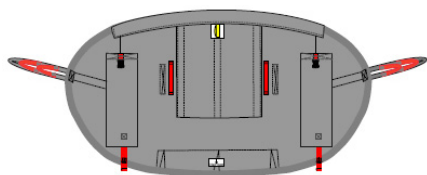

ThoraxSling, wipeable
Maksimikuormitus: 205 kg



ThoraxSling, with seat support, polyester
Maksimikuormitus: 300 kg/661 lbs

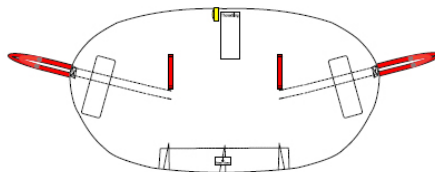

ThoraxSling, with seat support, disposable
Maksimikuormitus: 200 kg/440 lbs

ThoraxSling on MiniLift-nostimen kanssa käytettävä nostoliivi, joka on helppo asettaa paikalleen ja joka saa nostettavan tuntemaan olonsa turvalliseksi noston aikana. Se antaa potilaan tarvitsemää tukea ja turvallisuutta nostotilanteissa ja helpottaa wc-käyntejä.

ThoraxSlingiä on kahta mallia: toinen malleista tukee selästä, ja toinen takapuolen alta. Istuintuella varustettua

SystemRoMedic sisältää laajan valikoiman käytännöllisiä, helppokäyttöisiä ja korkealaatuisia nostovaljaita, jotka voidaan sovittaa erilaisiin nostoihin ja potilaiden tarpeisiin. Valjaita on saatavana useista eri materiaaleista valmistettuina ja kokoina XXS–XXL. Kaikki mallit ovat turvallisia ja erittäin helppoja käyttää, ja niillä voidaan nostaa jopa 300 kiloa painavia potilaita. Malli ja materiaali valitaan potilaan tarpeiden ja siirtotilanteen mukaan.



Toiminnan tarkastus

Silmämääräinen ja mekaaninen tarkastus

Tarkasta valjaiden kunto ja toimivuus säännöllisin väliajoin. Tarkasta tuote aina pesun jälkeen. Varmista, että saumat ja materiaali ovat ehjät. Varmista, ettei kangas ole kulunut tai haalistunut. Testaa tuote koekuormittamalla varmistaaksesi, että soljet, vetolenkit jne. kestävät raskaan kuormituksen. Mikäli tuotteessa havaitaan kulumisvaurioita, se on hävitettävä.



Lue aina käyttöohje

Lue aina kaikkien siirrossa käytettävien apuvälineiden käyttöohjeet.

Säilytä käyttöohje tuotteen käyttäjien saatavilla.

Älä jätä potilasta yksin siirron aikana.

Tehdäksesi nostosta mahdollisimman miellyttävän ja estääksesi nostettavaa liukumasta irti nostovaljaista, sovita nostovaljaat ensin huolellisesti. Pujota ensin nostovaljaiden selkäosan lenkit nostokaareen ja sen jälkeen reisitukien vetolenkit. Käytä testattua nostokaarta.

Se yksikköön sisältyvä tuote, jolla on alin sallittu maksimikuormitus, määrää aina koko yksikön sallitun maksimikuormituksen. Tarkasta aina ennen käyttöä nostimen ja nostovaroiteiden sallitut maksimikuormitukset. Kysy tarvittaessa neuvoa jälleenmyyjältäsi.


Hihnalenkien kuvaus



ThoraxSling voidaan kiinnittää kolmella eri tavalla, sillä hihnalenkit sijaitsevat kolmella eri tasolla.

Valitse lyhin nostimen nostokaareen ulottuva hihnalenkki.


Vyötäröhihnan kuvaus

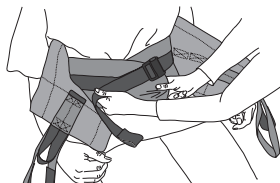


Vyötäröhihna antaa tukea ja turvallisuutta noston aikana.

Kun hihna on kiinnitetty paikalleen ja tarvitaan lisätukea, se voidaan kiristää irtonaisesta hihnasta vetämällä.

ThoraxSlingin kiinnittäminen

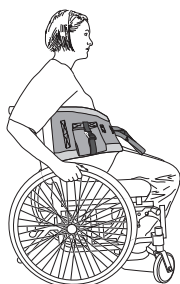


Aseta ThoraxSling potilaan selän taakse tuote-etiketti ylöspäin. Liivi sijoitetaan niin alas, ettei se paina kainaloita. Kädet asetetaan ulkopuolelle. Pyydä tai auta nostettavaa nojaamaan hieman eteenpäin, jolloin asettaminen on helpompaa. Liivin keskilinjan on oltava potilaan selkärangan kohdalla.

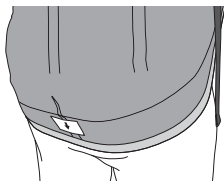

Istuintuella varustettu ThoraxSling kiinnitetään samalla tavalla, mutta istuintuki asetetaan potilaan takapuolen alle. Tartu kiinni vahvistetusta istuintuesta ja aseta se potilaan takapuolen alle.





Vyötäröhihna kiinnitetään ja sovitetaan potilaan koon mukaan.

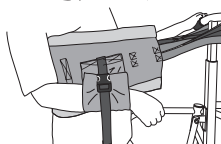

Käsitukea tarvitseville, esimerkiksi olkanivelen kulumasta kärsiville potilaille, liivin molemmilla puolilla on käsille tukipidikkeet.


ThoraxSlingin kiinnitys MiniLift-nostimeen

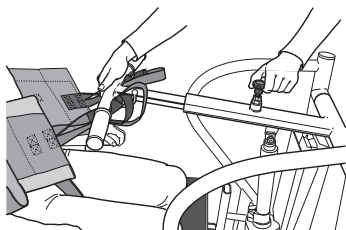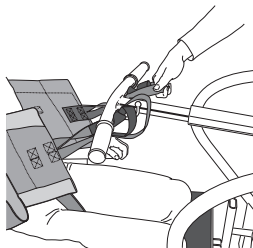

Aseta potilaan mukaan säädetty nostin potilaan eteen (ks. sovitusohjeet nostimen käyttöohjeesta) ja aseta potilaan jalat jalkalevyille. Jos pohjehihnaa on käytettävä, se kiinnitetään ensin. Vedä nostovarsi potilaan lähelle helpottaaksesi hihnalenkien kiinnittämistä.

Aseta nostin varovasti mahdollisimman lähelle potilasta nähdäksesi, mikä hihnalenkki sopii parhaiten. Vedä sen jälkeen hihnat suoriksi, ennen kuin kiinnität ne nostokaareen.

ThoraxSlingin kiinnitys MiniLift-nostimeen

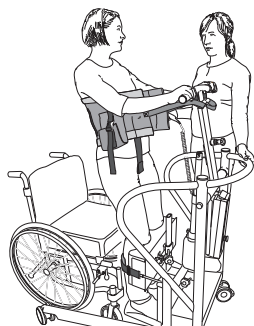

ThoraxSling



ThoraxSling with seat support

Pyydä potilasta nojaamaan taaksepäin liiviä vasten, ennen kuin aloitat noston. Tarkkaile potilasta huolellisesti.

Kun kaikki nostovälineet on säädetty ja potilas on mukavassa asennossa, nosta potilas halutulle korkeudelle. Keskeytä nosto, jos se tuntuu potilaasta vähänkään epämiellyttävältä.

Materiaalit:

Polyesteri: Vetoluja materiaali, jossa on pieni kitka.

Kertakäyttöinen: Polypropeeni, vettä hylkivä.

Puhdistettava: Nylon+TPU, voidaan desinfioida.

Tuotteen hoito, polyesteri:

Lue tuotteen etiketistä.



Älä käytä huuhteluinetta. Varmistaaksesi, että tuote kestää mahdollisimman pitkään, kuivaa se ripustamalla tai matalassa lämpötilassa rumpukuivaamalla.

Hoito-ohje, non-woven:

Lue tuotteen etiketistä.

Ei saa pestä. Hävitä tuote, jos se on likaantunut tai se on vaihdettava muusta syystä.



Hoito-ohje, puhdistettava:

Lue tuotteen etiketistä.

Puhdista päälinen etanolilla (alkoholilla) tai muulla vastaavalla pintojen desinfiointiaineella. Sekoitussuhde saa olla korkeintaan yksi osa etanolia kolmeen osaan vettä.



Kokovalikoima

Käytä potilaskohtaisia nostovaljaita varmistaaksesi noston turvallisuuden ja nostettavan hygienian.

Koko	XS/Orange	S/Punainen	M/Keltainen	L/Vihreä	XL/Liila	XXL/alkoinen
Suos. potilaan koko kg	20-50kg	30-60kg	50-80kg	70-110kg	100-150kg	140-200kg
Liivin ympärysmitta cm	85cm	94cm	104cm	124cm	146cm	170cm

Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi, jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta ja sen käytöstä. Katso jälleenmyyjäluettelo osoitteesta www.handicare.com. Varmista aina, että sinulla on käyttöohjeesta oikea versio. Uusimmat käyttöohjeet voi ladata web-sivustoltamme www.handicare.com.

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200

SE-175 27 Järfälla

Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

