

Max: 300kg



StandUpSling est une veste de relevage qui est facile à mettre en place pour le personnel, en même temps qu'il donne un sentiment de sécurité à la personne qui l'utilise. Elle est conçue pour fournir un appui derrière le dos quand la personne est relevée à l'aide d'un auxiliaire de relevage. StandUpSling est conçu pour fournir appui et sécurité quand on relève une personne et pour lui faciliter l'accès aux WC.

SystemRoMedic comporte un vaste choix de harnais de levage fonctionnels, confortables et de haute qualité, adaptés aux différents types d'auxiliaires de levage et aux différents besoins des utilisateurs. Les harnais de levage sont disponibles dans plusieurs matières différentes et dans les tailles de XXS à XXL. Tous les modèles, à la fois sûrs et très faciles à utiliser, peuvent supporter une charge maximale de 300 kg. Le choix du modèle et de la matière dépend de la situation de levage et des besoins du patient.



Contrôle de fonctionnement

Inspection visuelle et mécanique

Effectuer des inspections régulières du harnais de levage. Toujours contrôler après un lavage. Vérifier que les coutures et les matériaux sont intacts et non endommagés. Vérifier si le matériau est usé ou pâli. Exercer une charge sur les boucles et les poignées et vérifier qu'elles supportent une contrainte élevée. S'il présente des signes d'usure, le produit doit être mis au rebut.



Toujours lire le manuel

Toujours lire les manuels de tous les auxiliaires utilisés lors d'un transfert de patient.

Conserver le manuel pour qu'il soit accessible aux utilisateurs du produit.


Ne pas laisser le patient sans surveillance pendant la phase de transfert.

Pour le bien-être de la personne et pour lui éviter de glisser du harnais, toujours vérifier minutieusement l'auxiliaire de levage. Accrocher d'abord les œillets du dos du harnais de levage, puis accrocher les œillets des appuis pour les jambes.

Utiliser un étrier de levage éprouvé.

C'est toujours la charge maximale autorisée la plus faible de chaque produit respectif qui prévaut pour l'appareil de levage complet. Toujours vérifier la charge maximale autorisée de l'auxiliaire de levage et de ses accessoires avant d'utiliser l'appareil et prendre contact avec votre revendeur en cas de doute.

Description des boucles de sangles

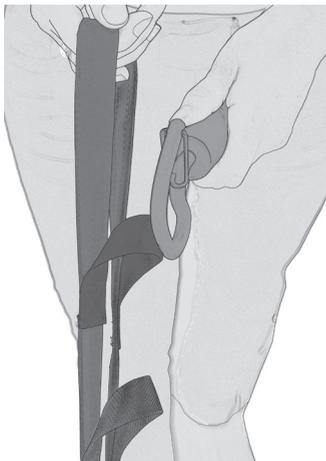


StandUpSling est conçu pour offrir trois possibilités d'accrochage.



Le choix de boucle de sangle se fait en choisissant la plus courte qui atteigne l'étrier de l'auxiliaire de relevage.


Description de la sangle autour de la taille

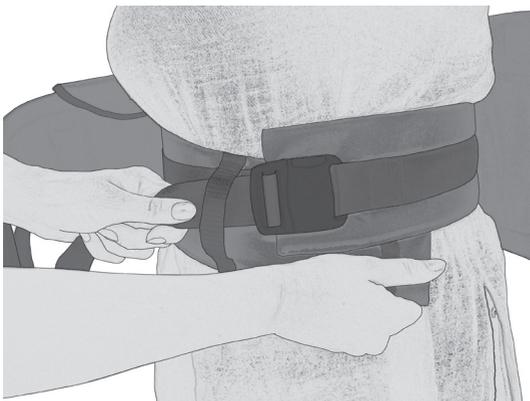

La sangle autour de la taille est prévue pour fournir soutien et sécurité pendant le relevage.

Après l'avoir accrochée, on peut obtenir plus de soutien en serrant avec la sangle détendue.


Mise en place de StandUpSling

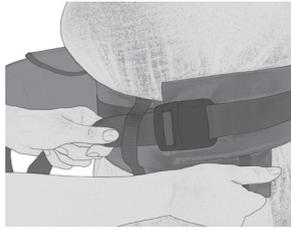

2

1. Placer StandUpSling derrière le dos du patient, avec l'étiquette de marquage tournée vers l'extérieur. Le bord inférieur de la veste doit être placé au-dessus des hanches, et les bras doivent rester à l'extérieur. Pour faciliter la manipulation et si cela est possible, l'utilisateur peut se pencher légèrement vers l'avant. Le milieu de la veste de relevage doit suivre la colonne vertébrale du patient.

2. Accrocher la sangle autour de la taille et l'adapter à la taille du patient.

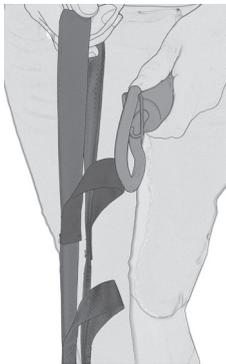

3




4

3. Placer l'auxiliaire de levage une fois réglé (consulter le manuel pour faire un essai) devant le patient et poser les pieds sur la plaque d'appui des pieds.

4. Essayer de trouver la boucle qui convient en veillant à ce que l'auxiliaire de levage soit placé aussi près du patient que possible. Tendre ensuite les sangles avant d'accrocher l'étrier de levage.

Demander au patient de se pencher en arrière vers la veste avant de commencer à le relever. Rester attentif aux réactions du patient, puis relever au niveau voulu si tout fonctionne normalement. Au moindre signe de désagrément, interrompre le mouvement et rabaisser le patient.

Pour enlever StandUpSling

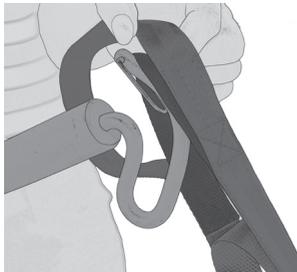

1



2

1. Abaisser le patient à l'endroit voulu. Décrocher les boucles de sangle de l'étrier de levage et décrocher la sangle d'appui des mollets.

2. Retirer l'auxiliaire de levage, décrocher la sangle autour de la taille et faire remonter la veste derrière le dos du patient.

Accessoires :

Si le patient a besoin d'une surface de contact plus souple il est possible de fixer sur la veste une couche supplémentaire dans un matériau souple.



Matériaux :

Polyester : Matériau résistant et présentant une friction faible. Supporte des températures de lavage élevées.

Conseils d'entretien :

Lire l'étiquette-conseil du harnais de lavage.



Ne pas utiliser de produit de rinçage adoucissant.
Éviter le sèche-linge pour augmenter la longévité du produit.

Information sur les tailles

Taille	S/Rouge	M/Jaune	L/Vert	XL/Lilas	XXL/Blanc
Poids brut rec. de l'utilisateur Kg	40-65	55-80	75-110	100-160	150-220

Si vous avez des questions sur le produit et son utilisation, veuillez contacter votre distributeur local. Prière de consulter le site www.handicare.com pour la liste complète des distributeurs. Veiller à toujours disposer de la version correcte du manuel. La version la plus récente peut être téléchargée sur notre site Internet : www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8-557 62 200

SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEEN

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

