

Max: 300kg



StandingVest est une veste qui a été spécialement conçue pour lever une personne avec une coquille de soutien. Elle est facile à mettre en place pour le personnel, en même temps qu'elle donne un sentiment de sécurité à la personne qui l'utilise. Elle est conçue pour donner un appui autour du haut du corps et elle est maintenue en place au moyen d'appuis rembourrés au niveau de l'aine. StandingVest est conçue pour activer le patient de manière sûre et confortable.

SystemRoMedic comporte un vaste choix de harnais de levage fonctionnels, confortables et de haute qualité, adaptés aux différents types d'auxiliaires de levage et aux différents besoins des utilisateurs. Les harnais de levage sont disponibles dans plusieurs matières différentes et dans les tailles de XXS à XXL. Tous les modèles, à la fois sûrs et très faciles à utiliser, peuvent supporter une charge maximale de 300 kg. Le choix du modèle et de la matière dépend de la situation de levage et des besoins du patient.



## Contrôle de fonctionnement

### Inspection visuelle et mécanique

Effectuer des inspections régulières du harnais de levage. Toujours contrôler après un lavage. Vérifier que les coutures et les matériaux sont intacts et non endommagés. Vérifier si le matériau est usé ou pali. Exercer une charge sur les boucles et les poignées et vérifier qu'elles supportent une contrainte élevée. S'il présente des signes d'usure, le produit doit être mis au rebut.



### Toujours lire le manuel

Toujours lire les manuels de tous les auxiliaires utilisés lors d'un transfert de patient.


Conserver le manuel pour qu'il soit accessible aux utilisateurs du produit.

Ne pas laisser le patient sans surveillance pendant la phase de transfert.

Pour le bien-être de la personne et pour lui éviter de glisser du harnais, toujours vérifier minutieusement l'auxiliaire de levage. Accrocher d'abord les œillets du dos du harnais de levage, puis accrocher les œillets des appuis pour les jambes. Utiliser un étrier de levage éprouvé.

C'est toujours la charge maximale autorisée la plus faible de chaque produit respectif qui prévaut pour l'appareil de levage complet. Toujours vérifier la charge maximale autorisée de l'auxiliaire de levage et de ses accessoires avant d'utiliser l'appareil et prendre contact avec votre revendeur en cas de doute.

## Description de StandingVest

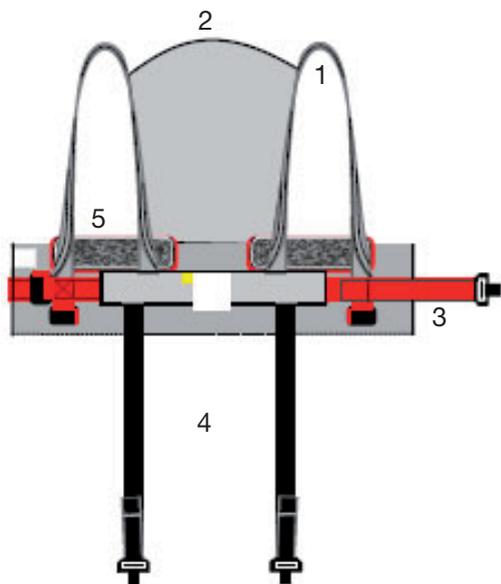


StandingVest se compose de :

1. Œillets de levage (gris)
2. Dossier/repose-tête
3. Ceinture de taille (rouge)
4. Sangle entrejambes (noir)
5. Rembourrage de la veste de levage

Raccorder les œillets de levage sur l'étrier de levage. La ceinture de taille et les sangles entrejambes sont dotées d'une attache rapide pour simplifier la mise en place. Les sangles entrejambes se passent autour des jambes, de l'arrière vers l'avant. La veste de levage est également rembourrée à l'emplacement des bras pour ne pas exercer de pression ni de pincement.

## Mise en place de StandingVest quand la personne est couchée dans la coquille de soutien

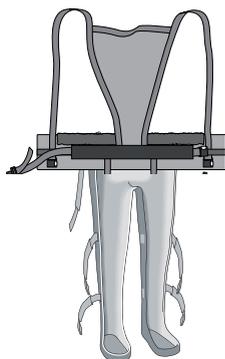

Mettre en place StandingVest sous la coquille de soutien horizontale, puis placer la personne dans la coquille selon les instructions qui accompagnent celle-ci. Placer ensuite les bras de la personne à travers les œillets de levage de StandingVest. Le milieu de StandingVest doit suivre la colonne vertébrale du patient et lui fournir un appui pour la tête.



Ajuster et serrer la sangle de ceinture.

## Mise en place des sangles entrejambes quand la personne est couchée dans la coquille de soutien




Une fois que la veste est placée autour du haut du corps du patient, faire passer les sangles entrejambes de l'extérieur de la coquille, sous les cuisses, puis remonter vers l'aîne.



Les sangles entrejambes se serrent sur l'avant à l'aide des boucles.

## Relevage du patient en position debout

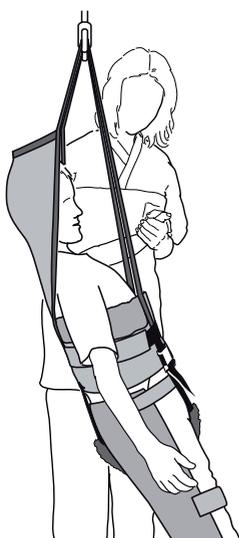

Préparer le patient à être relevé, lui expliquer ce qui va se passer.

Accrocher les œillets pour les bras sur l'étrier de levage puis commencer le levage.

Ne jamais laisser le patient sans surveillance pendant la phase de relevage, et rester attentif à ses signaux. En cas de désagrément, interrompre le relevage.

Si une coquille de soutien est utilisée, celle-ci doit ensuite être fixée selon les instructions adéquates, alors que l'auxiliaire de levage stabilise le patient.

Une fois que le patient est stabilisé en position debout, l'auxiliaire de levage peut être abaissé et la StandingVest peut être décrochée.

## Matériaux :

Polyester : Matériau résistant et présentant une friction faible. Supporte des températures de lavage élevées.

## Conseils d'entretien :

Lire l'étiquette-conseil du harnais de lavage.



Ne pas utiliser de produit de rinçage adoucissant.

Éviter le sèche-linge pour augmenter la longévité du produit.

## Information sur les tailles

Taille	XS/Orange	S/Rouge	M/Jaune	L/Vert	XL/Lilas
Dimensions de cm	82	96	110	122	130
la veste cm inch	32	38	43	48	51
Poids brut rec. lbs	33-88	44-110	88-132	110-176	154-220
de l'utilisateur kg	15-40	20-50	40-60	50-80	70-100

Si vous avez des questions sur le produit et son utilisation, veuillez contacter votre distributeur local. Prière de consulter le site [www.handicare.com](http://www.handicare.com) pour la liste complète des distributeurs. Veiller à toujours disposer de la version correcte du manuel. La version la plus récente peut être téléchargée sur notre site Internet : [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-557 62 200

Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

