

Carico massimo: 300kg

L'imbracatura ClassicHighBackSling consente al paziente di assumere una posizione seduta comoda e stabile, garantendogli un senso di sicurezza. È progettata per essere lasciata sulla sedia una volta completato il trasferimento del paziente, in modo che il paziente possa rimanere seduto sull'imbracatura. Offre un supporto a tutto il corpo, dalle ginocchia al capo del paziente. L'imbracatura ClassicHighBackSling è progettata per l'uso nelle situazioni più comuni di sollevamento, come il trasferimento del paziente dal letto alla sedia a rotelle, ecc.

Il sistema RoMedic è suddiviso in quattro categorie: trasferimento, riposizionamento, supporto e sollevamento.



Controllo funzionale

Controllare regolarmente le condizioni e il funzionamento dell'imbracatura, in particolare dopo ogni lavaggio.

Controllare che il tessuto non sia usurato, danneggiato o sbiadito.

In presenza di segni di usura, il prodotto non deve essere utilizzato e deve essere smaltito in caso di dubbi sulla sua sicurezza.



Leggere sempre le istruzioni


Leggere le istruzioni di tutti i dispositivi di assistenza utilizzati per il trasferimento del paziente.

Scegliere con attenzione la taglia dell'imbracatura, in modo da evitare disagi e il rischio che il paziente scivoli fuori dall'imbracatura. Se l'imbracatura è troppo larga, sussiste il rischio che il paziente scivoli fuori.

Non lasciare il paziente da solo durante il sollevamento.

Applicare gli anelli posteriori dell'imbracatura prima di applicare gli anelli del supporto gambe. Usare sempre un bilancino appropriato.

L'imbracatura ClassicHighBackSling può essere applicata solo quando il paziente è completamente sdraiato in posizione supina:

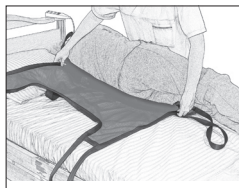

1. Girare il paziente verso l'operatore. Posizionare l'imbracatura in modo che la sezione centrale si trovi in corrispondenza della colonna vertebrale del paziente e il bordo inferiore sia ca. 5-10 cm sopra l'incavo delle ginocchia. Posizionare il bordo dell'imbracatura il più possibile sotto il paziente.
2. Girare nuovamente il paziente assicurandosi che si trovi al centro dell'imbracatura.
3. È preferibile sollevare il supporto posteriore prima di iniziare il sollevamento. Iniziare il sollevamento, quando le cinghie sono tese, arrestare il sollevamento e verificare che tutto sia a posto prima di procedere.
4. L'imbracatura è stata progettata per essere lasciata sulla sedia.

L'imbracatura ClassicHighBackSling può essere rimossa solo quando il paziente è sdraiato sul letto, sulla barella o sul pavimento:

Seguire le stesse procedure di applicazione dell'imbracatura, ma in sequenza inversa.

Materiale:

Rete di poliestere: materiale traspirante ideale quando l'imbracatura deve essere lasciata sotto il paziente.

Pulizia e manutenzione del prodotto:

Leggere l'etichetta del prodotto.



Non usare detersivi. Per garantire la massima durata del materiale, asciugare l'imbracatura appesa o nell'asciugatrice a basso calore.

Informazioni sulla taglia

Le imbracature spesso possono essere usate con bilancini a 2 e a 4 punti di sollevamento.

È fondamentale accertarsi che la larghezza del bilancino sia adatta alla taglia dell'imbracatura e alle condizioni e alle capacità funzionali del paziente. Utilizzare imbracature specifiche per il paziente (monopaziente) nei casi in cui il controllo delle infezioni abbia la massima priorità.

Misura		XS/arancione	S/rossa	M/gialla	L/verde	XL/porpora
Racc.	lbs	44-88	66-132	121-187	176-265	243-309
Peso paziente	kg	20-40	30-60	55-85	80-120	100-140
Imbracatura	pollici	37,5	38,5	42	43	45
altezza	cm	95	98	106	110	115

In caso di dubbi, contattare il vostro rappresentante Handicare per provare i prodotti, per consulenza ed informazioni. Per ulteriori informazioni, chiedete al vostro specialista di prodotto o rappresentante, oppure visitate il sito www.handicare.com. Assicuratevi di avere sempre la versione più aggiornata del manuale. I manuali sono disponibili e scaricabili dal nostro sito internet www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com
E-mail: info@handicare.se

