
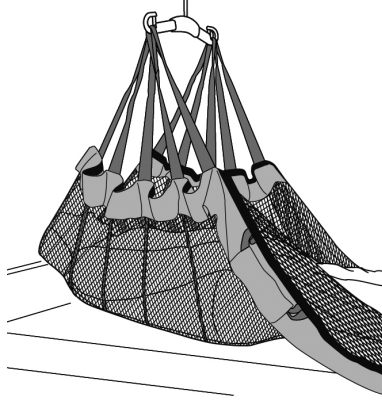


SafeHandlingSheet

SystemRoMedic™

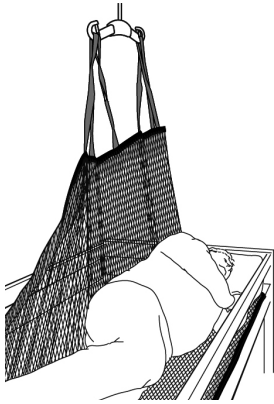

Max: 300 kg

SafeHandlingSheet è un lenzuolo di posizionamento studiato per il riposizionamento del paziente sul letto con l'ausilio di sollevatori fissi e mobili. È dotato di sedici anelli di aggancio, otto per lato. SafeHandlingSheet è progettato per rispondere alle esigenze di riposizionamento del paziente sul letto.

SystemRoMedic comprende una vasta gamma di imbracature funzionali, comode e di alta qualità che possono essere adattate a vari tipi di sollevamento e per pazienti con esigenze differenti. Le imbracature sono disponibili in numerosi materiali differenti e nelle taglie dalla XXS alla XXL. Tutti i modelli sono sicuri, molto facili da usare ed omologati per il sollevamento di pazienti fino a 300 kg. La scelta del modello e del materiale dipende dalle esigenze del paziente e dal tipo di trasferimento.



Controllo funzionale

Ispezione visiva e meccanica

Verificare regolarmente le condizioni e il funzionamento dell'imbracatura. Ispezionare sempre il prodotto dopo il lavaggio. Verificare che le cuciture e il materiale non siano danneggiati. Accertarsi che il tessuto non sia usurato o sbiadito. Applicare un carico pesante al dispositivo per verificare la resistenza di agganci, impugnature, ecc. Qualora presenti segni di usura, il prodotto deve essere gettato.



Leggere sempre le istruzioni


Leggere attentamente le istruzioni di tutti i dispositivi di ausilio utilizzati per il trasferimento del paziente.

Conservare il manuale in un luogo accessibile agli utenti del prodotto.

Non lasciare mai incustodito il paziente durante il trasferimento.

Il carico massimo dell'intero sistema di sollevamento corrisponde sempre a quello del componente con il carico massimo di sicurezza inferiore. Verificare sempre il carico massimo di sicurezza di sollevatore e accessori prima dell'uso. In caso di dubbi, rivolgersi al proprio rivenditore.

Descrizione del lenzuolo di posizionamento SafeHandlingSheet:

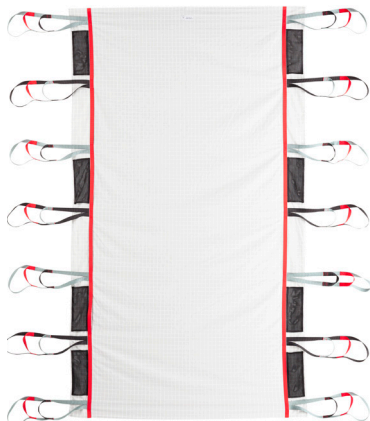

SHSheet L Rete di poliestere/WendyLett4Way

SafeHandlingSheet è dotato di anelli di aggancio lungo entrambi i lati.

Per semplificare il lavoro dell'operatore, gli anelli di aggancio sono alternativamente grigi e neri.

Esistono tre tipi di anello di aggancio con colori differenti: grigio, rosso e nero.


SafeHandlingSheet prevede una decalcomania che indica il lato rivolto verso l'alto, con la dicitura "This side up".

La decalcomania indica anche il centro della traversa.



SHSheet L Rete di poliestere


Al termine del riposizionamento, riporre gli anelli di aggancio sotto il materasso o nelle tasche laterali.

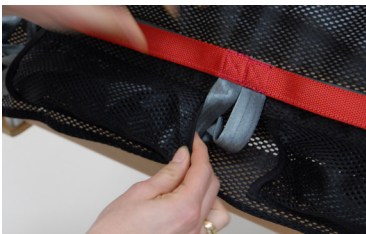

Suggerimenti!

- Utilizzare traverse piane sopra SafeHandlingSheet.
- Sistemare l'utente al centro di SafeHandlingSheet.
- Il materiale aggiuntivo fornito con SafeHandlingSheet consente di riposizionare l'utente più volte prima di doverlo riposizionare su SafeHandlingSheet.
- Raccomandato per l'uso con sistemi di sollevamento a soffitto trasversali (asse x-y).
- Se possibile, provare a spostare il letto anziché spingere/tirare il paziente sollevato.


Utilizzo del lenzuolo di posizionamento SafeHandlingSheet:

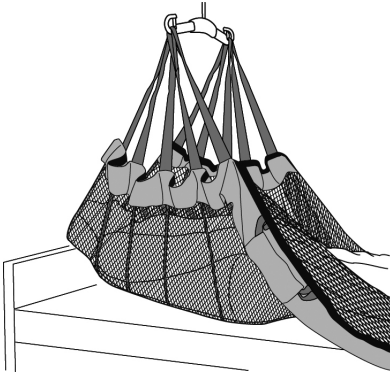

Riposizionamento verso l'alto sul letto:

Agganciare al bilancino i 5 anelli più in alto su ogni lato (oppure il numero di anelli necessari per coprire i punti di attrito).

Iniziare il sollevamento e portare il paziente in alto sul letto man mano che si scarica il peso dai punti di attrito.

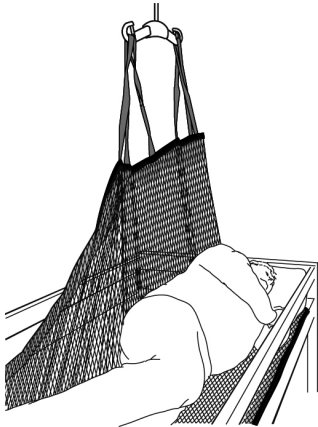

Movimentazione laterale del paziente:

Se il paziente deve essere posizionato al centro del letto dopo la postura laterale, si consiglia, prima di eseguire il posizionamento supino, di portare il paziente in alto sul letto (vedere: Riposizionamento verso alto sul letto), e poi rimetterlo in posizione supina.

Per ruotare il paziente, agganciare al bilancino i quattro anelli più centrali posti su un lato del lenzuolo SafeHandlingSheet (lato opposto alla direzione in cui si deve far girare il paziente). Se il letto non ha sponde laterali, è opportuno che un operatore si posizioni sul lato opposto del letto in modo da garantire al paziente la massima sicurezza. Alzare il sollevatore per fare girare delicatamente il paziente verso il centro del letto.

Sostituzione del lenzuolo SafeHandlingSheet:

Per sostituire un lenzuolo SafeHandlingSheet con uno nuovo, procedere con il sollevamento come descritto precedentemente. Quando il paziente è sollevato dal letto, posizionare il nuovo lenzuolo SafeHandlingSheet al centro del letto.



Abbassare il paziente con la schiena sul letto e sganciare il vecchio lenzuolo SafeHandlingSheet dal bilancino. Agganciare il nuovo lenzuolo SafeHandlingSheet al bilancino e far girare il paziente su un lato (vedere: Movimentazione laterale), avvolgere o piegare il vecchio lenzuolo SafeHandlingSheet dietro e sotto il paziente, e poi far girare il paziente sul letto. Con il nuovo lenzuolo SafeHandlingSheet eseguire un'altra movimentazione laterale nella posizione opposta, togliere il vecchio SafeHandlingSheet da dietro il paziente, e poi far girare di nuovo il paziente sul letto.

Dalla posizione seduta sul lato del letto

Nota! Il paziente deve essere in grado di sedersi sul lato del letto.

Abbassare il letto in modo che il paziente possa appoggiare saldamente i piedi sul pavimento quando è seduto sul lato del letto.

Se il letto è troppo alto, utilizzare un poggiapiedi.

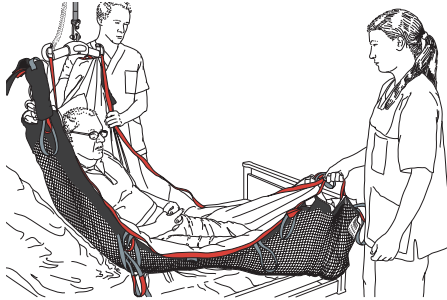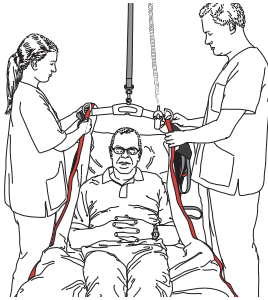

Preparare il paziente al sollevamento.

Sollevare lo schienale del letto e sistemare le impugnature più alte sul bilancino.

Un operatore deve afferrare le impugnature all'estremità del letto.

Iniziare il sollevamento.

L'operatore solleva le gambe del paziente sul bordo del letto, facendogli appoggiare i piedi sul pavimento.

Accertarsi che il paziente sia seduto in tutta sicurezza sul lato del letto. Le ginocchia e le anche si devono trovare alla stessa altezza.

Sistemare un ausilio o deambulatore appropriato di fronte al paziente per aiutarlo ad alzarsi.

Prodotto	Codice	Misure	Materiale	Carico massimo
SHSheet L poly net	47522007	240 x 115	Rete di poliestere: materiale ventilato e traspirante	300 kg/661 libbre
SHSheet XL poly	47502008	240 x 115	Poliestere: Materiale robusto a basso attrito	400 kg/900 libbre
SHSheet XXL poly/ reinforced	47502009	240 x 130	Poliestere: Materiale robusto a basso attrito	570 kg/1250 libbre
SHSheet L Poly net/ WendyLett4Way	47542007	240 x 115	Rete di poliestere: materiale ventilato e traspirante WendyLett4Way: Traversa da sistemare sotto il paziente	300 kg/661 libbre

Pulizia e manutenzione del prodotto:

Leggere l'etichetta del prodotto.



Non usare detersivi.
Per garantire la massima durata del materiale, asciugare l'imbracatura appesa o nell'asciugatrice a basso calore.

In caso di dubbi, contattare il vostro rappresentante Handicare per provare i prodotti, per consulenza ed informazioni. Per ulteriori informazioni, chiedete al vostro specialista di prodotto o rappresentante, oppure visitate il sito www.handicare.com. Assicuratevi di avere sempre la versione più aggiornata del manuale. I manuali sono disponibili e scaricabili dal nostro sito internet www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com
E-mail: info@handicare.se

