

Carico massimo: 300kg



StandingVest è progettata specificatamente per il sollevamento in combinazione con i tutori per la postura eretta. Per gli operatori l'imbracatura è facile da applicare e dona al paziente un senso di sicurezza. È studiata per sostenere la parte superiore del corpo ed è dotata di un supporto imbottito a livello dell'inguine. StandingVest è stata progettata per rendere attivo il paziente in sicurezza e con il massimo comfort.

Il sistema RoMedic è suddiviso in quattro categorie: trasferimento, riposizionamento, supporto e sollevamento.



Controllo funzionale

Controllare regolarmente le condizioni e il funzionamento dell'imbracatura, in particolare dopo ogni lavaggio.

Controllare che il tessuto non sia usurato, danneggiato o sbiadito.

In presenza di segni di usura, il prodotto non deve essere utilizzato e deve essere smaltito in caso di dubbi sulla sua sicurezza.



Leggere sempre le istruzioni


Leggere le istruzioni di tutti i dispositivi di assistenza utilizzati per il trasferimento del paziente.

Scegliere con attenzione la taglia dell'imbracatura, in modo da evitare disagi e il rischio che il paziente scivoli fuori dall'imbracatura. Se l'imbracatura è troppo larga, sussiste il rischio che il paziente scivoli fuori.

Non lasciare il paziente da solo durante il sollevamento.

Applicare gli anelli posteriori dell'imbracatura prima di applicare gli anelli del supporto gambe. Usare sempre un bilancino appropriato.

Descrizione dell'imbracatura RoMedic StandingVest

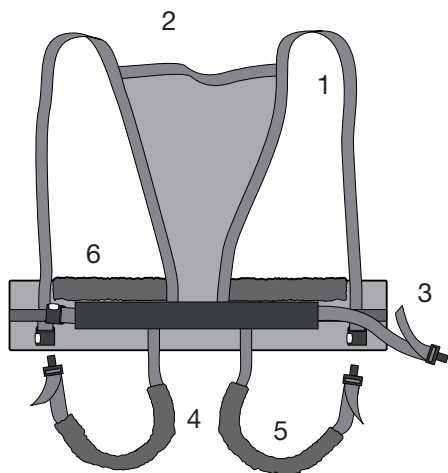


L'imbracatura StandingVest è composta da:

1. Anelli di sollevamento (grigi)
2. Supporto per la schiena e per il capo
3. Cintura (rossa)
4. Supporto gambe (nero)
5. Imbottitura per supporto gambe
6. Imbottitura per l'imbracatura

Gli anelli di sollevamento si agganciano al bilancino. La cintura e il supporto gambe sono dotati di una fibbia ad aggancio/sgancio rapido per una facile applicazione. Il supporto gambe si applica attorno alle cosce, dalla parte posteriore a quella anteriore. Il supporto gambe è imbottito in modo da evitare compressioni e irritazioni all'inguine. L'imbracatura è imbottita anche all'altezza delle braccia per evitare compressioni e irritazioni.

Applicazione di StandingVest quando il paziente indossa un tutore per la posizione eretta

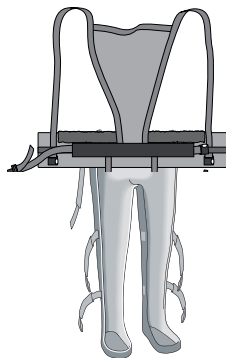

Posizionare StandingVest sotto il tutore, quindi riposizionare il tutore seguendo le relative istruzioni. A questo punto far passare le braccia del paziente attraverso gli anelli di StandingVest. La sezione centrale di StandingVest deve essere allineata con la colonna vertebrale del paziente e deve garantire supporto al capo.



Stringere e regolare la cintura.

Applicazione del supporto gambe quando il paziente indossa un tutore per la posizione eretta




Quando si applica l'imbracatura attorno alla parte superiore del corpo del paziente, il supporto gambe si applica partendo da un lato e spingendolo sotto le cosce verso l'inguine.



Fissare il supporto gambe anteriormente.

Sollevamento del paziente in posizione eretta

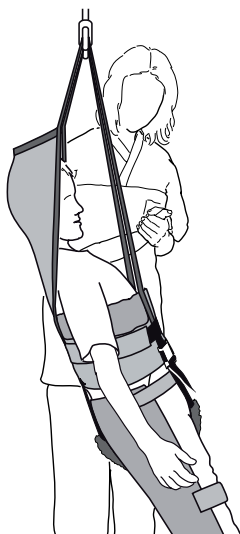

Preparare il paziente spiegandogli la procedura.

Agganciare gli anelli per le braccia al bilancino e iniziare il sollevamento.

Non lasciare mai il paziente da solo durante il sollevamento. Prestare sempre la massima attenzione ai segnali del paziente. Arrestare il sollevamento se il paziente si sente scomodo.

Il tutore per la posizione eretta deve essere assicurato secondo le istruzioni mentre il sollevatore stabilizza il paziente.

Quando il paziente si trova in una posizione eretta sicura, è possibile abbassare il sollevatore e rimuovere StandingVest.

Materiale:

Poliestere: materiale resistente a basso attrito.

Pulizia e manutenzione del prodotto:

Leggere l'etichetta del prodotto.



Non usare detersivi.
Per garantire la massima durata del materiale, asciugare l'imbracatura appesa o nell'asciugatrice a basso calore.

Informazioni sulla misura

Misura		XS/ Arancione	S/ Rossa	M/ Gialla	L/ Verde	XL/ Porpora
Misura dell'imbracatura	cm	82 32	96 38	110 43	122 48	130 51
Peso paziente raccomandato	lbs kg	33-88 15-40	44-110 20-50	88-132 40-60	110-176 50-80	154-220 70-100

In caso di dubbi, contattare il vostro rappresentante Handicare per provare i prodotti, per consulenza ed informazioni. Per ulteriori informazioni, chiedete al vostro specialista di prodotto o rappresentante, oppure visitate il sito www.handicare.com. Assicuratevi di avere sempre la versione più aggiornata del manuale. I manuali sono disponibili e scaricabili dal nostro sito internet www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8-557 62 200

SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEEN

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

