



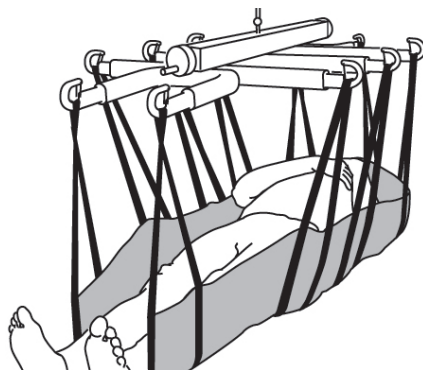

Carico massimo: 300kg

L'imbracatura StretcherSling si usa in combinazione con uno speciale bilancino, StretcherBar, per il sollevamento dei pazienti in posizione orizzontale. È dotata di dieci punti di sospensione, cinque per lato, che garantiscono un supporto uniforme sotto il corpo del paziente. StretcherSling è progettata per rispondere alle esigenze di trasferimento dei pazienti in posizione supina.

Il sistema RoMedic è suddiviso in quattro categorie: trasferimento, riposizionamento, supporto e sollevamento.

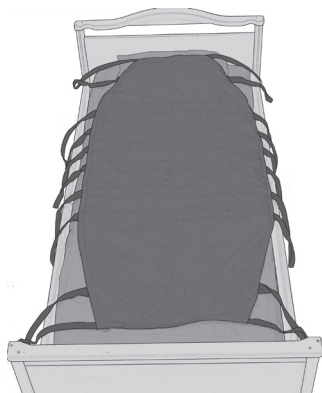

Controllo funzionale

Controllare regolarmente le condizioni e il funzionamento dell'imbracatura, in particolare dopo ogni lavaggio.

Controllare che il tessuto non sia usurato, danneggiato o sbiadito.

In presenza di segni di usura, il prodotto non deve essere utilizzato e deve essere smaltito in caso di dubbi sulla sua sicurezza.



Leggere sempre le istruzioni


Leggere le istruzioni di tutti i dispositivi di assistenza utilizzati per il trasferimento del paziente.

Scegliere con attenzione la taglia dell'imbracatura, in modo da evitare disagi e il rischio che il paziente scivoli fuori dall'imbracatura. Se l'imbracatura è troppo larga, sussiste il rischio che il paziente scivoli fuori.


Non lasciare il paziente da solo durante il sollevamento.

Applicare gli anelli posteriori dell'imbracatura prima di applicare gli anelli del supporto gambe. Usare sempre un bilancino appropriato.

Descrizione del prodotto StretcherSling e StretcherBar

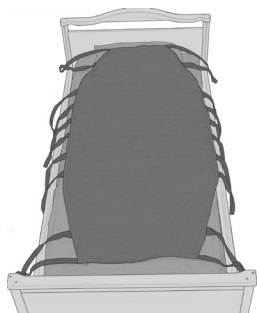


StretcherSling è un'imbracatura lunga 177 cm con cinque anelli su entrambi i lati. Ciò significa che il peso del paziente è distribuito su dieci anelli.

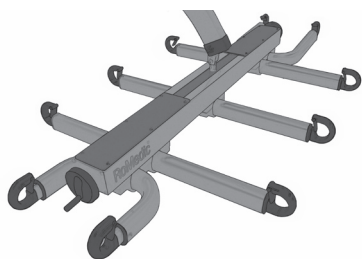


StretcherSling è stata progettata per l'uso esclusivo con il bilancino StretcherBar. Non sono raccomandabili altre combinazioni.

StretcherBar è in alluminio. La sezione centrale è dotata di dispositivo di regolazione integrato e di cinque profili con ganci di sollevamento su ogni estremità. Consultare il manuale di StretcherBar.

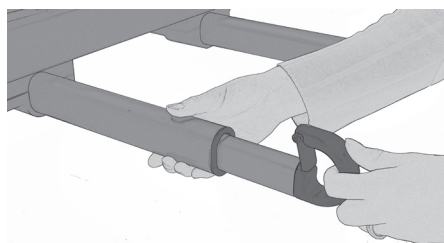

I ganci di sollevamento sono dotati di ganci di sicurezza e tutti i bracci di sollevamento possono essere regolati in base alla larghezza del paziente semplicemente tirandoli fuori prima di iniziare il sollevamento. Consultare il manuale di StretcherBar.

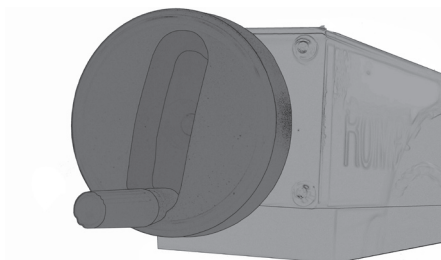


La sezione centrale del bilancino StretcherBar contiene un dispositivo di regolazione integrato. Per ottenere l'equilibrio desiderato è sufficiente ruotare una manopola su entrambi i lati. Consultare il manuale di StretcherBar.

L'imbracatura StretcherSling può essere applicata e rimossa solo quando il paziente è completamente sdraiato




1

1. Girare il paziente verso l'operatore.
Posizionare l'imbracatura StretcherSling in modo tale che l'etichetta del prodotto sia rivolta verso la superficie sottostante e la sezione centrale dell'imbracatura segua la colonna vertebrale del paziente.
Il bordo superiore di StretcherSling deve sostenere il capo.
Posizionare l'imbracatura il più possibile sotto il paziente. Porre gli anelli sotto il paziente in modo da poterli afferrare una volta ruotato nuovamente il paziente sull'imbracatura StretcherSling.

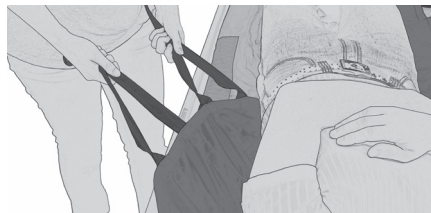


2

2. Ruotare il paziente sull'imbracatura e tirare l'imbracatura dall'altro lato con l'aiuto degli anelli.

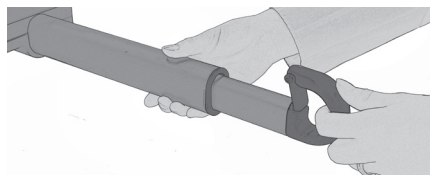

3

3. Se necessario: Regolare la larghezza della barella StretcherBar per adattarla alla larghezza del paziente estraendo i bracci di sollevamento. Successivamente, agganciare gli anelli di sollevamento ai ganci della barella.

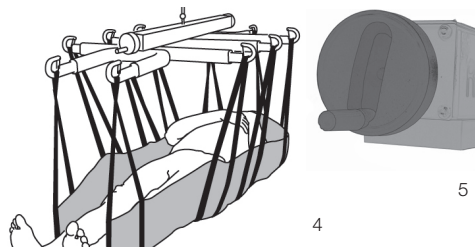

5


4. Alzare il sollevatore finché tutti gli anelli sono completamente tesi. Fermare il sollevamento per verificare che sia tutto a posto prima di sollevare il paziente dalla superficie sottostante.
5. Se il paziente non è in equilibrio dopo il sollevamento dalla superficie sottostante, è possibile correggere la posizione con il dispositivo di regolazione.

Rimozione dell'imbracatura StretcherSling



1

1. Sganciare tutti gli anelli di sollevamento dalla barella. Ruotare il paziente verso l'operatore e piegare l'imbracatura StretcherSling sotto il paziente.

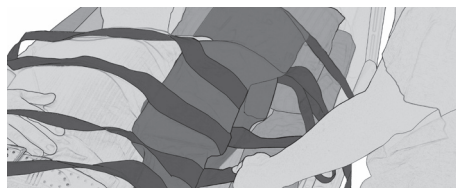

2

2. Dopo aver girato il paziente, l'imbracatura StretcherSling scivola su se stessa estraendola.

Metodo di applicazione alternativo di StretcherSling

Se la situazione non permette di girare il paziente sul letto, iposizionare innanzitutto due lenzuoli ReadySheets sotto il paziente (dai glutei in su), poi infilare l'imbracatura StretcherSling tra i due lenzuoli ad alto scorrimento.

Materiale:

Poliestere: materiale resistente a basso attrito.

Rete plastificata: materiale lavabile con alcool, raccomandato per il bagno e la doccia del paziente.

Pulizia e manutenzione del prodotto:

Leggere l'etichetta del prodotto.



Non usare detergenti.
Per garantire la massima durata del materiale, asciugare l'imbracatura appesa o nell'asciugatrice a basso calore.

In caso di dubbi, contattare il vostro rappresentante Handicare per provare i prodotti, per consulenza ed informazioni. Per ulteriori informazioni, chiedete al vostro specialista di prodotto o rappresentante, oppure visitate il sito www.handicare.com. Assicuratevi di avere sempre la versione più aggiornata del manuale. I manuali sono disponibili e scaricabili dal nostro sito internet www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN

Tel: +46 (0)8-557 62 200
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com
E-mail: info@handicare.se

