

**Maks belastning: 300 kg**

BackBoardStraps er utviklet for å muliggjøre mekaniske løft med en manuell bære. Produktet fungerer optimalt sammen med Ferno Scoop Stretcher 065 EXL og er spesielt egnet innen akuttstykkeleien. Båndene på Ferno Scoop Stretcher skal være montert i samsvar med denne instruksjonen. BackBoardStraps består av fire frittstående løftebånd med 6 alternative opphengsløkker på hver side, for å balansere båret under løftet. BackBoardStraps hektes sammen i håndtakshullene (to på hver side) og festes deretter på krokene på løftebøylen.

I SystemRoMedic finnes et bredt utvalg av funksjonelle, komfortable og høykvalitative løfteseler, spesielt tilpasset ulike typer av løft og for brukere med ulike behov. Løfteselene finnes i flere ulike materialer og størrelser - fra XXS till XXL. Alle modeller er både sikre og meget lette i bruk, og de kan brukes på brukere opp til 300 kg. Valget av modell og materiale avgjøres ut fra løftesituasjonen og brukerens behov.



## Kontroll av funksjon

### Visuell og mekanisk inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av løfteselen. Kontroller alltid etter vask. Kontroller at sømmer og materiale er helt og skadefritt. Kontroller om materialet er utsatt for slitasje eller er blitt bleket. Belast og kontroller at spenner og håndtak holder når du drar kraftig i selen. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.



## Les alltid manualen

Les alltid manualene for alle hjelpemidler som benyttes i en forflytning.


Oppbevar manualen tilgjengelig for brukere av produktet.

La aldri brukeren være alene under forflytningsmomentet.

Unngå utglidningsrisiko eller ubehag ved å være grundig når man prøver løfteselen. Huk først på løfteselens ryggkroker på løftebøylen, huk deretter på beinløkkene. Benytt en utprøvd løftebøyle.

Det er alltid den minste maksimumslasten på det respektive produktet i den sammensatte løfteenheten som er avgjørende. Kontroller alltid tillatt maksimumslast på løfter og løftetilbehør før bruk og kontakt din forhandler hvis du har spørsmål.

## Montering og bruk

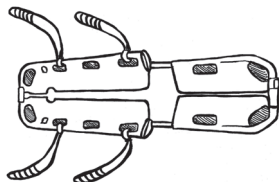

Båndene festes i hullene på sidene av båren i høyde med pasientens hofter og skuldre.

De monteres ved at båndene dras gjennom hullet og videre gjennom løkken i båndet.

Monter to bånd på hver side av båren og deretter på løftebøylen. Tilpass bredden på løftebøylen etter brukeren for å unngå ubehag.

Ved å velge noen av de seks alternative løfteløkkene balanseres båren før løftet.

Start løftet, stopp opp og se at båren er vel balansert i horisontalt leie. Er båren i horisontalt leie fortsett løftet. Hvis ikke senk ned og reguler med løkkealternativene.

Individuelle tester må utføres i hver enkelt løftesituasjon for å forsikre at løftet er balansert.



Var nøye med horisontalt leie!

Benytt alltid sikkerhetsbeltene i samsvar med manualen til Ferno Scoop Stretcher!

### Før løftet:

Les og følg manualen til Ferno Scoop Stretcher.

Planlegg løftet og vurder/bestem hvor mange medhjelpere som trengs for optimal sikkerhet.


Løft aldri høyere enn nødvendig.

La aldri brukeren bli værende alene under løftemomentet.

## Mål

A: 110 cm

B: 8 cm

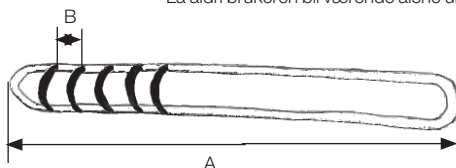

## Vedlikeholdsråd:

Les på løfteselens merkeetikett.



Bruk ikke skyllemiddel.

Unngå tørketrommel for lengre levetid.

Ved spørsmål om produkter og bruken av disse, kontakt din lokale distributør. Se [www.handicare.com](http://www.handicare.com) for en komplett distributørliste. Sjekk at du alltid har rett versjon av manualen tilgjengelig. De siste versjonene kan du laste ned fra vår hjemmeside: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200

SE-175 27 Järfälla

Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

