

Maks: 570 kg

BariSling er en løftesele som er konstruert for løft av personer som veier 200 kg eller mer. Den kan benyttes sammen med en mobil- eller stasjonær løfter med firepunktsbøyle, eller til BariTurn. BariSling er utformet med seks opphengspunkter. Den har to opphengsløkker bak og fire nede under beina for å fordele trykket på en bekvem og sikker måte.

I SystemRoMedic finnes et bredt utvalg av funksjonelle, bekvemme og høykvalitative løfteseler, spesielt tilpasset ulike typer løft og for brukere med ulike behov. Løfteselene finnes i flere ulike materialer og størrelser. Alle modellene er både sikre og enkle å bruke. Valget av modell og materiale bestemmes ut fra løftesituasjonen og brukerens behov.



Kontroll av funksjon

Visuell og mekanisk inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av løfteselen. Kontroller alltid etter vask. Kontroller at sømmer og materiale er helt og skadefritt. Kontroller om materialet er utsatt for slitasje eller er blitt bleket. Belast og kontroller at spenner og håndtak holder når du drar kraftig i selen. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.



Les alltid manualen


Les alltid manualene for alle hjelpemidler som benyttes i en forflytning.

Oppbevar manualen tilgjengelig for brukere av produktet.

La aldri brukeren være alene under forflytningsmomentet.

Unngå utglidningsrisiko eller ubehag ved å være grundig når man prøver løfteselen. Huk først på løfteselens rygggløkker på løftebøylen, huk deretter på beinløkkene. Benytt en utprøvd løftebøyle.

Produktbeskrivelse av BariSling

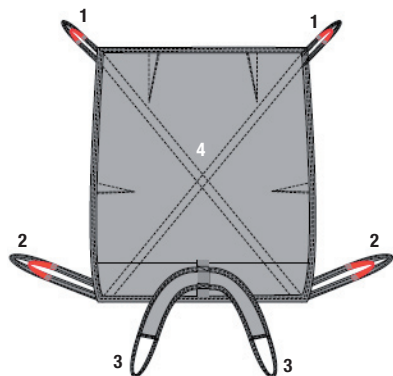

BariSling er utformet som en hel sele uten delte beinstøtter. Den har seks opphengspunkter, to opphengsløkker bak, to nede på utsiden av beina og to mellom lårene for å fordele trykket på en bekvem og sikker måte.

BariSling består av:

1. Bakre løfteløkker
2. Fremre løfteløkker
3. Bånd med løfteløkker
4. Rygg- og sittedel

Bruk av BariSling

Plassering av BariSling liggende i seng:

Brukeren vender seg selv i første omgang. Klarer ikke brukeren dette, så anbefaler vi at hjelpemidler som SafeHandlingSheet, TopSheet eller andre vendingshjelpemidler benyttes i vendingen.

Plasser løfteselen slik at selens midte følger ryggraden og den nedre kanten er ca 5-10 cm ovenfor brukerens knehase. Plasser løfteselens kant så langt inn under brukeren som mulig.

Vend tilbake brukeren slik at løfteselen kan trekkes frem og justeres. Så plasseres beinstøtten opp mellom knærne. Kontroller at BariSling er jevnt fordelt på begge sider.

Hev gjerne ryggstøtten på sengen før du løfter.

Plassering av BariSling sittende på sengekant:

Brukeren lener seg mot den ene siden av sengen og BariSling vikles inn og plasseres midt under enden, så langt inn under brukeren som mulig, med midtlinjen i midten under skrittet.

Plasser løfteselen slik at selens midte følger ryggraden og den nedre kanten er ca 5-10 cm ovenfor brukerens knehase. Plasser løfteselens kant så langt inn under brukeren som mulig.

Når BariSling er satt på plass, setter brukeren seg opp igjen og vender seg mot andra siden, slik at løfteselen kan trekkes frem og justeres. Så plasseres beinstøtten opp mellom knærne. Kontroller at BariSling er jevnt fordelt på begge sider.

Montering på firepunktsbøyle:

I løft med mobiløfter eller med stasjonær løftemotor, anbefales bruk av firepunktsbøyle. Monter først de bakre løfteløkkene på løftebøylens bredes siden, og så de nedre fire løfteløkkene på den smalere siden.

Montering på BariTurn:

BariTurn er en vrideplate som sammen med to løftemotorer muliggjør løft med vridning.

Fest først de fire nedre løfteløkkene på den ene løftemotorens løftebøyle, og så de to bakre løfteløkkene på den andre løftemotorens løftebøyle.

Løft:

Forbered brukeren på løftet og informer underveis og i forkant, hva som kommer til å skje. La aldri brukeren være alene under selve løftemomentet. Vær oppmerksom på brukerens signaler. Start løftet. Stopp opp når samtlige løftebånd er spendt og kontroller at alt er i orden for oppreisningen fortsetter. Avbryt løftet ved ubehag.

Løfteselen blir værene i stolen under brukeren.

Fjerning av BariSling

Liggende i seng

Senk ned brukeren på sengen og ta av opphengsbåndene fra løftebøylene. Brukeren vender seg først mot den ene siden av sengen, slik at BariSling kan vikles inn under ryggen på brukeren. Deretter lener brukeren seg til andre siden og BariSling kan trekkes ut.

Maksimumslast

De ulike produktene i den sammensatte løfteenheten (løfter, løftebøyle, løftesele, vekt og eventuelt annet løftetilbehør) kan ha forskjellige maksimumslaster. Det er alltid den minste maksimumslasten på det respektive produktet i den sammensatte løfteenheten som er avgjørende. Kontroller alltid tillatt maksimumslast på løfter og løftetilbehør før bruk og kontakt din forhandler hvis du har spørsmål.

Produkt	Artikkelnummer	Anbefalt brukervekt(kg)	Maksimumsvekt
BariSling XXXL	47001010	200-570	570kg

OBS! Anbefales til firepunktsbøyle eller BariTurn.

Vedlikeholdsråd:

Les på løfteselens merkeetikett.



Bruk ikke skyllemiddel.

Unngå tørketrommel for lengre levetid.

OBS!

Løft og overflytning av en person medfører alltid en risiko. Kontroller at brukersens helsetilstand tillater løft. Ved minste tvil, unngå å løfte. Som medhjelpere er man alltid ansvarlig for brukersens sikkerhet.

Ved spørsmål om produkter og bruken av disse, kontakt din lokale distributør. Se www.handicare.com for en komplett distributørliste. Sjekk at du alltid har rett versjon av manualen tilgjengelig. De siste versjonene kan du laste ned fra vår hjemmeside: www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8-557 62 200

SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

