



Max: 20 kg/44 lbs

Der Betttisch lässt sich neben dem Bett aufstellen bzw. mit dem Untergestell seitlich unter das Bett einfahren, so dass die Tischplatte über dem Bett zu liegen kommt. Den Betttisch auf ebenem Fußboden verwenden, nicht auf Teppichen. Die Tischplatte kann geneigt werden, um Schreiben und Lesen zu erleichtern.



## Kontrolle der Funktion

### Sichtprüfung

Unterziehen Sie das Hilfsmittel regelmäßigen Funktionskontrollen. Vergewissern Sie sich, dass das Material unbeschädigt ist.

### Vor der Benutzung:

Prüfen Sie die Produkte auf korrekte Montage.

Vergewissern Sie sich, dass die Drehknöpfe fest angezogen sind.



## Lesen Sie stets die gebrauchsanweisung

Lesen Sie unbedingt die entsprechenden Anleitungen für Hilfsmittel zur Umsetzung von Patienten.

Verwahren Sie die Anleitung so, dass sie der Anwender des Produktes rasch zur Hand hat.

## Montage

Die Säule mit dem beiliegenden Drehknopf und Beilagscheibe am Untergestell montieren (Pos. 5 + 6). Darauf achten, dass der Knopf fest angezogen wird.

Oberen Teil der Säule (Winkel) auf gewünschte Höhe einstellen und Drehknopf fest anziehen (Pos. 4).

Die Unterseite der Tischplatte ist mit zwei halbkreisförmigen Beschlägen versehen. Tischplatte anbringen und Schraube (Pos. 1) durch den halbkreisförmigen Beschlag und die Bohrung in der Säule führen.


Wenn die Tischplatte an Ort und Stelle sitzt, Schraube, Beilagscheibe und Drehknopf (Pos. 1 + 8 + 2 + 3) montieren und Platte in gewünschter Neigung festziehen.

## Einstellungen

Der Betttisch wird anhand des Drehknopfes (Pos. 4) an der Säule auf die gewünschte Höhe eingestellt. In gewünschter Höhe den Drehknopf fest anziehen.

Bei gelösten Drehknopf (Pos. 3) kann die Tischplatte abgewinkelt werden. In gewünschter Neigung den Drehknopf wieder anziehen.

Die Rollen lassen sich durch Treten der Bremsen (Pos. 7) feststellen.

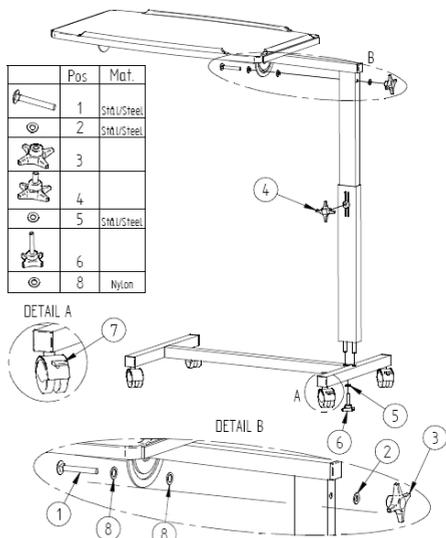


## Wichtige Hinweise

- Höchstbelastung 20 kg.
- Vergewissern Sie sich, dass die Drehknöpfe fest angezogen sind.
- Für optimale Sicherheit empfiehlt es sich, die Rollen zu sperren, wenn der Tisch in der gewünschten Position steht.
- Der Betttisch eignet sich nicht als Stütze beim Stehen.

## Zubehör

Verlängerungsplatte für den Betttisch  
Artikelnummer: 300500310

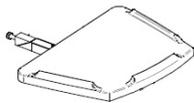

## Wartung

Der Betttisch kann mit einem Haushaltsreinigungsmittel ohne schleifende oder ätzende Eigenschaften gereinigt werden. Keine Lösungsmittel oder Chlor verwenden. Reinigen Sie die Rollen von Schmutz und Haaren, um optimale Funktion zu gewährleisten.

## Recycling

Kunststoff- und Metallteile vorschriftsmäßig entsorgen.

# Ready for life™

Ready for life ist eine Serie von Hilfsmitteln, die dem Patienten bessere Voraussetzungen für einen möglichst angenehmen und aktiven Alltag bieten sollen. Die Zielstellung bei der Entwicklung der Produkte war die Anpassung an die Bedingungen innerhalb der Heimpflege und anderer ähnlicher Bereiche. Ready for life bietet die richtige Qualität, richtige Funktion und richtige Leistung zum richtigen Preis. Die Umsetzungsprodukte lassen sich entweder allein oder als Ergänzung zu Produkten des SystemRoMedic verwenden.

Bei Fragen zu den Produkten und ihrer Anwendung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler. Für ein komplettes Händlerverzeichnis verweisen wir auf [www.romedic.com](http://www.romedic.com). Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die richtige Version des Handbuchs verfügen. Die neueste Version steht auf unserer Homepage [www.romedic.com](http://www.romedic.com) zum Download bereit.

RoMedic AB

Veddestav, 15, Box 640 Tel: +46 (0)8-594 773 33

SE-175 27 Järfälla

Fax: +46 (0)8-594 773 44

SWEDEN

Internet: [www.romedic.com](http://www.romedic.com)

E-mail: [office@romedic.com](mailto:office@romedic.com)

**RoMedic®**  
A company in the Handicare Group