

Max: 300kg



LowBackSling nostoliinaa on hoitohenkilöstön helppo käyttää ja se antaa nostettavalle miellyttävän turvallisuuden tunteen. Nostoliinassa on reisu- ja häntäsuojat, joiden ansiosta nostettava ei istu liinan päällä. Nostoliina tukee sen sijaan nostettavaa tasaisesti häntäluun, käsivarsien ja reisien alla. LowBackSling on tarkoitettu potilaille, jotka pystyvät hallitsemaan ylävartaloaan.

SystemRoMedic on kehittänyt valikoiman käytännöllisiä nostoliinoja, jotka ovat mukavia ja laadukkaita sekä sopivat erilaisiin nostotilanteisiin. Liinoissa on käytetty monia eri materiaaleja ja niiden kokovalikoima on laaja XXS–XXL. Kaikki mallit ovat turvallisia ja erittäin helppoja käyttää, ja niillä voidaan siirtää jopa 300 kiloa painavia potilaita. Nostoliinan malli ja materiaali valitaan nostotilanteen ja käyttäjän tarpeiden mukaan.



Toiminnan tarkastus

Silmämääräinen ja mekaaninen tarkastus

Tarkasta nostoliinan kunto ja toimivuus säännöllisin väliajoin. Tarkasta tuote aina pesun jälkeen. Varmista, että saumat ja materiaali ovat ehjät. Varmista, ettei kangas ole kulunut tai haalistunut. Suorita lopuksi koekuormitus varmistaaksesi, että soljet, vetolenkit jne. kestävät raskaan kuormituksen. Mikäli liinassa havaitaan vaurioita, tuote on vaihdettava uuteen.



Lue aina käyttöohje

Lue aina kaikkien henkilöiden siirtoon käytettävien apuvälineiden käyttöohjeet.

Säilytä käyttöohje tuotteen käyttäjien saatavilla.

Älä jätä potilasta yksin noston aikana.

Tehdäksesi nostosta mahdollisimman miellyttävän ja estääksesi nostettavaa liukumasta irti nostoliinasta, sovita nostoliina ensin huolellisesti. Pujota ensin nostoliinan selkäosan vetolenkit nostokaaren koukkuihin ja sen jälkeen reisu- ja häntäsuojat paikalleen. Käytä testattua nostokaarta.

Se yksikköön sisältyvä tuote, jolla on alin sallittu maksimikuormitus, määrää aina koko yksikön sallitun maksimikuormituksen. Tarkasta aina ennen käyttöä nostimen ja nostovälineiden sallitut maksimikuormitukset. Kysy tarvittaessa neuvoa jälleenmyyjältäsi.

Nostoliinan pujottaminen nostettavan istuessa pyörätuolissa/tuolissa tai vuoteella



1



2

1. Kannattele nostoliinaa toisella kädellä yläreunasta ja laita toinen käsi alareunassa olevaan pujottamistaskuun. Pyydä nostettavaa nojaamaan hieman eteenpäin, jolloin pujottaminen on helpompaa. Paina nostoliinan alareunaa nostettavan selän takaa kohti tuolin/pyörätuolin istuinta tai vuoteenpintaa, alareunan optimaalinen kohta on nostettavan häntäluun kohdalla. Tarkasta, että nostoliinan keskiliinajanauha seuraa selkärangan linjaa.

2. Ohjaa nostoliina huolellisesti nostettavan lonkkien alle. Tee tämä painamalla nostoliina pyörätuolin takakulmiin jäävään tilaan.



3



4

3. Vedä reisituet suoriksi reiden ulkopuolella. Istu nostettavan edessä ja vedä reisituen alareunasta, jolloin liina liukuu paikalleen lonkan ympärille. Paina samalla kevyesti nostettavan polvia niin, ettei hän pääse liukumaan eteenpäin.

4. Varmista, että reisituet ovat samanpituiset molemmilla puolilla ja aseta ne nostettavan reisien alle. Aseta reisituet ristikkäin ja ripusta ne nostokaaren koukkuihin. Aloita nosto. Kun remmit kiristyvät, pysäytä nosto ja tarkista, että kaikki on kunnossa ennen noston jatkamista.

Nostoliinan poistaminen nostettavan istuessa



1



2


1. Taita reisituki ja anna sen liukua polvitaipeen alta, kun vedät sitä ulkopuolelta.

2. Tartu nostoliinan yläreunasta molemmiin käsiin ja vedä liina pois.

Nostoliinan pujottaminen nostettavan maassa vuoteessa, paareilla tai lattialla



1

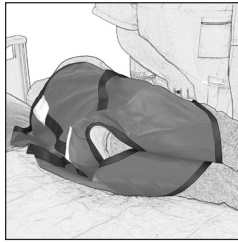


2

1. Käännä nostettava kylkimakuulle itseesi päin. Levitä nostoliina alustalle etiketti alaspäin ja liinan keskilinjaa selkärangan kohdalle. Aseta liinan yläreuna hartiatasolle ja alareuna häntäluun korkeudelle. Vie liina mahdollisimman kauas nostettavan alle. Työnnä selkäosan vetolenkki vartalon alle, jotta saat siitä otteen, kun käännät nostettavan takaisin selinmakuulle.

2. Säästääksesi työvaiheita voit kääntää liinan nostettavan ympärille jo kylkimakuulla ja pujottaa reisuudet polvien välistä valmiiksi, kun nostettava makaa itseesi päin.



3

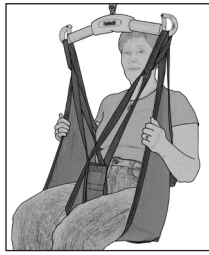

4

3. Käännä nostettava takaisin selinmakuulle ja vedä vetolenkit esille nostettavan alta.

4. Aseta reisuudet ristikkäin ja ripusta ne nostokaaren koukkuihin.

Aloita nosto. Kun remmit kiristyvät, pysäytä nosto ja tarkista, että kaikki on kunnossa ennen noston jatkamista.

Nostoliinan poistaminen makuuasennossa



1




2

1. Vedä reisuudet nostettavan polvien välistä.

2. Käännä nostettava kylkimakuulle itseesi päin ja työnnä liina vartalon alle niin, että käännettyäsi nostettavan takaisin selinmakuulle pystyt vetämään liinan hänen altaan.

Reisitukien pujottamisvaihtoehtoja

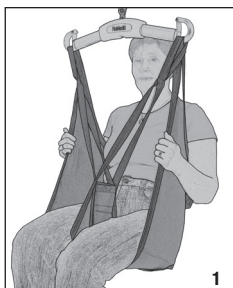

1. Tavallisin tapa on ristiä reisuudet ennen kiinnitystä nostokaareen koukkuihin.

2. Reisuudet voidaan kiinnittää nostokaaren koukkuihin myös ristimättä, jolloin nostettavan jalat pysyvät levitettynä. Tämä kuitenkin lisää vaaraa, että nostettava irtoaa nostoliinasta.

Materiaalit:

Polyesteri: Vetoluja materiaali, jossa pieni kitka. Kestää korkeita pesulämpötiloja.

Polyesteriverkko: Ilmava materiaali, joka voidaan tarvittaessa jättää nostettavan alle. Kestää korkeita pesulämpötiloja.

Muovitettu verkko: Tarkoitettu kylpy- ja suihkutustilanteisiin. Materiaalin voi desinfioida alkoholiliuoksella.

Hoito-ohje:

Lue tuotteen etiketistä.



Älä käytä huuhteluinetta.

Pidentääksesi tuotteen käyttöikää vältä kuivausrummun käyttöä.

Kokovalikoima

Nostoliinoja voi käyttää sekä 2- että 4-koukkuisissa nostokaarissa. On tärkeää varmistaa, että nostokaaren leveys vastaa nostettavan henkilön tilaa ja kokoa.

Käytä potilaskohtaisia nostoliinoja varmistaaksesi noston turvallisuuden ja nostettavan hygienian.

Koko		XXS/Harmaa	XS/Oranssi	S/Punainen	M/Keltainen	L/Vihreä	XL/Liila	XXL/Valkoinen
Suos. käyttäjän paino	kg	10–25	20–35	30–50	45–80	75–110	100–140	130–190
Nostoliinan korkeus	cm	60	60	77	85	90	92	92
Nostoliinan istuinleveys	cm	21	27	37	47	57	67	77

Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi, jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta ja sen käytöstä. Katso jälleenmyyjälletieto osoitteesta www.handicare.com. Varmista aina, että sinulla on käyttöohjeesta oikea versio. Uusimman käyttöohjeen voit ladata osoitteesta www.handicare.com

Handicare AB

Torshamnsgatan 35
SE-164 40 Kista
SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200
Fax: +46 (0)8 -557 62 299

Internet: www.handicare.com
E-mail: info@handicare.se

