

Max: 300kg

AmpSling est un harnais de levage qui est facile à mettre en place pour le personnel, en même temps qu'il donne un sentiment de sécurité à la personne qui l'utilise. Il est équipé de sections pour les jambes, ce qui permet au patient de ne pas être assis sur le harnais, mais de bénéficier d'un appui depuis le coccyx jusqu'aux épaules et sous les jambes. AmpSling est conçu pour autoriser les situations de levage les plus courantes quand on ne souhaite pas séparer les sections pour les jambes, par exemple pour lever un patient dont les jambes ont été amputées assez haut.

SystemRoMedic comporte un vaste choix de harnais de levage fonctionnels, confortables et de haute qualité, adaptés aux différents types d'auxiliaires de levage et aux différents besoins des utilisateurs. Les harnais de levage sont disponibles dans plusieurs matières différentes et dans les tailles de XXS à XXL. Tous les modèles, à la fois sûrs et très faciles à utiliser, peuvent supporter une charge maximale de 300 kg. Le choix du modèle et de la matière dépend de la situation de levage et des besoins du patient.



Contrôle de fonctionnement

Inspection visuelle et mécanique

Effectuer des inspections régulières du harnais de levage. Toujours contrôler après un lavage. Vérifier que les coutures et les matériaux sont intacts et non endommagés. Vérifier si le matériau est usé ou pali. Exercer une charge sur les boucles et les poignées et vérifier qu'elles supportent une contrainte élevée. S'il présente des signes d'usure, le produit doit être mis au rebut.



Toujours lire le manuel

Toujours lire les manuels de tous les auxiliaires utilisés lors d'un transfert de patient.

Conservé le manuel pour qu'il soit accessible aux utilisateurs du produit.

Ne pas laisser le patient sans surveillance pendant la phase de transfert.

Pour le bien-être de la personne et pour lui éviter de glisser du harnais, toujours vérifier minutieusement l'auxiliaire de levage. Accrocher d'abord les œillets du dos du harnais de levage, puis accrocher les œillets des appuis pour les jambes. Utiliser un étrier de levage éprouvé.

C'est toujours la charge maximale autorisée la plus faible de chaque produit respectif qui prévaut pour l'appareil de levage complet. Toujours vérifier la charge maximale autorisée de l'auxiliaire de levage et de ses accessoires avant d'utiliser l'appareil et prendre contact avec votre revendeur en cas de doute.

Mise en place du harnais de levage quand le patient est assis dans un fauteuil roulant ou sur un lit



1



2

1. Tenir le harnais de levage d'une main et placer l'autre main dans la poche placée au bord inférieur du harnais. Pour faciliter la manipulation et si cela est possible, le patient peut se pencher légèrement vers l'avant. Faire descendre le harnais de levage dans le dos du patient en le faisant glisser le long du dossier du fauteuil roulant ou sur le lit, jusqu'à atteindre le coccyx du patient. Le milieu du harnais de levage doit suivre la colonne vertébrale du patient.

2. Veiller à faire descendre le harnais de levage jusqu'au postérieur du patient ; pour ce faire, glisser le harnais dans l'espace situé aux angles arrière de l'assise du fauteuil roulant.

3. Avancer les appuis des jambes vers l'extérieur des cuisses. S'asseoir de préférence devant la personne et tirer le bord inférieur de l'appui des jambes pour faire glisser en place le harnais de levage autour du postérieur. Pour empêcher le patient de glisser vers l'avant du fauteuil, lui maintenir légèrement les genoux.


4. Une fois que vous avez vérifié que les appuis pour les jambes ont la même longueur des deux côtés, vous pouvez les placer sous les cuisses du patient. On place en général les deux sections pour les jambes sous les deux cuisses du patient.

Placer l'appui pour les jambes à travers les œilletons de guidage placés au bord du harnais de levage.

Commencer à lever l'étrier de levage, puis s'arrêter pour vérifier que tout est normal avant de soulever le patient de son support.




3

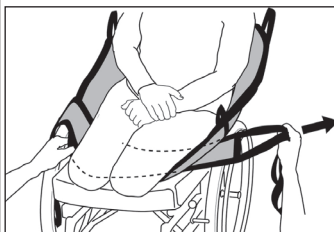

4

Pour retirer le harnais de levage quand le patient est assis

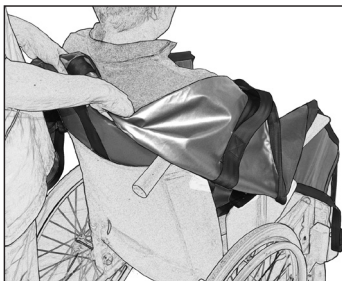


Plier l'appui pour les jambes et le faire glisser sur lui-même quand vous le faites passer sur l'extérieur de la cuisse.

Faire ensuite monter le harnais de levage derrière le dos du patient.

Pour mettre en place le harnais de levage quand le patient est couché sur son lit/un brancard ou au sol




1

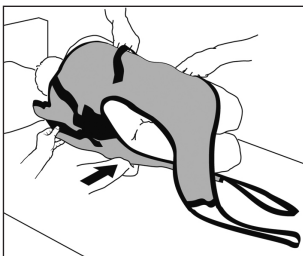

2

1. Retourner le patient vers soi. Placer le harnais de levage de sorte que l'étiquette soit tournée vers le support et que la ligne centrale suive la colonne vertébrale. Le bord supérieur de la partie arrière du harnais de levage doit être à la hauteur des épaules et le bord inférieur à la hauteur du coccyx. Placer le bord du harnais de levage aussi loin que possible sous le patient. Faire passer l'œillet de la partie arrière afin de pouvoir l'atteindre une fois que vous avez retourné le patient sur le harnais de levage.

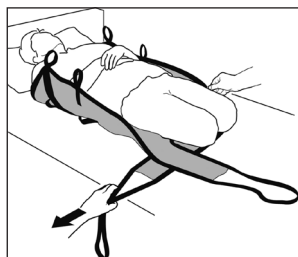

3




4

2. Pour réduire le nombre de phases nécessaires, vous pouvez replier la partie arrière vers le dos du patient et placer les appuis des jambes sous les jambes du patient quand il est tourné vers vous, pour ensuite les tirer vers l'avant quand le patient est sur le harnais de levage.

3. Retourner le patient sur le harnais de levage et tirer vers l'avant la partie arrière et l'appui pour les jambes. Les appuis sous les jambes sont maintenant placés avec recouvrement sous le patient.

4. Placer l'appui pour les jambes à travers les œillets de guidage placés au bord du harnais de levage. Commencer à lever l'étrier de levage, puis s'arrêter pour vérifier que tout est normal avant de soulever le patient de son support.

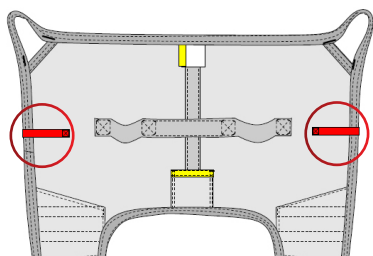

Important!

Ne jamais accrocher les œillets de guidage à l'étrier de levage.

Pour retirer le harnais de levage quand le patient est couché



Tourner le patient vers soi et replier le harnais sous le patient de sorte que le tissu glisse sur lui-même quand on le tire après avoir retourné le patient.


Autres mises en place possibles pour les appuis des jambes du harnais de levage



1



2

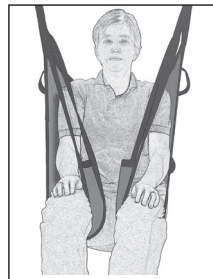

3

1. Placer les soutiens pour les jambes en les croisant sous les jambes et les faire passer à travers les œillets de guidage placés au bord du harnais de levage.
2. Les appuis pour les jambes peuvent être croisés avant d'être accrochés sur l'étrier de levage. Ceci n'est pas recommandé pour une personne qui a été amputée au niveau du genou ou plus haut sur la jambe.
3. On peut également choisir de ne pas croiser les appuis pour les jambes, mais il faut alors faire attention, car cela risque de faire glisser le patient du harnais. Ceci n'est pas recommandé pour une personne qui a été amputée au niveau du genou ou plus haut sur la jambe.

Matériaux :

Polyester : Matériau résistant et présentant une friction faible. Supporte des températures de lavage élevées.

Filet polyester : Matériau aéré pouvant au besoin être laissé en place sous l'utilisateur. Supporte des températures de lavage élevées.

Conseils d'entretien :

Lire l'étiquette-conseil du harnais de levage.



Ne pas utiliser de produit de rinçage adoucissant.

Éviter le sèche-linge pour augmenter la longévité du produit.

Information sur les tailles

Les harnais de levage peuvent souvent être utilisés pour suspension par 2 et 4 points. Il est important d'être prudent et de s'assurer que la largeur de l'étrier de levage est adaptée à la taille du harnais de levage et aux besoins de l'utilisateur. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, utiliser des harnais de levage individuels pour chaque utilisateur spécifique.

Taille	XS/Orange	S/Rouge	M/Jaune	L/Vert	XL/Lilas	XXL/Blanc
Poids brut rec. lbs	40-88	77-132	110-176	154-242	220-286	264,5-397
de l'utilisateur Kg	20-40	35-60	50-80	70-110	100-130	120-180
Hauteur du harnais de levage	inch 33,5	35,5	38	39,5	39,5	39,5
cm	85	90	97	100	100	100

Si vous avez des questions sur le produit et son utilisation, veuillez contacter votre distributeur local. Prière de consulter le site www.handicare.com pour la liste complète des distributeurs. Veiller à toujours disposer de la version correcte du manuel. La version la plus récente peut être téléchargée sur notre site Internet : www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-557 62 200

Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

