

**Carico massimo: 300kg**

L'imbracatura AmpSling è facile da applicare e dona al paziente un senso di sicurezza. È dotata di due supporti per le gambe, in modo che il paziente non rimanga seduto sull'imbracatura. Supporta il paziente dal coccige fino al capo e sotto le gambe. L'imbracatura AmpSling è progettata per le più comuni situazioni di sollevamento, anche nei casi in cui è preferibile l'utilizzo di un'imbracatura senza supporti per le gambe separate, ad esempio per sollevare un paziente che presenta amputazione ad entrambi gli arti inferiori.

Il sistema RoMedic è suddiviso in quattro categorie: trasferimento, riposizionamento, supporto e sollevamento.



## **Controllo funzionale**

Controllare regolarmente le condizioni e il funzionamento dell'imbracatura, in particolare dopo ogni lavaggio.

Controllare che il tessuto non sia usurato, danneggiato o sbiadito.

In presenza di segni di usura, il prodotto non deve essere utilizzato e deve essere smaltito in caso di dubbi sulla sua sicurezza.



## **Leggere sempre le istruzioni**

Leggere le istruzioni di tutti i dispositivi di assistenza utilizzati per il trasferimento del paziente.

Scegliere con attenzione la taglia dell'imbracatura, in modo da evitare disagi e il rischio che il paziente scivoli fuori dall'imbracatura. Se l'imbracatura è troppo larga, sussiste il rischio che il paziente scivoli fuori.

Non lasciare il paziente da solo durante il sollevamento.

Applicare gli anelli posteriori dell'imbracatura prima di applicare gli anelli del supporto gambe. Usare sempre un bilancino appropriato.

## Applicazione dell'imbracatura quando il paziente è seduto su una sedia/sedia a rotelle o sul letto:



1



2

1. Tenere l'imbracatura con una mano e inserire l'altra mano nella tasca situata sul bordo inferiore dell'imbracatura. Questa operazione risulta più semplice se il paziente si piega in avanti autonomamente o con l'aiuto degli operatori. Far scivolare l'imbracatura verso il basso dietro la schiena del paziente, lungo lo schienale della sedia/sedia a rotelle o lungo il letto, fino a raggiungere il coccige del paziente. La sezione centrale dell'imbracatura deve seguire la colonna vertebrale del paziente.

2. Stendere con cura l'imbracatura verso il basso fino a raggiungere le anche del paziente. Per farlo, spingere l'imbracatura nello spazio in corrispondenza degli angoli posteriori laterali della seduta della sedia a rotelle.

3. Tirare i supporti gambe facendoli scorrere lungo la parte esterna delle cosce. Posizionarsi davanti al paziente e tirare l'estremità inferiore dei supporti gambe in modo che l'imbracatura si posizioni correttamente attorno ai fianchi. Esercitare una lieve pressione sulle ginocchia del paziente in modo da evitare che scivoli in avanti sulla sedia.

4. Dopo aver controllato che i supporti per le gambe siano della stessa lunghezza su entrambi i lati, posizionarli sotto le cosce del paziente. Solitamente i due supporti gambe si posizionano sotto entrambe le cosce del paziente. Far passare i supporti per le gambe attraverso gli appositi anelli presenti sul bordo dell'imbracatura.

Iniziare a sollevare il bilancino, poi fermarlo in modo da verificare che tutto sia a posto prima di sollevare il paziente dalla superficie sottostante.




3



4

## Rimozione dell'imbracatura quando il paziente è in posizione seduta:

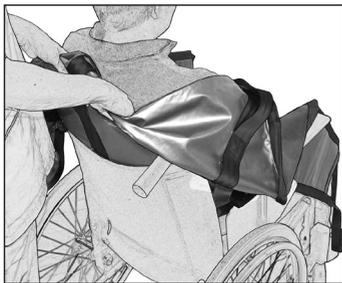


Piegare il supporto gambe e farlo scorrere sotto se stesso estraendolo da sotto la coscia del paziente.

Successivamente tirare l'imbracatura verso l'alto dietro la schiena del paziente.

## Applicazione dell'imbracatura quando il paziente è sdraiato sul letto, su una barella o sul pavimento:




1

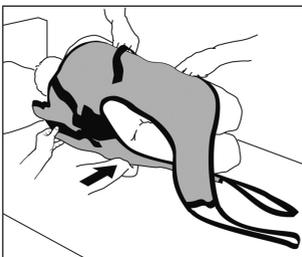

2

1. Girare il paziente verso l'operatore. Posizionare l'imbracatura in modo tale che l'etichetta del prodotto sia rivolta verso la superficie sottostante e la sezione centrale dell'imbracatura si trovi in corrispondenza della colonna vertebrale. Il bordo superiore della sezione posteriore dell'imbracatura deve trovarsi all'altezza delle spalle e il bordo inferiore all'altezza del coccige. Posizionare l'imbracatura il più possibile sotto il paziente. Spingere sotto l'anello della parte alta dell'imbracatura, in modo da afferrarlo una volta girato nuovamente il paziente.

2. Per semplificare la procedura di applicazione, è possibile posizionare la sezione posteriore dell'imbracatura sulla schiena del paziente e posizionare i supporti gambe tra le ginocchia del paziente quando è rivolto verso l'operatore, in modo da poterli tirare quando il paziente si trova sull'imbracatura.

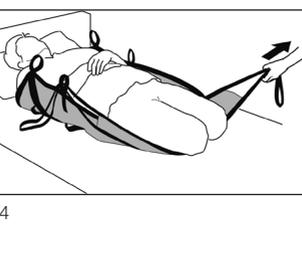


4

3. Girare il paziente sull'imbracatura e tirare la sezione posteriore e i supporti per le gambe. A questo punto i supporti per le gambe sono sovrapposti sotto il paziente.

4. Far passare i supporti per le gambe attraverso gli appositi anelli presenti sul bordo dell'imbracatura. Iniziare a sollevare il bilancino, poi fermarlo in modo da verificare che tutto sia a posto prima di sollevare il paziente dalla superficie sottostante.

### 2 Dopo la toilette:

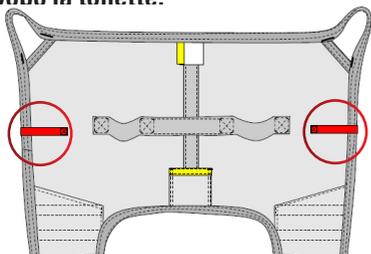

## Rimozione dell'imbracatura quando il paziente è sdraiato in posizione supina:



Girare il paziente verso l'operatore e piegare l'imbracatura sotto il paziente in modo tale da estrarla agevolmente quando il paziente è rigirato sull'imbracatura.


## Applicazioni alternative dei supporti gambe:



1



2

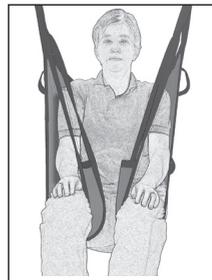

3

1. Posizionare i supporti per le gambe tra le ginocchia del paziente.

2. Girare il paziente verso l'operatore e piegare l'imbracatura sotto il paziente in modo tale da estrarla agevolmente quando il paziente è rigirato sull'imbracatura.

### Materiale:

Poliestere: materiale resistente a basso attrito.

### Pulizia e manutenzione del prodotto:

Leggere l'etichetta del prodotto.



Non usare detersivi.  
Per garantire la massima durata del materiale, asciugare l'imbracatura appesa o nell'asciugatrice a basso calore.

### Informazioni sulla taglia

Le imbracature spesso possono essere usate con bilancini a 2 e a 4 punti di sollevamento.

È fondamentale accertarsi che la larghezza del bilancino sia adatta alla taglia dell'imbracatura e alle condizioni e alle capacità funzionali del paziente. Utilizzare imbracature specifiche per il paziente (monopaziente) nei casi in cui il controllo delle infezioni abbia la massima priorità.

Misura		XS/ Arancione	S/ Rossa	M/ Gialla	L/ Verde	XL/ Porpora	XXL/ Bianco
Consigliato	lbs	40-88	77-132	110-176	154-242	220-286	264,5-397
Peso paziente	kg	20-40	35-60	50-80	70-110	100-130	120-180
Altezza dell'imbracatura	Pollici Mm	850	900	970	1000	1000	1000

In caso di dubbi, contattare il vostro rappresentante Handicare per provare i prodotti, per consulenza ed informazioni. Per ulteriori informazioni, chiedete al vostro specialista di prodotto o rappresentante, oppure visitate il sito [www.handicare.com](http://www.handicare.com). Assicuratevi di avere sempre la versione più aggiornata del manuale. I manuali sono disponibili e scaricabili dal nostro sito internet [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8-557 62 200

SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

