

Max: 300kg



De zorgverlener kan LowBackSling makkelijk plaatsen en hij geeft de patiënt een veilig gevoel. De band heeft beenstukken waardoor patiënten niet op de tilband zitten. De tilband biedt in plaats daarvan steun vanaf de stuit tot onder de armen en onder de benen. LowBackSling is ontworpen voor gebruik wanneer de patiënt controle over het bovenlichaam, enz. heeft.

SystemRoMedic heeft een groot aantal functionele en comfortabele tilbanden van hoge kwaliteit die kunnen worden aangepast voor verschillende tiltechnieken en voor patiënten met verschillende behoeften. De tilbanden zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en maten, variërend van XXS tot XXL. Alle modellen zijn veilig en zeer gemakkelijk te gebruiken en zijn geschikt voor het tillen van patiënten met een gewicht van maximaal 300 kg. De keuze van model en materiaal is afhankelijk van de behoeften van de patiënt en de verplaatsingssituatie.



Functionele inspectie

Visuele en mechanische inspectie

Controleer de toestand en het functioneren van de tilband regelmatig. Inspecteer het product altijd na het wassen. Controleer of de naden en het materiaal niet beschadigd zijn. Controleer of de stof niet versleten of vervaald is. Belast het apparaat en controleer of alle klemmen, handgrepen, enz. bestand zijn tegen zware belasting. Als er tekenen van slijtage zijn, mag het product niet meer gebruikt worden.




Lees altijd de handleiding

Lees de handleidingen van alle bij verplaatsingen gebruikte hulpmiddelen.
Bewaar de handleiding zodat deze voor gebruikers van het product bij de hand is.
Laat een patiënt tijdens het verplaatsen nooit zonder toezicht.

Kijk om te voorkomen dat de patiënt oncomfortabel is of uit de tilband glijdt altijd goed of de tilband goed past. Bevestig eerst de achterste lussen van de tilband aan het tiljuk en breng vervolgens de steunlussen aan. Gebruik een tiljuk dat getest is.

Het onderdeel met de laagste maximale belasting is altijd bepalend voor de maximale belasting van het gehele systeem. Controleer voor gebruik altijd de maximale belasting voor de lift en de accessoires. Neem bij vragen contact op met uw leverancier.

De tilband aanbrengen wanneer de patiënt in een (rol)stoel of op bed zit

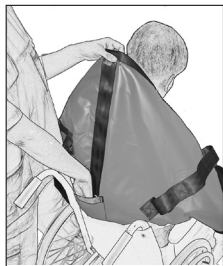

1



2

1. Houd de tilband in de ene hand en plaats de andere hand in de zak aan het onderste uiteinde van de tilband. Dit gaat gemakkelijker wanneer de patiënt voorover leunt of wanneer deze geholpen wordt om wat voorover te leunen. Breng de tilband omlaag achter de rug van de patiënt, door de band langs de rug van de stoel/rolstoel of langs het bed te glijden, het liefst helemaal tot de stuit. Het middenstuk van de tilband zou nu langs de ruggengraat van de patiënt moeten lopen.

2. Zorg dat u de tilband omlaag brengt tot de heupen van de patiënt. Doe dit door de tilband in de ruimtes in de achterste hoeken van de rolstoelzitting te duwen.

3. Trek de beensteunen langs de buitenkant van de dijen naar buiten. Ga tegenover de patiënt zitten en trek aan de onderste rand van de beensteun, zodat de tilband goed rond de heupen komt te zitten. Door licht tegendruk te geven tegen de knieën van de patiënt, voorkomt u dat hij/zij naar voren schuift in de stoel.

4. Controleer of de beensteunen even lang zijn aan beide kanten en plaats ze vervolgens onder de dijen van de patiënt. Kruis de beensteunen en haak ze aan het tijluk.

Breng de lift omhoog en stop wanneer de banden straks komen te staan. Controleer of alles in orde is voordat u verder gaat met tillen.



3



4

De tilband verwijderen wanneer de patiënt zit



1



2


1. Vouw de beensteun en schuif deze onder de dijen van de gebruiker waarna u de steun bij de buitenkant van de dij naar buiten trekt.

2. Trek vervolgens de tilband omhoog achter de rug van de patiënt.

De tilband aanbrengen wanneer de patiënt op bed, een brancard of de vloer ligt



1

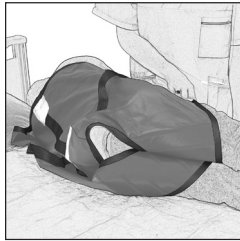


2

1. Draai de patiënt naar u toe. Plaats de tilband zo, dat het productlabel naar het onderliggende oppervlak wijst en dat het middenstuk van de tilband de ruggengraat volgt. De bovenrand van het rugstuk van de tilband moet op schouderhoogte zitten en de onderrand op hoogte van de stuit. Plaats de rand van de tilband zo ver mogelijk onder de patiënt. Duw de lus van het rugstuk onder de patiënt, zodat u erbij kunt wanneer u de patiënt weer op de tilband draait.

2. Om het aantal stappen bij het aanbrengen te beperken, kunt u het rugstuk tegen de rug van de patiënt vouwen en de beensteunen tussen de knieën van de patiënt plaatsen wanneer deze naar u toe gedraaid is. Trek ze vervolgens naar voren wanneer de patiënt op de tilband ligt.



3

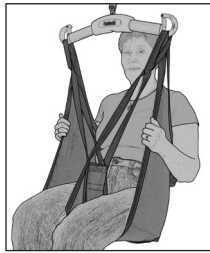

4

3. Draai de patiënt terug op de tilband en trek het rugstuk en de beensteun naar buiten.

4. Kruis de beensteunen en haak ze aan het tiljuk.

Breng de lift omhoog en stop wanneer de banden strak komen te staan. Controleer of alles in orde is voordat u verder gaat met tillen.

De tilband verwijderen wanneer de patiënt ligt



1





2

1. Leg de beensteunen tussen de knieën van de patiënt.

2. Draai de patiënt naar u toe en schuif de tilband onder de patiënt, zodat de stof naar u toe glijdt wanneer u deze naar buiten trekt nadat u de patiënt hebt teruggedraaid.

Alternatief voor het aanbrengen van de beensteunen van de tilband

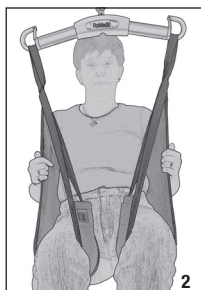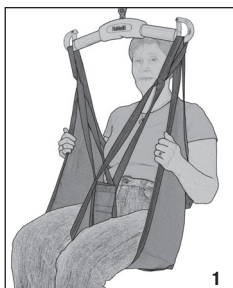

1. Standaard worden de beensteunen gekruist voordat ze aan het tiljuk gehaakt worden.
2. Voor betere toegang tot het perineum van de patiënt, is het mogelijk om de beensteunen niet te kruisen. Denk er echter aan dat hierbij het risico bestaat dat de patiënt uit de tilband glijdt.

Materiaal:

Polyester: Duurzaam materiaal met weinig wrijving. Kan op hoge temperaturen gewassen worden.

Polyester net: Een luchtig materiaal dat indien nodig onder de patiënt kan blijven zitten. Kan op hoge temperaturen gewassen worden.

Geplastificeerde netstof: Materiaal bedoeld voor bad- en douchesituaties. Het materiaal kan ontsmet worden met ontsmettingsalcohol.

Onderhoud van het product:

Lees het productlabel.



Gebruik geen wasverzachters.
Niet in de droger drogen om de levensduur van het product te verlengen.

Maten

Tilbanden kunnen vaak gebruikt worden met zowel tweepunts- als vierpuntsophanging. Het is van essentieel belang dat de breedte van het tiljuk geschikt is voor de maat van de tilband en de toestand en capaciteit van de patiënt.

Gebruik patiëntspecifieke tilbanden voor een goede veiligheid en hygiëne.

Maat		XXS/Grijs	XS/Oranje	S/Rood	M/Geel	L/Groen	XL/Paars	XXL/Wit
Aanbev. gebr.-gewicht	kg	10-25	20-35	30-50	45-80	75-110	100-140	130-190
Tilband: totale hoogte	cm	60	60	77	85	90	92	92
Tilbandzitting: afmeting	cm	21	27	37	47	57	67	77

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier als u vragen heeft over het product en het gebruik ervan. Zie www.handicare.com voor een volledige lijst met leveranciers. Zorg dat u altijd beschikt over de juiste versie van de handleiding. U kunt de recentste versies van handleidingen downloaden van onze website, www.handicare.com.

Handicare AB

Torshamnsgatan 35
SE-164 40 Kista
SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com
E-mail: info@handicare.se

