


# BackBoardStrap

SystemRoMedic™



Manual - Danske

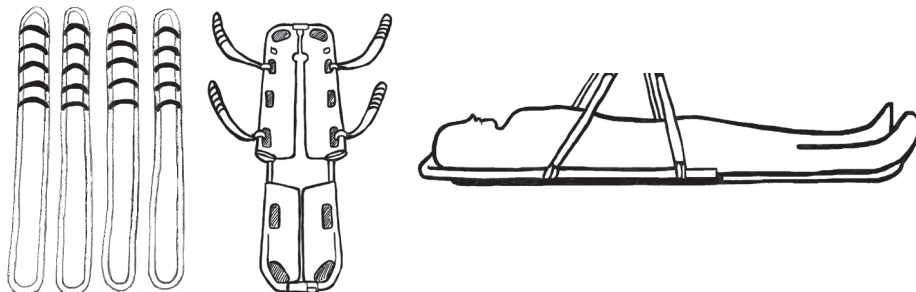

**Maks: 300kg**

BackBoardStraps er udviklede til – sammen med Ferno Scoop Stretcher 065 EXL – at muliggøre mekaniske løft med en manuel bære inden for akutsygepleje. Stroppeerne skal være monterede på Ferno Scoop Stretcher i henhold til denne manual. BackBoardStraps består af fire uafhængige løftestroppe med seks alternative ophængningsløkker på den ene side af hver strop for at kunne balancere baren under løftet. BackBoardStraps sættes fast i håndtagshullerne med en løkke (to på hver side) og placeres derefter på løfteågets kroge.

I SystemRoMedic findes et bredt udvalg af funktionelle og bekveme løftesejl af høj kvalitet, tilpassede forskellige typer løft og brugere med forskellige behov. Løftesejlene findes i flere forskellige materialer og i størrelser fra XXS til XXL. Alle modeller er både sikre og meget lette at anvende, og de kan løfte brugere op til 300 kg. Valg af model og materiale bestemmes af løftesituationen og brugerens behov.



## Funktionskontrol

### Visuel og mekanisk inspektion

Foretag regelmæssige funktionskontroller af løftesejlet. Kontroller altid efter vask. Kontroller, at sømme og materiale er helt og ikke udviser tegn på beskadigelse. Kontroller, om materialet er udsat for slitage eller er bleget. Belast og kontroller, at spænder og håndtag kan holde til en kraftig belastning. Ved tegn på slitage skal produktet kasseres.



## Læs altid manualen

Læs altid manualerne for alle hjælpemidler, som anvendes ved en forflytning.

Opbevar manualen tilgængeligt for brugere af produktet.

Efterlad ikke brugeren alene under forflytningsmomentet.


Undgå risikoen for, at brugeren glider ud eller føler sig ubehageligt tilpas ved at være omhyggelig med afprøvningen af løftesejlet. Hægt først løftesejlens rygstroppe på løfteåget; hægt derefter benstøttens løkker på. Anvend afprøvet løfteåg.

Det er altid den lavest tilladte max. belastning på det respektive produkt i den sammensatte løfteenhed, der styrer.

Kontroller altid den tilladte max. belastning på løfte og løftetilbehør inden brug, og kontakt din forhandler ved spørgsmål.



## Placering og brug

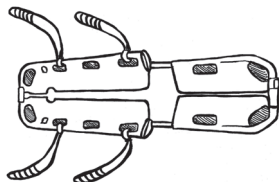

Stropperne fastgøres i hullerne på bårens sider på højde med patientens hofter og skuldre.

De monteres ved at stropperne trækkes gennem hullet og derefter gennem sig selv som en løkke.

Stropperne monteres to på hver side af båren og placeres derefter på løfteåget. Tilpas løfteågets bredde efter brugeren for at undgå ubehag.

Ved at vælge nogen af de seks alternative løfteløkker, balanceres båren før løftet.

Påbegynd løftet, stop og sørg for, at båren er velafbalanceret i horisontal position. Hvis den er det, fortsættes løftet, hvis ikke, så sænk ned, og reguler med de alternative løkker.

Individuelle tests skal udføres i hver løftesituation for at sikre, at løftet er balanceret.



Vær omhyggelig med horisontal position!

Anvend altid sikkerhedsbæltene i henhold til manualen for Ferno Scoop Stretcher!

### Før løft:

Læs og følg manualen for Ferno Scoop Stretcher.

Planlæg løftet og beslut, hvor mange medhjælpere, som er nødvendige for øget sikkerhed.


Løft aldrig højere end nødvendigt.

Efterlad aldrig brugeren alene under løftemomentet.

## Mål

A: 110 cm

B: 8 cm

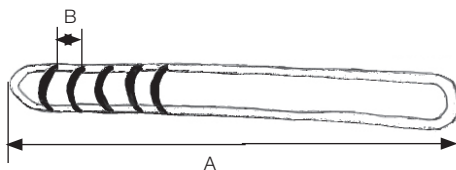

## Vedligeholdelse:

Læs på løftesejlets mærkat.



Anvend ikke skyllemiddel.

Undgå tørretumbling for øget levetid.

Ved spørgsmål om produkterne og deres anvendelse, kontakt din lokale forhandler. Se [www.handicare.com](http://www.handicare.com) for en komplet forhandlerliste. Sørg for, at du altid har den korrekte version af manualen. Den seneste version kan downloades fra vores hjemmeside [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200

Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

