

BackBoardStraps a été développé pour, conjointement avec Ferno Scoop Stretcher 065 EXL, permettre d'effectuer un levage mécanique à l'aide d'un brancard à main dans les soins d'urgence. Les sangles doivent être placées sur Ferno Scoop Stretcher conformément à ces instructions. BackBoardStraps consiste en quatre sangles de levage indépendantes, avec 6 œillets d'accrochage possibles placés sur l'un des côtés de chaque sangle, afin de pouvoir équilibrer le brancard pendant le levage. BackBoardStraps s'accroche dans les trous des poignées (deux de chaque côté) et s'installe ensuite dans les crochets de l'étrier de levage.

SystemRoMedic comporte un vaste choix de harnais de levage fonctionnels, confortables et de haute qualité, adaptés aux différents types d'auxiliaires de levage et aux différents besoins des utilisateurs. Les harnais de levage sont disponibles dans plusieurs matières différentes et dans les tailles de XXS à XXL. Tous les modèles, à la fois sûrs et très faciles à utiliser, peuvent supporter une charge maximale de 300 kg. Le choix du modèle et de la matière dépend de la situation de levage et des besoins du patient.



Contrôle de fonctionnement

Inspection visuelle et mécanique

Effectuer des inspections régulières du harnais de levage. Toujours contrôler après un lavage. Vérifier que les coutures et les matériaux sont intacts et non endommagés. Vérifier si le matériau est usé ou pali. Exercer une charge sur les boucles et les poignées et vérifier qu'elles supportent une contrainte élevée. S'il présente des signes d'usure, le produit doit être mis au rebut.



Toujours lire le manuel

Toujours lire les manuels de tous les auxiliaires utilisés lors d'un transfert de patient.

Conserver le manuel pour qu'il soit accessible aux utilisateurs du produit.

Ne pas laisser le patient sans surveillance pendant la phase de transfert.

Pour le bien-être de la personne et pour lui éviter de glisser du harnais, toujours vérifier minutieusement l'auxiliaire de levage. Accrocher d'abord les œillets du dos du harnais de levage, puis accrocher les œillets des appuis pour les jambes.

Utiliser un étrier de levage éprouvé.


C'est toujours la charge maximale autorisée la plus faible de chaque produit respectif qui prévaut pour l'appareil de levage complet. Toujours vérifier la charge maximale autorisée de l'auxiliaire de levage et de ses accessoires avant d'utiliser l'appareil et prendre contact avec votre revendeur en cas de doute.

Mise en place et utilisation



Les sangles se fixent dans les trous placés sur les côtés du brancard, à la hauteur des hanches et des épaules du patient.

Pour ce faire, les passer dans le trou, puis les repasser sur elles-mêmes, comme à travers un œillet.

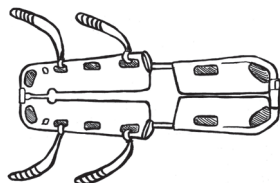

Les sangles se montent à raison de deux de chaque côté du brancard, puis sur l'étrier de levage. Pour lui éviter tout désagrément, adapter la largeur de l'étrier de levage en fonction du patient.



Équilibrer le brancard avant le levage en choisissant l'un des six œillets de levage possibles.

Commencer le levage, arrêter et vérifier que le brancard est bien équilibré en position horizontale. Si c'est le cas, continuer le levage, sinon, descendre et régler en utilisant d'autres œillets.

Un test individuel doit être effectué dans chaque situation de levage pour s'assurer que le levage est bien équilibré.



Veiller à obtenir une position bien horizontale !
Toujours utiliser les ceintures de sécurité selon le manuel de Ferno Scoop Stretcher !

Avant le levage :

Lire et appliquer le manuel de Ferno Scoop Stretcher.

Planifier le levage et décider du nombre d'assistants nécessaires pour avoir une sécurité satisfaisante.


Ne jamais lever plus haut que nécessaire.

Ne jamais laisser l'utilisateur sans surveillance pendant la phase de levage.

Dimensions

A: 110 cm

B: 8 cm

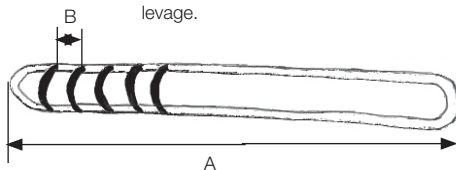

Conseils d'entretien :

Lire l'étiquette-conseil du harnais de levage.



Ne pas utiliser de produit de rinçage adoucissant.

Éviter le sèche-linge pour augmenter la longévité du produit.

Si vous avez des questions sur le produit et son utilisation, veuillez contacter votre distributeur local. Prière de consulter le site www.handicare.com pour la liste complète des distributeurs. Veiller à toujours disposer de la version correcte du manuel. La version la plus récente peut être téléchargée sur notre site Internet : www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200

SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

