

RisePorto[™]
System**RoMedic**[™]

De ^{nieuw}
generatie

Veilige en flexibele tiloplossingen
voor elke situatie

Altijd overal

RisePorto is een draagbare plafondlift met een ongewoon klein formaat en een zeer laag gewicht. Tegelijkertijd is de lift sterk, veilig en zeer gemakkelijk te gebruiken voor zekere en flexibele tiloplossingen die gekenmerkt worden door prestaties, eenvoud en comfort.

Twee modellen voor elke situatie en alle zorgvragers

RisePorto is verkrijgbaar in twee uitvoeringen met verschillende tilcapaciteit. RisePorto300 is bedoeld voor zorgvragers met een gewicht van maximaal 140 kg en RisePorto450 is bedoeld voor zorgvragers met een gewicht van maximaal 205 kg. Gebruik RisePorto in combinatie met de juiste tilaccessoires voor het veilig, comfortabel en individueel aangepast tillen van zorgvragers bij zittende of liggende verplaatsingen van en naar bed, rolstoel of toilet. RisePorto heeft een groot tilbereik en het is mogelijk om zeer laag of zeer hoog te tillen, waardoor de lift een uitstekende oplossing is voor het tillen van de vloer of voor loop- en statraining. RisePorto kan ook gebruikt worden om zorgvragers gemakkelijk van de ene kamer naar de andere te verplaatsen.

Voor alle railsystemen

RisePorto kan worden gebruikt op alle soorten rails. Zowel op vaste railsystemen (basisrailsystemen met of zonder bochten en schakelingen, of railsystemen met volledige kamerdekking) als op vrijstaande liftstandaards. Een hendel voor bevestiging, verkrijgbaar als accessoire, vergemakkelijkt de montage en demontage van de lifteenheid op het railsysteem, waardoor het verplaatsen van RisePorto tussen verschillende railsystemen en kamers makkelijk is als er op verschillende locaties getild moet worden.

In elke situatie en in alle soorten kamers

Dankzij het ontwerp en de functionaliteit van RisePorto is de lift het perfecte hulpmiddel bij thuiszorg, in zorginstellingen en bij andere vormen van woonzorg. Maar RisePorto functioneert eigenlijk goed in iedere omgeving. De lift kan in alle kamertypes worden gebruikt waar het nodig is om zorgvragers te tillen of te verplaatsen van de ene eenheid naar de andere. In kleine kamers met beperkte ruimte waar mobiele liften moeilijk te gebruiken zijn, is RisePorto een perfecte oplossing.

Compact en lichtgewicht

RisePorto heeft een ongewoon klein formaat en een zeer laag gewicht. Het handzame formaat biedt vele praktische voordelen en in combinatie met het moderne en elegante ontwerp van de lifteenheid kan deze ook bijdragen aan een professionele en zeer functionele zorgomgeving met een goede en menselijke sfeer.

RisePorto is een modern en stijlvol alternatief voor veilige en flexibele tiloplossingen in elke situatie. Dezelfde lifteenheid kan worden gebruikt op een groot aantal locaties wat zorgt voor een hoog gebruik van RisePorto, waardoor handmatig tillen en werkgerelateerd letsel en ongelukken worden voorkomen.





Geïntegreerde handgrepen voor
gemakkelijk vervoer



Geïntegreerde, opklapbare tiljuk

RisePorto heeft een modern en elegant ontwerp met zuivere vormen en gladde oppervlakken. Het ontwerp is aantrekkelijk op een discrete manier en wat belangrijker is, het is erg slim. Het ontwerp van RisePorto biedt verschillende functionele en praktische voordelen waardoor de lifteenheid eenvoudig te gebruiken en zeer gemakkelijk te reinigen is.

Aantrekkelijk & slim

Geïntegreerd, opklapbaar tiljuk

RisePorto heeft een tiljuk die in de lifteenheid geïntegreerd is. Het tiljuk zit aan de korte kanten van de lifteenheid en de haken zijn opklapbaar voor het eenvoudig gebruiken, bedienen, vervoeren en opslaan van de lift. Een magneet houdt de haken van het tiljuk in de opgeklapte positie. Uitgeklapt heeft het tiljuk een standaardbreedte die geschikt is voor de meeste zorgvragers en tilsituaties. De flexibele veiligheidsgrendels maken het mogelijk om tilbanden veilig, snel en gemakkelijk te bevestigen en te verwijderen. Ze voorkomen bovendien dat de banden van de tilband loskomen van het tiljuk.

Geïntegreerde handgrepen voor gemakkelijk vervoer

Twee ergonomische, geïntegreerde handgrepen verhogen het gebruiksgemak bij het bedienen en vervoeren van de lifteenheid tussen verschillende railsystemen. De handgrepen zijn ook zeer geschikt om de lift tijdens het tillen vast te houden en bij te sturen terwijl de zorgverlener dicht bij de zorgvrager kan blijven.

Lus voor kamerverplaatsing



Bedieningspaneel op de lifteenheid



Lus voor kamerverplaatsing

RisePorto is uitgerust met een lus voor kamerverplaatsing die gebruikt wordt met een riem voor kamerverplaatsing, verkrijgbaar als accessoire, voor het eenvoudig verplaatsen van zorgvragers tussen verschillende kamers en railsystemen.

Ergonomische handbediening

RisePorto is zeer eenvoudig te bedienen, ofwel met de bijbehorende handbediening, ofwel direct op de lifteenheid zelf. Hierdoor kan de zorgverlener dicht bij de zorgvrager blijven voor een verhoogd gevoel van veiligheid en comfort tijdens de volledige duur van het tillen.

De ergonomische en gebruikersvriendelijke handbediening heeft duidelijk gemarkeerde en intuïtief geplaatste knoppen voor het in-/uitschakelen en omlaag/omhoog bewegen van de lifteenheid. De handbediening kan zeer gemakkelijk zonder gereedschap aangesloten, verwijderd of vervangen worden.

Bedieningspaneel op de lifteenheid

Het bedieningspaneel aan de voorkant van de lifteenheid heeft duidelijk gemarkeerde knoppen voor het omlaag en omhoog bewegen van de lifteenheid waardoor het de handbediening goed aanvult. Het bedieningspaneel heeft ook verlichte indicatoren voor de accustatus en of onderhoud nodig is.



Veilig & praktisch

RisePorto weegt slechts 5,8 kg. Het handzame formaat en het lage gewicht zijn grote voordelen die montage, demontage, vervoer en opslag van de lifteenheid sterk vereenvoudigen.

Daarnaast beweegt RisePorto stil en zacht en de vele functies zorgen voor maximaal comfort en maximale veiligheid, zowel voor zorgvrager als zorgverlener.



360° draaiende trolley


RisePorto wordt gebruikt in combinatie met een 360° draaiende trolley die apart besteld wordt. Met de trolley kan RisePorto draaien tijdens het gebruik, waardoor verdraaiing van de tilriem wordt voorkomen. Met extra trolleys kan een plafonddlift gemakkelijk verplaatst worden tussen verschillende kamers en railsystemen.

In combinatie met riemen voor kamerverplaatsing, die verkrijgbaar zijn als accessoire, is het met een extra trolley ook mogelijk om zorgvragers van de ene kamer naar de andere te verplaatsen.



Comfort en veiligheid

Alle modellen van RisePorto zijn uitgerust met een handmatige noodstop en een elektrische en handmatige nooddalffunctie. RisePorto is ook beveiligd tegen overbelasting en een te hoge snelheid. Verder is er een schakelaar die de motor automatisch stopt als de tilriem niet belast is en slap komt te hangen. Bovendien zorgen de zachte start en stop voor meer veiligheid en hoger comfort bij de zorgvrager.

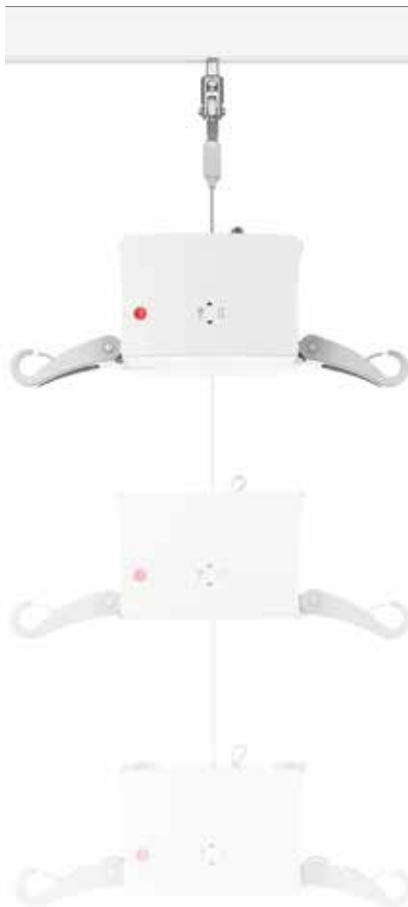

Efficiënte riemcontrole

RisePorto heeft een efficiënte controlefunctie waarmee het verdraaien van de tilriem voorkomen wordt, waardoor slijtage beperkt blijft. Met deze functie wordt tijd bespaard en hoeft u zich geen zorgen te maken. De functie zorgt bovendien voor een langere levensduur van de tilriem.



Ingebouwde accu met hoge capaciteit die lang meegaat

RisePorto is uitgerust met een milieuvriendelijke, ingebouwde NiMH-accu met hoge capaciteit voor urenlang werken en tillen voordat opladen nodig is. De accu-indicator op de lifteenheid geeft samen met geluidssignalen aan of de accu opgeladen moet worden. De oplaadaansluiting is gemakkelijk bereikbaar aan de zijkant van de lifteenheid en de lift kan aan het railsysteem opgeladen worden. Om de accu nog verder te sparen en het opladen nog verder uit te stellen, maar ook om te zorgen dat de lifteenheid altijd opgeladen en beschikbaar is, wordt RisePorto automatisch uitgeschakeld wanneer deze 15 minuten niet gebruikt is.

Diagnose

Speciale software, verkrijgbaar als accessoire, maakt het mogelijk om met de pc meer informatie te krijgen over de plafonddlift, zoals het aantal bedrijfsuren, het aantal keer tillen, het aantal overbelastingen, statistieken over onderhoud, enz.



PRODUCTSPECIFICATIE

Artikelnr.	Product	Beschrijving
50200016	RisePorto300	Compleet met handbediening en lader, maximale belasting 140 kg
50200015	RisePorto450	Compleet met handbediening en lader, maximale belasting 205 kg

Trolley apart te bestellen.

ACCESSOIRES

Artikelnr.	Product	Beschrijving
50200014	Trolley 360 RisePorto	360° draaiende trolley
50200004	Room transfer strap	Riem voor kamerverplaatsing, 300 mm
70200021	Room transfer strap	Riem voor kamerverplaatsing, 700 mm
70200022	Room transfer strap	Riem voor kamerverplaatsing, 800 mm
70200023	Room transfer strap	Riem voor kamerverplaatsing, 900 mm
70200024	Room transfer strap	Riem voor kamerverplaatsing, 1000 mm
50200017	Handle for mounting	Hendel voor bevestiging, 750 mm
70200053	Lift strap extension	Tilriemverlenging, 370 mm
70200054	Lift strap extension	Tilriemverlenging, 570 mm
70200055	Lift strap extension	Tilriemverlenging, 670 mm
70200056	Lift strap extension	Tilriemverlenging, 770 mm
70200057	Lift strap extension	Tilriemverlenging, 870 mm
70200058	Lift strap extension	Tilriemverlenging, 970 mm
70200048	Software for diagnostics	Software voor diagnose

Railsystemen

De SystemRoMedic™-reeks van Handicare bestaat onder andere uit railsystemen, bedoeld voor permanente installatie aan het plafond en/of de wand (MilkyWay) of bedoeld als vrijstaande liftstandaard (Castor en Helena).

Tilbanden

SystemRoMedic™ heeft ook een uitgebreid assortiment functionele en comfortabele tilbanden van hoge kwaliteit die ontworpen zijn voor veilig, comfortabel en individueel aangepast tillen in verschillende situaties. De tilbanden zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en maten, variërend van XXS tot XXL. Er zijn tevens speciale tilbanden in de maten XXXL en XXXXL voor extreem grote en zware zorgvragers.

Ga naar www.handicare.com voor meer informatie en om een exemplaar te bestellen van de brochure met tilbanden.



TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale belasting, RisePorto300:	140 kg
Maximale belasting, RisePorto450:	205 kg
Materiaal, chassis:	Aluminium
Materiaal, behuizing:	Niet-brandbaar ABS-plastic
Materiaal, tiljuk:	Aluminium
Afmetingen, lengte x breedte x hoogte:	288 x 152 x 153 mm
Totale hoogte:	270 mm
Gewicht:	5,8 kg
Verplaatsing langs de rail:	Handmatig
Tiljuk:	Geïntegreerd, opklapbaar
Tiljuk, breedte:	458 mm
Handbediening:	Elektrisch, 4 knoppen
Tilbereik:	1700 mm
Tilsnelheid, zonder belasting:	30 mm/sec
Tilsnelheid, met belasting:	18-23 mm/sec
Geluidsniveau, met belasting:	57 dB(A)
Nooddaalfunctie:	Elektrisch en handmatig
Noodstop:	Handmatig
Accu:	NiMH 26,4 V 2,7 Ah
Beschermingsklasse, lifteenheid:	IPX3
Beschermingsklasse, handbediening:	IPX4



RisePorto voldoet aan de vereisten van de Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen voor producten van Klasse 1, Richtlijn 93/42/EEG.



Weteringweg 5-9
2641 KM Pijnacker
Tel: 015 - 369 54 40
Fax: 015 - 369 71 64
www.handicare.com
info.LS@handicare.com

SystemRoMedic™ is een complete oplossing voor gemakkelijke verplaatsingen. Het concept bestaat uit vier productgebieden die voorzien in de meeste behoeften van verschillende verplaatsingssituaties.

Verplaatsing tussen twee locaties. **Positionering** op dezelfde locatie.

Ondersteuning voor mobiliteit. **Tillen** zowel handmatig als mechanisch.