

+++

Max: 300kg

ClassicSling zorgt voor een comfortabele en stabiele zittende houding en geeft de patiënt een gevoel van veiligheid. De band is bedoeld om na het verplaatsen in de stoel te blijven - de patiënt zit op de tilband. De band biedt steun vanaf de knieholte tot en met de schouders. ClassicSling is bedoeld voor gebruik in de meestvoorkomende tilsituaties zoals het verplaatsen van bed naar rolstoel, enz.

SystemRoMedic omvat vier categorieën: verplaatsen, repositioneren, ondersteunen en tillen.



## Functionele inspectie

Controleer de toestand en werking van de tilband regelmatig, en altijd na wassen.

Controleer of dat het materiaal niet is versleten, beschadigd of gebleekt. Als er tekenen van slijtage zijn moet het product worden getest op sterkte en worden weggegooid als er twijfel is aan de veiligheid.



## Lees altijd de instructies

Lees de instructies voor alle bij verplaatsingen gebruikte hulpmaterialen.


Kies de maat tilband zorgvuldig zodat ongemak wordt voorkomen en de patiënt niet uit de band kan glijden. Als de band te groot is bestaat het risico dat de patiënt er uit kan glijden.

Let op, bij gebruik van een tilband met standaard (niet-gescheiden) beensteunen kan de patiënt voorover kantelen.

Laat een patiënt die opgetild is nooit zonder toezicht.

Breng eerst de ruglussen van de tilband aan en daarna de beensteunlussen. Gebruik altijd een goedgekeurd tiljuk.

## De ClassicSling kan alleen worden aangebracht als de patiënt volledig ligt

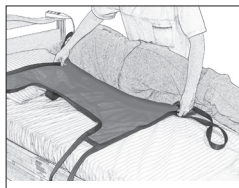

1. Draai de patiënt naar u toe. Plaats de tilband zo dat het middendeel de ruggengraat volgt en de onderrand ongeveer 5 tot 10 cm boven de knieholte van de patiënt komt. Plaats de rand van de tilband zo ver mogelijk onder de patiënt.
2. Draai de patiënt terug en zorg dat hij midden op de band komt te liggen.
3. Hef bij voorkeur de rugondersteuning voor het tillen. Begin met tillen; stop als de banden strak staan en controleer of alles OK is voordat u doorgaat met tillen.
4. De tilband blijft in de stoel.

## De ClassicSling kan alleen worden verwijderd als de patiënt op het bed/de brancard of vloer ligt

Voer de stappen als bij het aanbrengen in omgekeerde volgorde uit.

### Materiaal:

Netpolyester: Luchtig, goed ventilerend materiaal dat ideaal is om onder de patiënt te laten.

### Onderhoud van het product:

Lees het productlabel.



Gebruik geen wasmiddel.  
Hang de band, voor een maximale levensduur, op om te drogen of droog hem bij lage temperatuur in de droger.

### Maten

Tilbanden kunnen vaak worden gebruikt voor zowel 2- als 4-punts tiljucken. Het is van essentieel belang dat de breedte van het tiljuk geschikt is voor het model tilband en de status en capaciteiten van de patiënt. Als het voorkomen van infecties belangrijk is kunnen wegwerptilbanden gebruikt worden die bij slechts één patiënt worden aangebracht.

Maat		XS/oranje	S/rood	M/geel	L/groen	XL/paars
Aanbev. patiënt	lbs	44-88	66-132	121-187	176-265	243-309
gewicht	kg	20-40	30-60	55-85	80-120	110-140
Tilband hoogte	inch	31,5	35,5	37,5	38,5	39,5
	cm	80	90	95	98	100

Neem bij vragen over product-trials, advies of informatie contact op met uw Hnadicare vertegenwoordiger.

Neem, als u meer informatie nodig hebt, contact op met uw verplaatsingsspecialist of ga naar [www.handicare.com](http://www.handicare.com). Zorg dat u altijd beschikt over de meest recente versie van de handleiding. Handleidingen kunnen worden gedownload van onze website: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

### Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640  
SE-175 27 Järfälla  
SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200  
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)  
E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

