



# WendyLett

## Glijlakens

### *Makkelijk draaien in bed*

WendyLett is bedoeld voor zorgvragers die moeite hebben met draaien in bed. WendyLett glij- en treklakens zijn ontworpen om de zelfstandigheid van de zorgvrager zoveel mogelijk te behouden en overbelasting van de zorgverlener zoveel mogelijk te voorkomen.



## Drie typen lakens

WendyLett wordt als een normaal laken in het bed gelegd, met de gladde baan in het midden. Het gladde satijn maakt het draaien en zijwaarts verplaatsen van de zorgvrager mogelijk met minimale inspanning. De speciaal geweven katoenen randen fungeren als anti-glij materiaal aan de zijkant van het laken. Voor zorgvragers die meer hulp nodig hebben, kan WendyLett gecombineerd worden met het WendyLett2Way treklaken of het WendyLett4Way trek- en glijlaken.

## WendyLett keuze hulp


Handicare maakt het u graag gemakkelijker. Om eenvoudig het juiste WendyLett product of combinatie aan producten te vinden voor uw situatie, hebben wij de WendyLett Keuzehulp ontwikkeld. Met dit eenvoudige stappenplan komt u tot de passende WendyLett oplossing voor makkelijker draaien en positioneren in bed. Kijk voor de keuzehulp op [www.handicare.com/nl](http://www.handicare.com/nl)

## Comfortabel en functioneel materiaal

De WendyLett lakens zijn gemaakt van polyester, katoen en satijn. Het witte satijn is glad waardoor het gemakkelijk glijdt. Bij de speciaal geweven katoenen stof is de streep de glijrichting. De lakens zijn sterk, slijtvast en kunnen worden gewassen tot 90° C. In de droger kunnen ze op lage temperatuur worden gedroogd.

## Zelf-instruerend en handig ontwerp

De wit/grijze strepen en ruitjespatronen geven aan in welke richting het laken kan glijden en dus hoe het laken

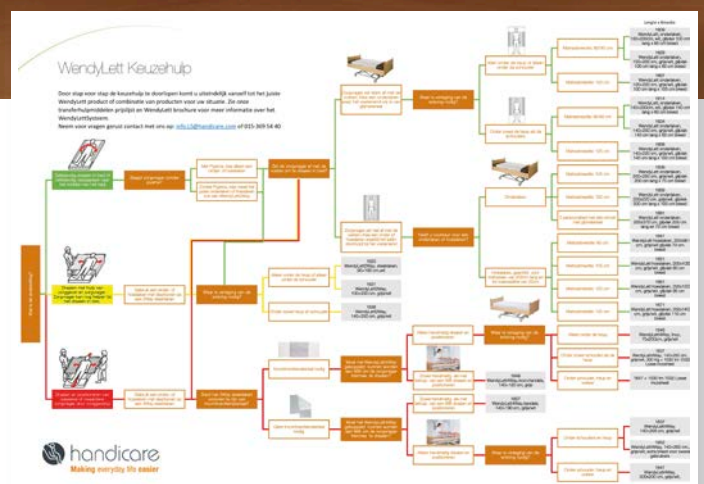

gebruikt kan worden. Het ontwerp maakt de lakens tevens gemakkelijk te herkennen in de was.

## Een hulpmiddel dat decubitus helpt voorkomen

Met WendyLett kunnen kleine transfers zoals draaien en positioneren in bed uitgevoerd worden zonder wrijving op de huid van de zorgvrager. De lakens kunnen worden gebruikt bovenop een drukverlagend matras zonder afbreuk te doen aan de drukverlagende eigenschappen van het matras. Voor een maximaal comfort van de zorgvrager hebben de lakens alleen naden tussen de verschillende materialen.

Kijk voor meer informatie en video's met tips voor eindgebruikers op [www.handicare-hulpmiddelen.nl](http://www.handicare-hulpmiddelen.nl)





## WendyLett



### Onder- of hoeslaken

Voor gebruikers die moeite hebben met zelfstandig draaien in bed. Gebruik WendyLett in plaats van het gewone beddengoed.




## WendyLett2Way



Een steeklaken dat gebruikt wordt in combinatie met het WendyLett onder- of hoeslaken

Voor zelfstandige gebruikers, maar ook voor gebruikers die hulp nodig hebben bij het draaien in bed, maar wel actief kunnen participeren.

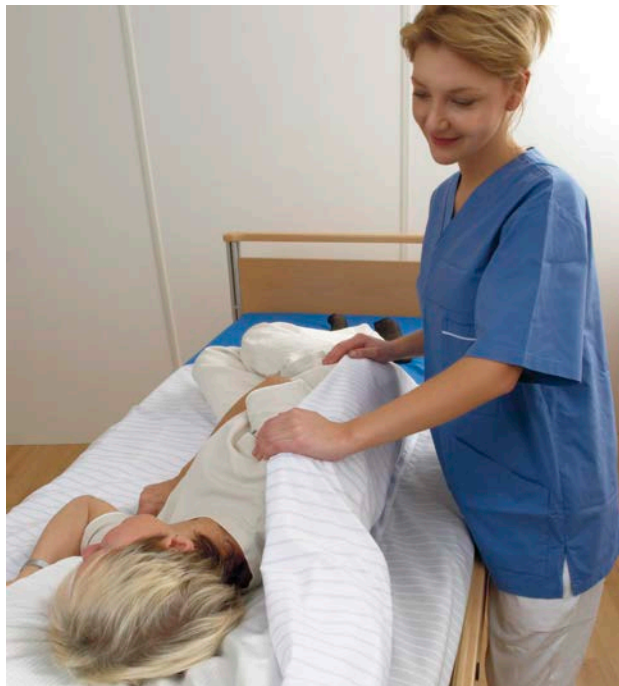

## WendyLett4Way



Een steeklaken te gebruiken in combinatie met het WendyLett onder- of hoeslaken.

Deze combinatie is bedoeld voor de zwaardere of passievere gebruiker die met hulp gedraaid of hogerop in bed gepositioneerd moet worden. Dit type steeklaken is aan de onderzijde ook voorzien van glijmateriaal, waardoor de gebruiker eenvoudig is te draaien en herpositioneren.




# WendyLett - glij-onderlaken




Dit onderlaken is geschikt voor mensen die moeite hebben met **zelfstandig draaien in bed**, maar wel het grootste deel van de dag uit bed zijn. Het onderlaken is gemaakt van glad satijn in het midden en heeft een veilige anti-sliprand aan beide zijden van het matras. Door te kiezen voor een onderlaken dat niet helemaal doorloopt tot aan het voeteneind, hebben mensen meer grip bij het voeteneinde waardoor zij hier beter kunnen afzetten met de voeten. Dit type onderlaken wordt op zijn plaats gehouden door de randen van het laken goed in te stoppen onder het matras, vandaar dat de WendyLett onderlakens breed zijn uitgevoerd. Maximaal gebruikersgewicht is 300 kg.




Diverse lengte maten:

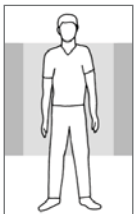

100 cm lang glijvlak:  
Voor verlaging wrijving onder heup of schouders (afhankelijk van waar WendyLett is geplaatst in bed)

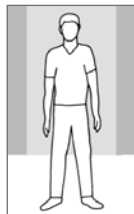

140 cm lang glijvlak:  
Voor verlaging wrijving onder heup en schouders (voeten behouden grip om af te kunnen zetten)

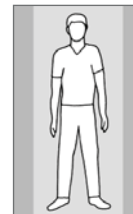

200 cm lang glijvlak:  
Voor verlaging wrijving onder schouders, heup en voeten

Artikel nr.	Productomschrijving (lengte x breedte)	t.b.v. bed breedte	glijvlak breedte	eenheid
1609	WendyLett, onderlaken, 100x200cm, wit, glijvlak 100 cm lang	80/90 cm	60 cm	stuk
1614	WendyLett, onderlaken, 140x200cm, wit, glijvlak 140 cm lang	80/90 cm	60 cm	stuk
1629	WendyLett onderlaken, 100x200 cm, grijs/wit, glijvlak 100 cm lang	80/90 cm	60 cm	stuk
1634	WendyLett onderlaken, 140x200 cm, grijs/wit, glijvlak 140 cm lang	80/90 cm	60 cm	stuk
1639	WendyLett onderlaken, 200x200 cm, grijs/wit, glijvlak 200 cm lang	105 cm	70 cm	stuk
1667	WendyLett onderlaken, 100x220 cm, grijs/wit, glijvlak 100 cm lang	120 cm	100 cm	stuk
1668	WendyLett onderlaken, 140x220 cm, grijs/wit, glijvlak 140 cm lang	120 cm	100 cm	stuk
1669	WendyLett onderlaken, 200x220 cm, grijs/wit, glijvlak 200 cm lang	120 cm	100 cm	stuk
1681	WendyLett onderlaken, 200x370 cm, grijs/wit, glijvlak 200 cm lang	2 pers.	70 cm	stuk

1681 betreft een hoelaken met 1 glijvlak van 70 cm breed en heeft extra stof aan beide zijde voor positioneren van glijvlak op een 2 persoonsmatras.

# WendyLett - glij-hoeslaken




Dit hoeslaken is voorzien van een elastieke band en is geschikt voor mensen die moeite hebben met zelfstandig draaien in bed en een groter deel van de dag in bed liggen. Het is gemaakt van glad satijn in het midden en heeft een veilige anti-sliprand aan de zijkant van het matras. Het gladde satijn geeft nauwelijks wrijving waardoor er minder kans is op doorligplekken, ook op de hielen. Geschikt voor matrassen van maximaal 20 cm dik. Maximaal gebruikersgewicht is 300 kg.



Elastieke band om matras

Veilige anti-slipranden

voorzien van uitsparing voor slang  
luchtwisselmatras

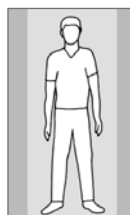

200 cm lang glijvlak: Voor verlaging wrijving onder schouders, heup en voeten

Artikel nr.	Productomschrijving (lengte x breedte)	t.b.v. bed breedte	glijvlak breedte	eenheid
1641	WendyLett hoeslaken, 200x90 cm, grijs/wit	90 cm	70 cm	stuk
1651	WendyLett hoeslaken, 200x105 cm, grijs/wit	105 cm	80 cm	stuk
1661	WendyLett hoeslaken, 200x120 cm, grijs/wit	120 cm	95 cm	stuk
1671	WendyLett hoeslaken, 200x140 cm, grijs/wit	140 cm	110 cm	stuk



## WendyLett2Way - steeklaken



Dit opleglaken is gemaakt van speciaal geweven katoen. Het glijdt alleen in de richting van de strepen. U kunt het gebruiken om met het hoofdeinde omhoog in bed te zitten zonder naar beneden te schuiven en om gemakkelijker te draaien in bed, eventueel met hulp. Het WendyLett2way opleglaken dient gebruikt te worden bovenop het WendyLett onderlaken of hoeslaken. Zorg ervoor dat u met uw schouder en/of uw heup op het steeklaken ligt. Maximaal gebruikersgewicht is 300 kg.



Alleen te gebruiken i.c.m.

WendyLett onder- of hoeslaken

WendyLean Glij-kussensloop

Glijdt alleen in de richting van de strepen

In meerdere maten verkrijgbaar



Artikel nr.	Productomschrijving (lengte x breedte)	eenheid
1620	WendyLett2Way, trekzeil, 90x180 cm, wit	stuk
1631	WendyLett2Way, 100x200 cm, grijs/wit	stuk
1636	WendyLett2Way, 140x200 cm, grijs/wit	stuk

## WendyLean - glij-kussensloop



Deze kussensloop heeft een onderkant van glad satijn. Dit glijdt gemakkelijk over het WendyLett hoeslaken waardoor het hoofd en de schouders van de gebruiker mee omhoog schuiven als u uw hoofdeinde omhoog zet. Hierdoor wordt de gebruiker minder in elkaar gedrukt wat het comfort ten goede komt. Helpt tevens decubitus op de oorschelp voorkomen.



Artikel nr.	Productomschrijving (lengte x breedte)	eenheid
1680	WendyLean, 50x60cm, grijs/wit kussensloop Maximaal gebruikersgewicht is 200 kg.	stuk

# WendyLett4Way - steeklaken



Dit opleglaken heeft een satijnen onderkant waardoor er nog minder wrijving tussen de lakens ontstaat en het positioneren en draaien van **zwaardere en passieve cliënten** nog makkelijker gaat. Daarnaast glijdt de WendyLett in alle richtingen, waardoor de zorgvrager **zowel verticaal, als horizontaal gepositioneerd kan worden in bed**. De bovenkant is gemaakt van speciaal geweven katoen wat comfortabel aanvoelt. Het WendyLett4way opleglaken dient gebruikt te worden bovenop het WendyLett onderlaken of hoeslaken. WendyLett4Way is tevens verkrijgbaar in uitvoeringen voorzien van handels en/of met incontinentiemateriaal, waarmee de zorgvrager ook gedraaid en gepositioneerd kan worden met behulp van een tillift.



Artikel nr.	Productomschrijving (lengte x breedte)	eenheid
1637	WendyLett4Way, 140x200 cm, grijs/wit, 300 kg	stuk
1647	WendyLett4Way, 200x200 cm, grijs/wit, Maximaal gebruikersgewicht is 300 kg.	stuk
1648	WendyLett4Way, inco, 75x200 cm, grijs/wit, Voorzien van zeer absorberend materiaal. Het oppervlak voelt altijd droog aan, waardoor doorliggen (decubitus) wordt voorkomen. Max. 300 kg.	stuk
1649	WendyLett4Way, inco+handels, 140x120 cm, grijs Kan gebruikt worden i.c.m. tillift om zorgvrager te draaien. Maximaal gebruikersgewicht is 200 kg.	stuk
1657	WendyLett4Way, handels, 140x190 cm, grijs/wit Kan gebruikt worden i.c.m. tillift om zorgvrager te draaien. Maximaal gebruikersgewicht is 200 kg.	stuk
1652	WendyLett4Way, 140x260 cm, grijs/wit, Voorzien van extra stof voor zwaardere gebruikers Maximaal gebruikersgewicht is 300 kg.	stuk

# Making everyday life easier

## 30 jaar in dienst van de eenvoud

Handicare's unieke en eenvoudige transferconcept –voorheen System RoMedic™ – is het meest uitgebreide en complete assortiment van slimme, gemakkelijk te gebruiken en veilige transferhulpmiddelen op de markt. Handicare is er voor alle soorten transfers van cliënten en voldoet aan alle eisen om een cliënt veilig te transfereren.

De filosofie achter het transferassortiment is gericht op het voorkomen en verminderen van beroeps gerelateerde problemen. Hierdoor worden cliënten in staat gesteld om een grotere mate van onafhankelijkheid en zelfredzaamheid te ervaren.

Door een unieke combinatie van scholing, training en een compleet assortiment van efficiënte transferhulpmiddelen, biedt Handicare een aanmerkelijke verbetering van zowel werkomstandigheden als zorgkwaliteit. Daarnaast levert het assortiment een beduidende kostenbesparing op.

## Ontwikkeld en geproduceerd door Handicare

Al meer dan 30 jaar biedt Handicare eenvoudige oplossingen aan met fantastische resultaten en daardoor een gemakkelijker leven voor zowel zorgvragers als personeel in de zorgsector. Van 1984 tot 2010 onder de naam RoMedic™ en vanaf 1 januari 2011 onder de naam van Handicare.

**Handicare biedt oplossingen en ondersteuning om de zelfstandigheid van ouderen en mensen met een beperking te verhogen, evenals het makkelijker maken voor diegenen die voor hen zorgen.** Handicare Group is een van de leidende Healthcare bedrijven in de wereld met eigen productie- en verkoopkantoren in Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Canada en de Verenigde Staten. Handicare's producten worden gedistribueerd door partners in meer dan 40 landen in de wereld. Ons brede assortiment met hoogkwalitatieve producten omvat badkameroplossingen, transfer- en tilhulpmiddelen, trapliften en autoaanpassingen.



handicare

### Handicare Bathroom Safety B.V.

Weteringweg 9,  
2641 KM Pijnacker,  
Tel: +31 (0)15 369 54 40  
Fax: +31 (0)15 369 71 64  
[www.handicare.com/nl](http://www.handicare.com/nl)  
[info.LS@handicare.com](mailto:info.LS@handicare.com)