



Les SoftLegSupports de Handicare sont des manchons rembourrés qui peuvent être enfilés sur les sections pour les jambes des harnais de levage avec appuis séparés pour les jambes. SoftLegSupport est utilisé essentiellement pour les patients qui sont sensibles aux points de pression. Vendus par paires, ils sont faciles à mettre en place pour le personnel.

SystemRoMedic comporte un vaste choix de harnais de levage fonctionnels, confortables et de haute qualité, adaptés aux différents types d'auxiliaires de levage et aux différents besoins des utilisateurs. Les harnais de levage sont disponibles dans plusieurs matières différentes et dans les tailles de XXS à XXL. Tous les modèles, à la fois sûrs et très faciles à utiliser, peuvent supporter une charge maximale de 300 kg. Le choix du modèle et de la matière dépend de la situation de levage et des besoins du patient.



## Contrôle de fonctionnement

### Inspection visuelle et mécanique

Effectuer des inspections régulières du harnais de levage. Toujours contrôler après un lavage. Vérifier que les coutures et les matériaux sont intacts et non endommagés. Vérifier si le matériau est usé ou pâli. Exercer une charge sur les boucles et les poignées et vérifier qu'elles supportent une contrainte élevée. S'il présente des signes d'usure, le produit doit être mis au rebut.



### Toujours lire le manuel

Toujours lire les manuels de tous les auxiliaires utilisés lors d'un transfert de patient.

Conserver le manuel pour qu'il soit accessible aux utilisateurs du produit.

Ne pas laisser le patient sans surveillance pendant la phase de transfert.

Pour le bien-être de la personne et pour lui éviter de glisser du harnais, toujours vérifier minutieusement l'auxiliaire de levage. Accrocher d'abord les œillets du dos du harnais de levage, puis accrocher les œillets des appuis pour les jambes. Utiliser un étrier de levage éprouvé.

## Mise en place de SoftLegSupport



1



2

1. SoftLegSupport a un côté long qui est plus long que l'autre, et un côté court qui est plus long que l'autre.
2. Enfiler SoftLegSupport de sorte que le côté long qui est plus long que l'autre soit placé vers le centre du harnais de levage et que le côté court qui est plus long que l'autre soit placé en haut, contre le dossier du harnais de levage. Enfiler l'une des sections pour les jambes. Vous pouvez maintenant utiliser normalement le harnais de levage, bien lire le manuel concerné.

## Matériaux :

Polyester : Matériau résistant et présentant une friction faible. Supporte des températures de lavage élevées.

## Conseils d'entretien :

Lire l'étiquette-conseil du harnais de levage.



Ne pas utiliser de produit de rinçage adoucissant.  
Éviter le sèche-linge pour augmenter la longévité du produit.

Taille	XS/Orange	S/M/Rouge/Jaune	L/XL/Vert/Lilas
Poids brut rec.lbs	40-80	70-190	180-450
de l'utilisateur kg	20-35	30-90	80-200

Si vous avez des questions sur le produit et son utilisation, veuillez contacter votre distributeur local. Prière de consulter le site [www.handicare.com](http://www.handicare.com) pour la liste complète des distributeurs. Veiller à toujours disposer de la version correcte du manuel. La version la plus récente peut être téléchargée sur notre site Internet : [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200

Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

