

Bevestigings-adviezen

Voor vaste en opklapbare toiletbeugels, douchezittingen, vloerstatief, hoogte verstelplaten en wegzwenkbare papegaai.

Type wand	Advies	Schroeven
Ongeperforeerd/massief beton, natuursteen, baksteen, kalkzandsteen	Fischer Universeelplug UX 10 art. 77869	rvs schroeven 8 mm
Ongeperforeerd/massief gasbeton (Ytong, Durox), bimsteen, gipsblokken massieve drijfsteen	Injectiemortel + draadstang Evt. toe te passen materialen zijn: - FIS VS 150 C set art. 45302 of FIS VS 150 C art. 0509 - Fischer Draadstang M8	rvs draadstang M8
Geperforeerd/hol holle baksteen (Poriso), holle kalkzandsteen	Injectiemortel + injectiehuls + inschroefhuls Evt. toe te passen materialen zijn: - FIS VS 150 C set art. 45302 of FIS VS 150 C art. 0509 - Fischer Injectiehuls FIS HK 14x70K art.50436 - Fischer Inschroefhuls FIS E 8x85K art.58050	rvs schroeven 8 mm
Gipskarton, geperste houtvezelplaat, spaanplaat	Wand verstevigen met bijvoorbeeld multiplex	rvs hout Schroeven 8 mm
Voorwandsysteem bv. Geberit, Wisa	Wand verstevigen met bijvoorbeeld watervast multiplex, dikte 32 mm	rvs hout Schroeven 8 mm

Voor wandbeugels Ergogrip, doucheramens, wastafelbeugel, trapspilbeugel, kozijnbeugel en rugleuningen t.b.v. toilet.

Type wand	Advies	Schroeven
Ongeperforeerd/massief beton, natuursteen, baksteen, kalkzandsteen	Fischer Universeelplug UX 10 art. 77869	rvs schroeven 6 mm
Ongeperforeerd/massief gasbeton (Ytong, Durox), bimsteen, gipsblokken massieve drijfsteen	Injectiemortel + draadstang Evt. toe te passen materialen zijn: - FIS VS 150 C set, art. 45302 of FIS VS 150 C art. 0509 - Fischer Draadstang M6	rvs draadstang M6
Geperforeerd/hol holle baksteen (Poriso), holle kalkzandsteen	Injectiemortel + injectiehuls + inschroefhuls Evt. toe te passen materialen zijn: - FIS VS 150 C set art. 45302 of FIS VS 150 C art. 0509 - Fischer injectiehuls FIS HK 12x60K art.50432 - Fischer inschroefhuls FIS E 6x75K art.58049	rvs schroeven 6 mm
Gipskarton, geperste houtvezelplaat, spaanplaat	Wand verstevigen met bijvoorbeeld multiplex	rvs hout Schroeven 6 mm
Voorwandsysteem bv. Geberit, Wisa	Wand verstevigen met bijvoorbeeld watervast multiplex, dikte 32 mm	rvs hout Schroeven 6 mm

Deze bevestigingsadviezen geven een indicatie van de mogelijkheden. De bevestigingsmethoden en de lengtes van de schroeven dienen aan de hand van de aard van de wand bepaald te worden. Handicare is niet verantwoordelijk voor ondeskundige bevestiging van de producten en eventuele schade die daaruit voortvloeit.

Handicare heeft dit productoverzicht met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar productspecificaties en de assortimentssamenstelling kunnen tussentijds wijzigen. Handicare aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit het gebruik van de in deze brochure vermelde gegevens.