


RoomTransferHook

SystemRoMedic™



Manual - Norsk

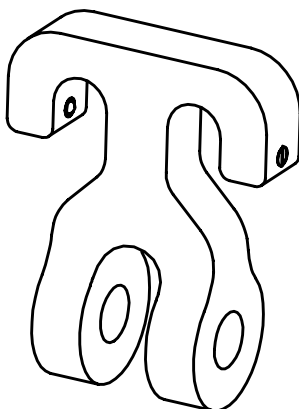

SWL: 300kg

RoomTransferHook er et tilbehør til løftebøyle som i kombinasjon med skinnesystemer og løftemotorer muliggjør en forflytning av brukere mellom ulike rom. Den er spesielt velegnet ved smidige forflytninger av brukere mellom rom med separate og adskilte skinnesystemer.

I Handicares produktserie SystemRoMedic inngår blant annet løftere og løfteseler. SystemRoMedic innebærer en helhetstankegang rundt forflytninger som er oppdelt i fire kategorier: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller. Kontroller at materialet er helt og skadefritt.

Før bruk:

Kontroller at løftebøylen med RoomTransferHook er plassert i det rommet du vil løfte fra, og har den tomme kroken mot løftemotoren som du skal forflytte til.

Kontroller samtlige fester og sikkerhetssperrer.



Les alltid bruksanvisningen

Les alltid manualene for alle hjelpemidler som benyttes i en forflytning.

Oppbevar manualen tilgjengelig for brukere av produktet.

Løfteren skal bara benyttes av personer som har fått brukeropplæring på løfteren.

Innholdsfortegnelse

Montering	3-4
- Anbefalte kombinasjoner	3
- Deler som inngår RoomTransferHook (RTH-krok)	3
- Montering av RTH-kroken på løftebøylen	3
- Fest løftebøylen med RTH-kroken på løftemotoren med H-adapter	4
Å bruke produktet	5-7
- Viktig informasjon	5
- Maksimumslast	5
- Funksjon H-adapter og RTH-krok	5
- Forflytning mellom rom med to løftemotorer	6-7

Montering

Anbefalte kombinasjoner

RoomTransferHook kan monteres på følgende løftebøyer:

SlingBar S
SlingBar M
SlingBar L
SlingBarRFL450


Forflytning mellom to rom krever et skinnesystem i hvert rom.

Motorene skal være monteret i skinnesystemet slik at løftebåndene har den flate siden mot hverandre.

Anbefalte løftemotorer:

RiseAtlas450/625
Rise450/625
Reda

Deler som inngår RoomTransferHook (RTH-krok):

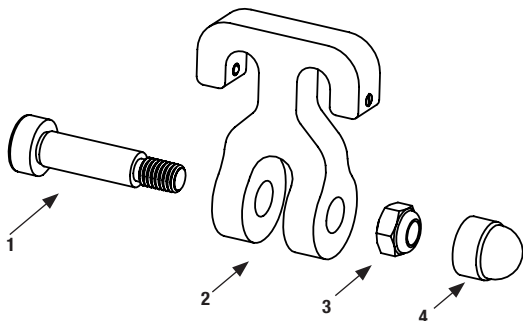

1. Bolt ISO7379 DIN610 10xM8x30


2. RTH-krok

3. Låsemutter DIN985 M8fzb

4. Plasthette MSM 8S


Montering av RTH-kroken på løftebøylen

Bolten føres gjennom bøylebollen og skrues fast.

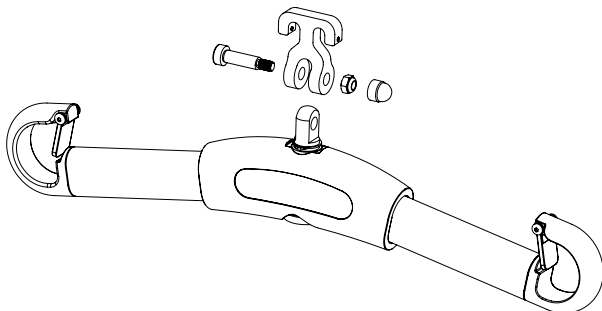

Fest løftebøylen med RTH-kroken på løftmotoren med H-adapter

Fest RTH-kroken ved H-adapteren på den første løftmotoren slik at den "tomme" kroken er mot døråpningen/den andre løftmotoren.

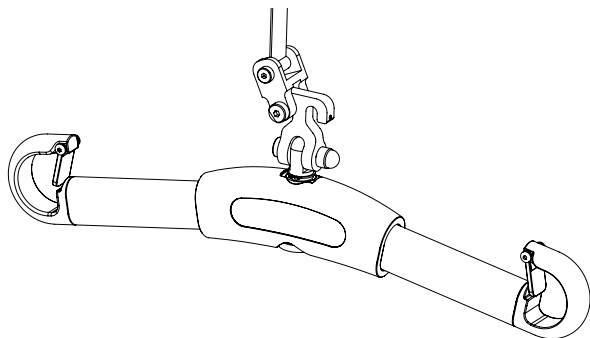

Å bruke produktet




Viktig informasjon

- Motorene skal være montert i skinnesystemet slik at løftebåndene har den flate siden mot hverandre.
- Maksimal avstand mellom motorenes løftebånd får være 70 cm i vertikalt leie.
- Kontroller at den "tomme" kroken på RoomTransferHook er mot døråpningen/den andre løftemotoren før brukeren løftes opp.
- Sikre at H-adapteren på den løftemotoren som brukeren skal løftes til er ordentlig festet på dobbelkroken, før overflytningen starter.
- Løftetilbehøret skal være grundig testet i forhold til brukerens behov og funksjonsnivå.
- La aldri brukeren være alene under forflytningsmomentet.
- Maksimumslasten får ikke under noen omstendigheter overskrides. Se videre under avsnittet for maksimumslast.
- Garantien gjelder bara når reparasjoner eller endringer utføres av autorisert personell.


Maksimumslast

De ulike produktene i den sammensatte løfteenheten (løfter, løfteboyle, løftesele, vekt og eventuelt annet løftetilbehør) kan ha forskjellige maksimumslaster. Det er alltid den minste maksimumslasten på det respektive produktet i den sammensatte løfteenheten som er avgjørende. Kontroller alltid tillatt maksimumslast på løfter og løftetilbehør før bruk og kontakt

Funksjon H-adapter og RTH-krok

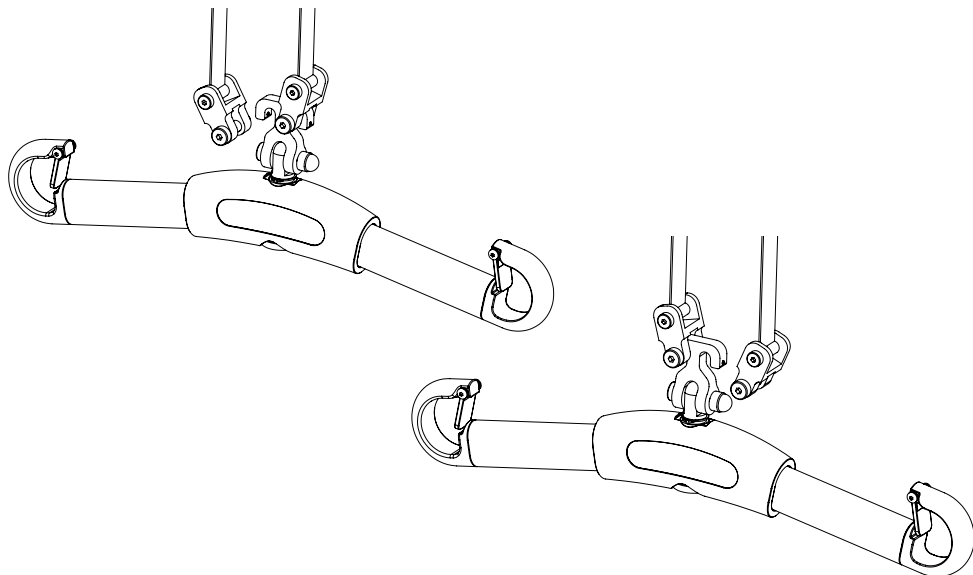

Forflytning mellom rom med to løftemotorer

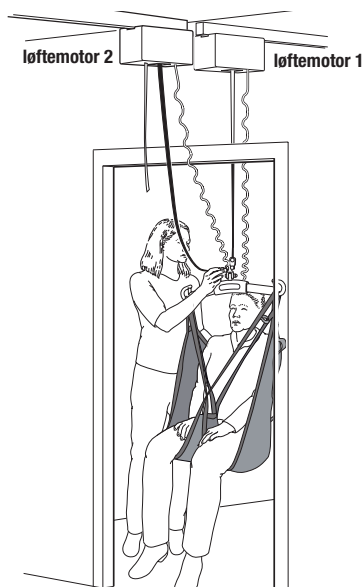

Kontroller før du løfter opp brukeren at den "tomme" kroken på RTH-kroken er mot døråpningen/den andre løftemotoren.

Før frem løftemotoren med brukeren så nær døråpningen som mulig. Senk ned brukeren slik at føttene subber i gulvet.

Ta løftebåndet til løftemotor 2 og senk båndet tilstrekkelig for å kunne kople på H-adapteren på RTH-kroken.



Kontroller at H-adapteren på løftemotor 2 er ordentlig festet i RTH-kroken.


Du skal høre en klikkelyd når H-adapteren koples på RTH-kroken.




Kontroller at H-adapteren på løftemotor 2 er ordentlig festet i RTH-kroken.

Du skal høre en klikkelyd når H-adapteren koples på RTH-kroken.

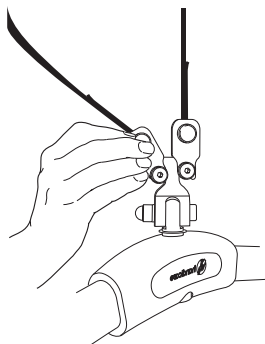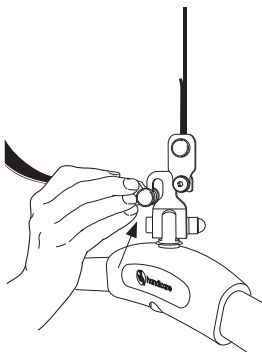


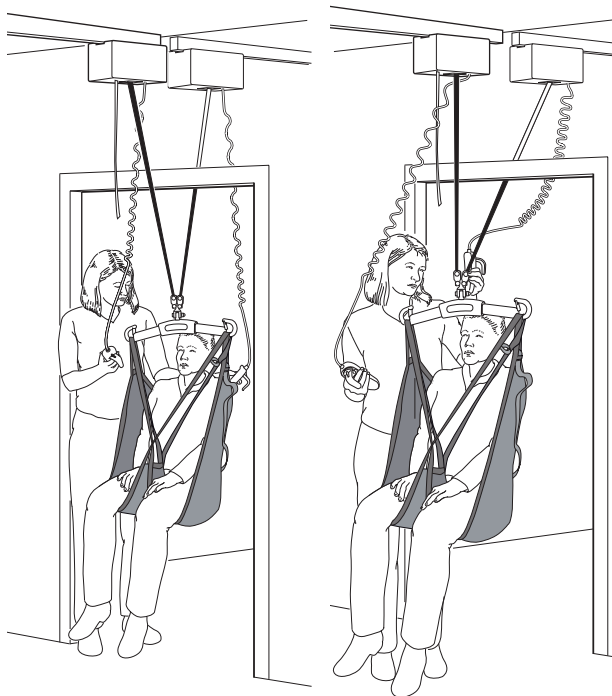

Kjør inn løftebåndet på løftemotor 2 slik at brukeren føres gjennom døråpningen med en smidig bevegelse. Ved behov kjøres løftebåndet på motor 1 ut til brukeren er helt overflyttet til løftemotor 2.

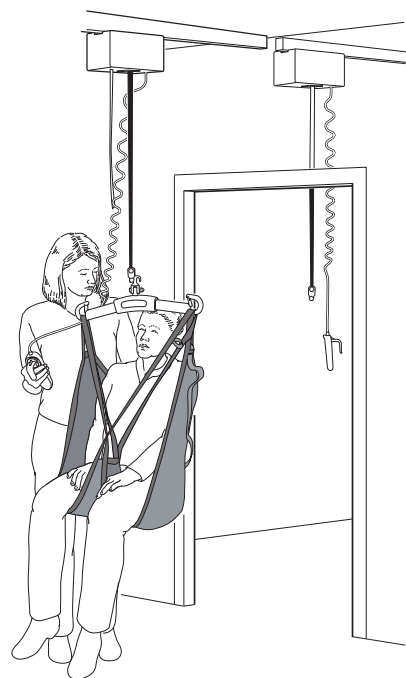

Når løftebåndet fra løftemotor 1 er tilstrekkelig avlastet, kan det koples i fra RTH-kroken.

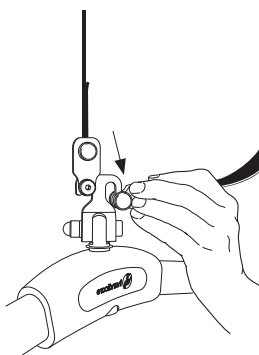

SystemRoMedic™

I 25 år har vi helhjertet egnet oss til utviklingen av smarte og lettanvendte hjelpemidler for sikre og enkle forflytninger. Vi ønsker å gjøre livet og arbeidet enklere for brukere og personell innen pleie og omsorg.

Erfaring, innovasjon og utdanning er grunnmuren i SystemRoMedic, en helhetsløsning for alle tenkbare forflytnings-situasjoner.

Overflytning, produkter for forflytning mellom to enheter

Posisjonering, produkter for leieforandring innen samme enhet

Støtte, produkter for støtte ved mobilisering

Løft, produkter tilpasset for løft

Filosofien bak SystemRoMedic fokuserer på å minske risikoen for arbeidsrelaterte skader samtidig som brukerens opplevelse av selvstendighet, uavhengighet og verdighet øker. Gjennom en kombinasjon av utdanning, trening og et komplett sortiment av effektive forflytningshjelpemidler tilbyr SystemRoMedic forbedring av både arbeidsmiljø og pleiekvalitet, samtidig som signifikante kostnadsbesparinger kan gjennomføres.

Vår misjon, å hjelpe mennesker, har alltid vært og kommer alltid å være drivkraften bak våre innovasjoner. Vi elsker enkle forflytninger.

Ved spørsmål om produkter og bruken av disse, kontakt din lokale distributør. Se www.handicare.com for en komplett distributørliste. Sjekk at du alltid har rett versjon av manualen tilgjengelig. De siste versjonene kan du laste ned fra vår hjemmeside: www.handicare.com



handicare

Handicare AB
Veddestav. 15, Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN

Tel: +46 (0)8-557 62 200
Fax: +46 (0)8-557 62 299
E-mail: info@handicare.se

Internet: www.handicare.com